



CATALOGO **PRODOTTI**



LA NOSTRA MISSION

"Una continua ricerca per trovare nuove soluzioni da offrire nella prevenzione e terapia di patologie venose e linfatiche e del lipedema, attraverso prodotti innovativi, certificati da istituti internazionalmente riconosciuti e supportati da una prestigiosa tradizione aziendale."


LA NOSTRA VISION

"Costruire un universo Paziente-centrico in cui le esigenze dei Pazienti siano il fulcro attorno cui far ruotare tutte le nostre azioni e il nutrimento della nostra innovazione."






1913 Cartolina pubblicitaria per la "calzatura igienica" "consigliata anche dai medici soprattutto per chi soffre di varici ed edemi ai piedi"

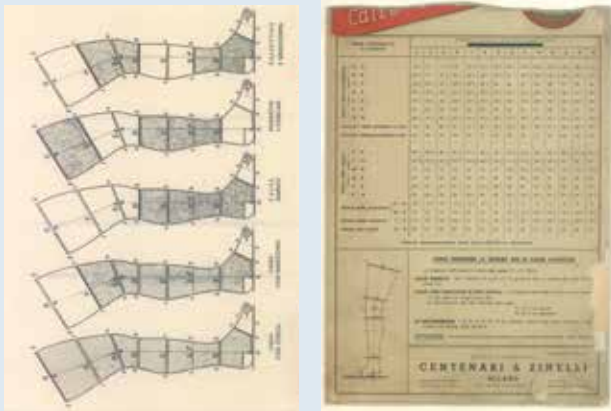

1942 Tabella per "misure approssimative delle calze elastiche di serie" a trama piatta

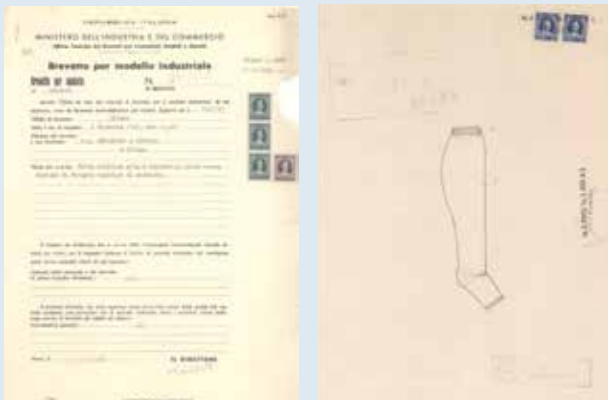

1947 Brevetto gambaletto curativo a trama circolare

UNA STORIA DI QUALITÀ

1872: nasce a Milano Centenari&Zinelli.

1936: viene prodotta la prima calza elastica per vene varicose.

1947: viene depositato il primo brevetto per un gambaletto curativo.

1966: le azioni di Centenari&Zinelli vengono quotate alla borsa di Milano.

1971: nasce il marchio **VARISAN®**

1982: il settore dei prodotti paramedicali, in forte sviluppo, viene distaccato dal resto dell'azienda ed organizzato in una Società indipendente: nasce così la Cizeta Paramedicali S.r.l.

La strategia dell'azienda, sempre più mirata allo sviluppo della linea medica nell'ambito delle calze e dei segmenti curativi in generale, ha portato nel 2000 alla trasformazione in CIZETA MEDICALI S.p.A.



QUALITÀ CERTIFICATA

CIZETA MEDICALI S.p.A. produce rispettando i principali standard qualitativi internazionali, a tutela e garanzia del paziente. La qualità dei prodotti è la chiave dei successi raccolti sia in campo nazionale che internazionale.



UNI EN ISO 9001 e UNI CEI EN ISO 13485

CIZETA MEDICALI ha un sistema di gestione della qualità conforme alle normative UNI EN ISO 9001 e UNI CEI EN ISO 13485. Attraverso queste certificazioni, ottenute nel 2001, CIZETA MEDICALI è in grado di garantire i massimi standard qualitativi di prodotto e servizio.



MDR 2017/745
Dispositivo medico Classe I
Class I Medical Device

Marchio CE

Tutti i prodotti fabbricati da CIZETA MEDICALI sono Dispositivi Medici di Classe I e soddisfano i requisiti della MDR 2017/745.



OEKO-TEX STANDARD 100

Tutti i prodotti fabbricati dal gruppo sono certificati OEKO-TEX, per garantire l'assenza di sostanze nocive a tutela della salute dei Pazienti.



RAL

Certificazione rilasciata dall'Istituto di Ricerca Hohenstein (Germania) che garantisce la qualità delle calze attraverso test periodici di qualità in accordo alla normativa RAL-GZ 387.



ASQUAL

Certificazione rilasciata dall'Associazione Qualità ASQUAL (Francia) che garantisce la corrispondenza dei prodotti certificati alle specifiche della normativa NF G30-102B garantendone la qualità.



CFDA

Certificazione rilasciata dalla CFDA (Chinese Food and Drug Administration) (Cina) che garantisce la corrispondenza dei prodotti certificati alle specifiche della normativa YY/T 0853-2011.



FDA


La Food and Drug Administration (FDA) è un'agenzia del Dipartimento della Sanità e dei Servizi Umani degli Stati Uniti. I prodotti CIZETA MEDICALI sono accreditati presso l'FDA che ha il fine di tutelare la salute pubblica, la sicurezza e l'efficacia.



EUROPEAN MANUFACTURERS
FEDERATION FOR COMPRESSION
THERAPY AND ORTHOPAEDIC
DEVICES

CIZETA MEDICALI è socio fondatore di Eurocom, associazione europea dei produttori nel settore della terapia compressiva e ausili ortopedici. Possono essere soci Eurocom solo le aziende produttrici di calze compressive medicali certificate RAL-GZ 387. Lo scopo dell'associazione è quella di promuovere la conoscenza della qualità delle calze certificate RAL-GZ 387 presso gli operatori del settore e i pazienti.

Verifica del profilo di compressione col sistema HOSY

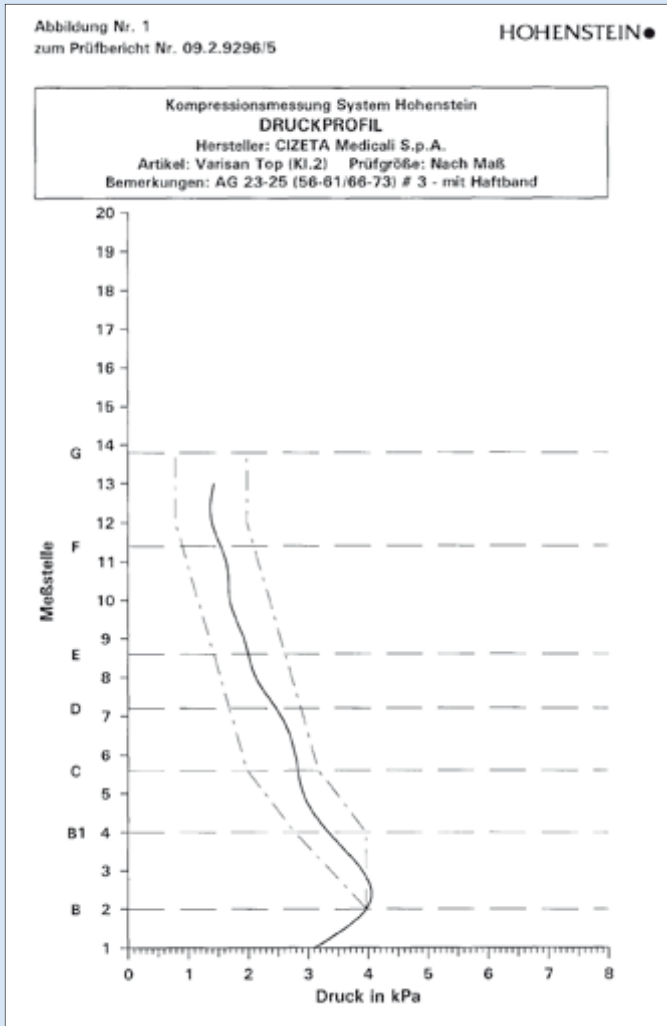

Profilo di compressione di
una calza VARISAN® TOP
effettuata dall'istituto tedesco
HOHENSTEIN

LA COMPRESSIONE GRADUATA

Quando la compressione esercitata alla caviglia è pari o superiore ai 18 mmHg, il tutore è definito medicale.

La compressione esercitata sull'arto è una compressione che decresce dal basso verso l'alto, con un profilo di pressione che al punto B (caviglia), è pari al 100%, al punto C (polpaccio) al 70% e al punto G (coscia) al 40%.

I tutori compressivi medicali sono prodotti utilizzando apposite macchine circolari o rettilinee dove, variando la tensione dell'elastomero di trama, si ottiene una compressione decrescente in funzione della vestibilità dichiarata.

Per ottenere una corretta compressione decrescente in tutte le taglie, occorre utilizzare telai con almeno tre cilindri di diametro.



Misurazione della compressione con dinamometro

LE CLASSI DI COMPRESSIONE

CIZETA MEDICALI S.p.A. è specializzata nella produzione di tutori elastocompressivi, utilizzati nel trattamento di flebopatie e linfopatie.

L'elastocompressione rimane sicuramente la terapia più nota, efficace e facilmente adattabile alle suddette patologie.

L'applicazione di una compressione esterna è in grado di controbilanciare, almeno parzialmente, gli effetti della stasi ematica e linfatica.

In funzione della stadiazione della patologia si sceglie la classe di compressione più adeguata.

I tutori sono prodotti in quattro classi di compressione, espresse in mmHg, in considerazione della compressione esercitata in caviglia.



Certificazione di prodotto secondo gli standard tedeschi RAL-GZ 387



Certificazione di prodotto secondo gli standard francesi NF G30-102B

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO		
Classe di compressione		
Ccl. 1	18-21 mmHg	10-15 mmHg
Ccl. 2	23-32 mmHg	15-20 mmHg
Ccl. 3	34-46 mmHg	20-36 mmHg
Ccl. 4	>49 mmHg	>36 mmHg

Gli enti certificatori internazionali più conosciuti sono l'Istituto di Ricerca Hohenstein (Germania), che garantisce la qualità delle calze attraverso test periodici di qualità in accordo alla normativa RAL-GZ 387 e l'Associazione Qualità ASQUAL (Francia), che garantisce la corrispondenza dei prodotti certificati alla normativa NF G30-102B.

I benefici delle calze compressive medicali certificate sono:

- la corretta compressione garantita in caviglia secondo la classe di compressione dichiarata
- il corretto profilo di compressione decrescente (diminuzione della pressione garantita dal basso verso l'alto)
- una durata garantita di sei mesi, della compressione e della decrescenza, dal primo utilizzo

QUANDO INDOSSARE LE CALZE ELASTOCOMPRESSIVE

Le calze vanno indossate al mattino. Controllare che le gambe siano ben pulite e asciutte.

Il trattamento compressivo con calze medicali deve essere effettuato solo nelle ore diurne. Brevi riposi pomeridiani non implicano necessariamente la rimozione del tutore. Si consiglia di camminare il più possibile, l'esercizio fisico è considerato parte integrante del trattamento dell'insufficienza veno-linfatica e migliora ulteriormente i benefici che si ottengono dall'indosso della calza compressiva.

LAVAGGIO CALZE

Si consiglia di effettuare un lavaggio giornaliero delle calze, ricordando che lavaggi frequenti non danneggiano il prodotto ma ne prolungano la durata. Si consiglia, inoltre, di non tagliare eventuali fili qualora fuoriuscissero dalla calza.

DURATA DEL TRATTAMENTO

Usualmente il trattamento compressivo con calze compressive medicali deve essere effettuato solo nelle ore diurne. La calza deve essere indossata al mattino, se possibile prima di alzarsi e tolta la sera, prima di andare a letto. Durante il riposo infatti la compressione trasmessa potrebbe risultare eccessiva. Per brevi riposi pomeridiani non è necessario togliere la calza. Si raccomanda durante il giorno di camminare il più possibile.

VALIDITÀ



L'alta qualità dei materiali impiegati nella costruzione del tutore elastocompressivo e le tecnologie adottate per la sua costruzione tecnica, garantiscono il prodotto per 6 mesi dal primo utilizzo, rispettando le istruzioni d'uso.

COME INDOSSARE LE CALZE

Si consiglia di usare guanti di gomma per evitare che anelli o unghie non limate danneggino la calza.


- Rovesciare la calza fino al tallone
- Inserire il piede nella calza e posizionare il tallone della calza nella corretta posizione
- Prendere la calza dall'estremità inferiore e farla scorrere sull'arto senza tensionarla eccessivamente, accompagnando il tessuto con piccoli movimenti a salire

L'indosso della calza risulta molto più agevole e rapido utilizzando l'infilcalze VARITEC® o VARISLIDE®.

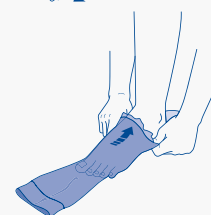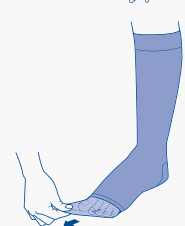

COME SFILARE LE CALZE

- Prendere la calza dall'estremità superiore e accompagnarla verso il basso con piccoli movimenti delle mani
- Giunti al tallone infilare con cautela i pollici per allargare leggermente la calza e sfilare gradualmente

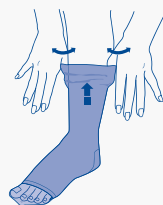

INDICAZIONI PER IL LAVAGGIO



- capovolgere la calza
- a mano o in lavatrice
- lavaggi in acqua con temperatura non superiore a 40°C e centrifuga ridotta
- non candeggiare
- non asciugare in asciugatrici automatiche e/o al sole
- tenere lontano da fonti di calore
- stendere la calza orizzontalmente
- non stirare, nemmeno a vapore
- non lavare a secco e non far uso di smacchiatori a base di solventi

FILATI IMPIEGATI



COTONE

Fibra naturale. Il tessuto risulta più fresco e dotato di migliori proprietà antistatiche. Rispetto alle fibre sintetiche, ha maggiori proprietà di assorbimento del sudore.



SETA

Fibra naturale, dona eleganza e morbidezza al tutore. Proprietà termoregolatrice.



TRAMA PIATTA

Tutore con elevata pressione a lavoro e minima pressione a riposo. Questa tipologia di trama viene utilizzata prevalentemente nel trattamento di patologie linfatiche.



TRAMA CIRCOLARE

Tutore con elevata pressione a riposo e minima pressione a lavoro. Questa tipologia di trama viene utilizzata prevalentemente nel trattamento di patologie venose.



PUNTA RIMAGLIATA

Il processo di rimagliatura, maglia a maglia, eliminando fastidiose cuciture sulla punta del piede, dona massimo comfort al paziente.

QUICKFEET®

Specifico metodo di fabbricazione che permette un allentamento della tensione a livello del passaggio del piede. QuickFeet® facilita l'indosso di gambaletti, calze e collant.

QUALITÀ DEI TUTORI ELASTICI



PIEDE COMFORT

Tallone anatomico disegnato appositamente per facilitare l'indosso della calza.



AMPIA GAMMA

Elevato numero di tagli disponibili nella versione Standard, per garantire la possibilità di indosso anche sugli arti affetti da patologie più gravi.



AMPIA GAMMA



SILICONE MEDICALE ANALLERGICO

Il silicone non è sottoposto a trattamenti chimici ed è privo di stagno.



SILICONE MEDICALE ANALLERGICO



TUTORI STANDARD

Prodotti confezionati secondo le circonferenze e le lunghezze delle tabelle di vestibilità.



TUTORI SU MISURA

Prodotti confezionati secondo le circonferenze e le lunghezze rilevate sull'arto del paziente.



TUTORI SU MISURA



TRASPIRABILITÀ

La qualità dei materiali utilizzati consente una migliore traspirazione della cute e un'ottimale termoregolazione.



DELICATEZZA

Il cotone a contatto con la pelle garantisce delicatezza e morbidezza.



RESISTENZA

Prodotti altamente resistenti grazie alla qualità dei materiali e alla tecnologia utilizzate in fase di produzione.



INDICE

LINEA FLEBOLOGICA 13



CLASSIFICAZIONE CEAP.....	14
VARISAN® TOP Calze compressive medicali.....	16
VARISAN® FASHION Calze compressive medicali.....	18
VARISAN FASHION FOR MAN Gambaletto per uomo.....	20
VARISAN® ETHERÉ Calze preventive certificate.....	22
VARISAN® SOFT Calze preventive certificate.....	24
VARISAN® LUI&LEI Gambaletti preventivi certificati.....	26
VARISAN® PASSO Gambaletti preventivi certificati, senza cuciture.....	28
VARISAN® LUI Gambaletti uomo.....	30
VIVA Calze riposanti 40 den.....	32
70 den.....	34
140 den.....	36

LINEA HOSPITAL 39



VARISAN® A.T.E.® Calze antitromboemboliche 18 mmHg Punta ispezionabile.....	40
VARISAN® RECOVER24 Calze post-operatorie 24 mmHg Punta aperta.....	42
VARISAN® RECOVER35 Calze post-operatorie 35 mmHg Punta aperta.....	44
VARISAN® DLS KIT Kit calza antitrombo+calza compressiva medicale.....	46
VARISAN® ULCER-KIT Kit gambaletto con cerniera per ulcera venosa.....	48
VEINALGIC®.....	50

LINEA LINFOLOGICA 53



VARISAN® FLAT Bracciale e guanto terapeutico trama piatta Standard.....	54
Su misura.....	56
VARISAN® FIBERLUX® Bracciale e guanto terapeutico trilobato in trama piatta Standard.....	58
Su misura.....	60
VARISAN® TOP Bracciale terapeutico trama circolare Standard.....	62
Su misura.....	64
Guanto standard.....	66
SWEETCOMPRESS® Autobendaggio indicato per la terapia dell'edema Arto superiore standard.....	68
Arto superiore su misura.....	70
VARISAN® FLAT Calze compressive medicali trama piatta Standard.....	72
Su misura.....	74
VARISAN® FLAT KIDS Tutori arto inferiore su misura.....	76
SWEETCOMPRESS® Autobendaggio indicato per la terapia dell'edema Arto inferiore standard.....	78
Arto inferiore su misura.....	80
PRESE MISURA Arto superiore.....	82
Mano.....	83
Arto inferiore.....	84
Piede.....	86
Opzioni.....	87
SCHEDE SU MISURA Guanto compressivo.....	88
Bracciale e guanto compressivo.....	89
Calza a compressione decescente.....	90
Calotte per dita dei piedi.....	91
LINFOROLL®.....	94

LINEA LIPEDEMA 97



LIPOCARE® LIGHT.....	98
LIPOCARE® STRONG.....	100

LINEA BENDAGGI 103



CIZETA PRESS® Bende ADESIVE e CEROTTI.....	104
Bende COESIVE.....	104
Bende SALVAPELLE FOAM e PAD TRASPIRANTE.....	104
Bende COMPRESSIVE.....	105
Bende MEDICATE.....	106
Maglie TUBOLARI.....	106
Bende IDEAL.....	106

INTEGRATORI & CREME 109



DIOSMIR® 500/1000.....	110
NEVAFIN®.....	110
LIVEDREN®.....	111

LINEA ORTOPEDICA 113



LINEA PRODOTTI.....	114
---------------------	-----

LINEA SPORT 117



COMPRESSION ZONE® Calzino Performance.....	119
Calza Performance.....	119
Polpaccio Performance.....	119
Bracciale Performance.....	120
Cosciale Performance & Recover.....	120
Gambale Performance.....	120
Calza Recover.....	121
Gambale Recover.....	121

ACCESSORI 123



Guanto con dots in gomma.....	124
Guanto in cotone.....	124
VARISLIDE® Introduttore.....	125
VARITEC® Infilcalze.....	125
Infilcalze PVC.....	126
CIZETA MASK®.....	126



La mancata continenza valvolare o l'ostruzione trombotica generano nei vasi venosi uno stato di ipertensione che, soprattutto in ortostatismo, si ripercuote negli arti inferiori raggiungendo anche le diramazioni del microcircolo.

La terapia ideale per contrastare l'insufficienza venosa deve tendere a ridurre il più possibile lo stato di ipertensione venosa per evitare stasi ematiche con conseguenti edemi.

LINEA FLEBOLOGICA



L'elastocompressione rimane il provvedimento terapeutico più noto, sperimentato, efficace e facilmente adattabile alle diverse espressioni di patologia venosa di cui disponiamo. È comunque l'unico in grado di agire controbilanciando costantemente quello stato di ipertensione venosa che è alla base del danno ai tessuti.

CLASSIFICAZIONE CEAP

Il sistema di classificazione CEAP è volto a standardizzare la classificazione e il trattamento delle malattie venose. I fondamenti includono la descrizione della:

- C= situazione clinica
- E= eziologia
- A= sede anatomica
- P= fisiopatologia

In funzione della stadiazione della patologia si sceglie la classe di compressione più adeguata.

CLASSE 1 (18-21 mmHg)

- Gambe stanche tendenti al gonfiore
- Profilassi trombotici da viaggio
- Lievi varicosi senza edemi e durante la gravidanza
- Profilassi embolie per pazienti allattati

CLASSE 2 (23-32 mmHg)








- Varicosi con tendenza all'edema
- Trombosi della vena profonda della gamba
- Dopo il trattamento delle varici
- Tromboflebite superficiale
- Forte varicosi in gravidanza
- Post cicatrizzazione di ulcera venosa se presente insufficienza venosa cronica








CLASSE 3 (34-46 mmHg)

- Angiodisplasia
- Insufficienza venosa cronica avanzata
- Ulcus cruris attiva o recidivante
- Sindrome post traumatica

CLASSE 4 (> 49 mmHg)

- Acuta sindrome post flebitica

Classificazione CEAP		
Diagnosi		
Scopo della compressione		
VARISAN® TOP 	Ccl. 1	18-21 mmHg
	Ccl. 2	23-32 mmHg
	Ccl. 3	34-46 mmHg
VARISAN® FASHION 	Ccl. 1	18-21 mmHg
	Ccl. 2	23-32 mmHg
VARISAN® FASHION FOR MAN 	Ccl. 1	18-21 mmHg
	Ccl. 2	23-32 mmHg
VARISAN® ETHERÉ 		10-15 mmHg
		15-20 mmHg
VARISAN® SOFT 		15-20 mmHg
VARISAN® LUI & LEI 		10-15 mmHg
		15-20 mmHg
VARISAN® PASSO 		15-20 mmHg
viva		12 mmHg 70 DEN
		18 mmHg 140 DEN

C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
						
<i>Nessun segno evidente di malattie venose, gambe pesanti, formicolio</i>	<i>Teleangiectasia o capillari, vene varicose reticolari $\varnothing < 3\text{ mm}$</i>	<i>Vene varicose o capillari $\varnothing > 3\text{ mm}$</i>	<i>Edema</i>	<i>Turbe trofiche di origine venosa</i>	<i>Ulcera venosa chiusa</i>	<i>Ulcera attiva</i>
<i>Prevenzione del gonfiore, gambe pesanti, dolore</i>	<i>Prevenzione del gonfiore, gambe pesanti, dolore</i>	<i>Prevenzione del gonfiore, gambe pesanti, dolore</i>	<i>Riduzione dell'edema</i>	<i>Prevenzione delle ulcere</i>	<i>Prevenzione delle recidive</i>	<i>Guarigione dell'ulcera, sollievo dal dolore</i>
●	●	●				
	●	●	●	●	●	
		●	●	●	●	●
●	●	●				
	●	●	●	●	●	
●	●	●				
	●	●	●	●	●	
●						
●	●					
●	●					
●						
●	●					
●						
●						

Indicazioni secondo le Linee Guida del Collegio Italiano di Flebologia del 2013.
 Importante: la prescrizione del segmento e della classe di compressione spetta sempre al medico curante.


VARISAN® TOP

Linea flebologica
Calze compressive medicali



CIRCONFERENZA (cm)											
Taglia		1		2		3		4		5	
		NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS
Coscia	G	50-55	53-58	53-58	56-61	56-61	60-66	60-66	64-70	64-70	70-77
Polpaccio	C	31-34	34-37	34-37	37-40	37-40	40-44	40-44	44-48	44-48	48-52
Caviglia	B	19-20		21-23		23-25		25-27		28-30	

LUNGHEZZA (cm)			
		Corto	Normale
Gambaletto	AD	36 - 41	42 - 48
Calza	AG	66 - 73	74 - 82

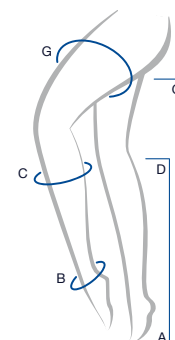

CLASSE DI COMPRESSIONE				
REF.	18 - 21 mmHg	23 - 32 mmHg	34 - 46 mmHg	ARTICOLO
punta chiusa	623E1	624E1		Gambaletto (AD) corto
	623N1	624N1		Gambaletto (AD) normale
	C23E1	C24E1		Gambaletto (AD) corto
	C23N1	C24N1		Gambaletto (AD) normale
punta aperta	6A3E1	6A4E1	6A5E1	Gambaletto (AD) corto
	6A3N1	6A4N1	6A5N1	Gambaletto (AD) normale
	CA3E1	CA4E1		Gambaletto (AD) corto
	CA3N1	CA4N1		Gambaletto (AD) normale
punta chiusa	623E19	624E19		Gambaletto autoreggente (ADH) corto
	623N19	624N19		Gambaletto autoreggente (ADH) normale
punta aperta	6A3E19	6A4E19		Gambaletto autoreggente (ADH) corto
	6A3N19	6A4N19		Gambaletto autoreggente (ADH) normale
punta chiusa	623E4	624E4		Calza (AG) corto
	623N4	624N4		Calza (AG) normale
	C23E4	C24E4		Calza (AG) corto
	C23N4	C24N4		Calza (AG) normale
punta aperta	6A3E4	6A4E4	6A5E4	Calza (AG) corto
	6A3N4	6A4N4	6A5N4	Calza (AG) normale
	CA3E4	CA4E4		Calza (AG) corto
	CA3N4	CA4N4		Calza (AG) normale
punta chiusa	623E9	624E9	625E9	Calza autoreggente (AGH) corto
	623N9	624N9	625N9	Calza autoreggente (AGH) normale
	C23E9	C24E9		Calza autoreggente (AGH) corto
	C23N9	C24N9		Calza autoreggente (AGH) normale
punta aperta	6A3E9	6A4E9	6A5E9	Calza autoreggente (AGH) corto
	6A3N9	6A4N9	6A5N9	Calza autoreggente (AGH) normale
	CA3E9	CA4E9		Calza autoreggente (AGH) corto
	CA3N9	CA4N9		Calza autoreggente (AGH) normale
punta chiusa	623E2	624E2		Monocollant dx (AGTR) corto
	623N2	624N2		Monocollant dx (AGTR) normale
	623E3	624E3		Monocollant sx (AGTL) corto
	623N3	624N3		Monocollant sx (AGTL) normale

CLASSE DI COMPRESSIONE				
REF.	18 - 21 mmHg	23 - 32 mmHg	34 - 46 mmHg	ARTICOLO
punta chiusa	C23E2	C24E2		Monocollant dx (AGTR) corto
	C23N2	C24N2		Monocollant dx (AGTR) normale
	C23E3	C24E3		Monocollant sx (AGTL) corto
	C23N3	C24N3		Monocollant sx (AGTL) normale
punta aperta	6A3E2	6A4E2	6A5E2	Monocollant dx (AGTR) corto
	6A3N2	6A4N2	6A5N2	Monocollant dx (AGTR) normale
	6A3E3	6A4E3	6A5E3	Monocollant sx (AGTL) corto
	6A3N3	6A4N3	6A5N3	Monocollant sx (AGTL) normale
punta chiusa	CA3E2	CA4E2		Monocollant dx (AGTR) corto
	CA3N2	CA4N2		Monocollant dx (AGTR) normale
	CA3E3	CA4E3		Monocollant sx (AGTL) corto
	CA3N3	CA4N3		Monocollant sx (AGTL) normale
punta chiusa	6235E	6245E	6255E	Collant (AT) corto
	6235N	6245N	6255N	Collant (AT) normale
	C23E5	C24E5		Collant (AT) corto
	C23N5	C24N5		Collant (AT) normale
punta aperta	6A3E5	6A4E5	6A5E5	Collant (AT) corto
	6A3N5	6A4N5	6A5N5	Collant (AT) normale
	CA3E5	CA4E5		Collant (AT) corto
	CA3N5	CA4N5		Collant (AT) normale
punta chiusa	6236E	6246E		Collant uomo (AT) corto
	6236N	6246N		Collant uomo (AT) normale
	C23E6	C24E6		Collant uomo (AT) corto
	C23N6	C24N6		Collant uomo (AT) normale
punta aperta	6A3E6	6A4E6		Collant uomo (AT) corto
	6A3N6	6A4N6		Collant uomo (AT) normale
	CA3E6	CA4E6		Collant uomo (AT) corto
	CA3N6	CA4N6		Collant uomo (AT) normale
punta chiusa	623GE	624GE		Collant gestante (ATU) corto
	623GN	624GN		Collant gestante (ATU) normale
	C23GE	C24GE		Collant gestante (ATU) corto
	C23GN	C24GN		Collant gestante (ATU) normale
punta aperta	6A3GE	6A4GE		Collant gestante (ATU) corto
	6A3GN	6A4GN		Collant gestante (ATU) normale
	CA3GE	CA4GE		Collant gestante (ATU) corto
	CA3GN	CA4GN		Collant gestante (ATU) normale

Prodotti con cotone a contatto con la pelle



VARISAN® TOP

Linea flebologica
Calze compressive medicali



La linea VARISAN® TOP, certificata RAL, è capace di rispondere ai bisogni terapeutici dei pazienti più esigenti grazie al suo ampio assortimento di referenze e all'ampia vestibilità (5 taglie standard e 5 taglie plus, in due lunghezze).

CARATTERISTICHE

Il prodotto è molto gradevole perchè realizzato con un filato multibava che dona alla calza una grande morbidezza e traspirabilità, facilitandone anche la vestibilità. Referenze disponibili anche con cotone a contatto con la pelle. Tutti gli articoli di questa linea vengono **prodotti anche su misura**.

INDICAZIONI

I CLASSE (18 - 21 mmHg) standard e su misura

Varici, anche durante e dopo la gravidanza, edemi venosi iniziali, vene reticolari.

II CLASSE (23 - 32 mmHg) standard e su misura

Trombosi venosa superficiale, trombosi venosa profonda in forma acuta, linfedemi stadio 1, prevenzione della sindrome post-trombotica.

III CLASSE (34 - 46 mmHg) standard e su misura

Insufficienza valvolare delle vene profonde, prevenzione della recidiva di ulcera, linfedemi stadio 1, sindrome post-trombotica con grave sofferenza dei tessuti cutanei.

CONTROINDICAZIONI

Dermoipodermi in forma acuta, infezioni cutanee, arteriopatia obliterante periferica, nota allergia da contatto a tutori elastici.

COMPOSIZIONE

Ccl. 1: poliammide 75%, elastan 25%.

Cotone: poliammide 58%, cotone 24%, elastan 18%.

Ccl. 2: poliammide 70%, elastan 30%.

Cotone: poliammide 48%, cotone 27%, elastan 25%.


Ccl. 3: poliammide 65%, elastan 35%.

COMPRESSIONE

Ccl. 1 18-21 mmHg

Ccl. 2 23-32 mmHg

Ccl. 3 34-46 mmHg

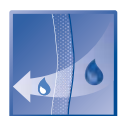

TRASPIRABILITÀ



PIEDE COMFORT



AMPIA GAMMA



SILICONE MEDICALE
ANALLERGICO



COLORI

739 beige



862 nero



VARISAN® FASHION


Linea flebologica
Calze compressive medicali



CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia		1	2	3	4	5
Coscia	G	49 - 56	54 - 62	59 - 67	64 - 74	72 - 82
Polpaccio	C	29 - 35	33 - 40	38 - 45	42 - 48	46 - 52
Caviglia	B	19 - 21	22 - 24	25 - 27	28 - 30	31 - 34

LUNGHEZZA (cm)			
		Corto	Normale
Gambaletto	AD	36 - 41	42 - 48
Calza	AG	66 - 73	74 - 82

CLASSE DI COMPRESIONE				
REF.	18 - 21 mmHg	23 - 32 mmHg	ARTICOLO	COLORI
punta chiusa	F23E1	F24E1	Gambaletto (AD) corto	620 862
	F23N1	F24N1	Gambaletto (AD) normale	
punta aperta	FA3E1	FA4E1	Gambaletto (AD) corto	620 862
	FA3N1	FA4N1	Gambaletto (AD) normale	
punta chiusa	F23E19	F24E19	Gambaletto autoreggente (ADH) corto	620 862
	F23N19	F24N19	Gambaletto autoreggente (ADH) normale	
punta aperta	FA3E19	FA4E19	Gambaletto autoreggente (ADH) corto	620 862
	FA3N19	FA4N19	Gambaletto autoreggente (ADH) normale	
punta chiusa	F23E9	F24E9	Calza autoreggente (AGH) balza standard corto	620 862
	F23N9	F24N9	Calza autoreggente (AGH) balza standard normale	
	F23E7	F24E7	Calza autoreggente (AGH) balza fantasia corto	
	F23N7	F24N7	Calza autoreggente (AGH) balza fantasia normale	
punta aperta	FA3E9	FA4E9	Calza autoreggente (AGH) balza standard corto	620 862
	FA3N9	FA4N9	Calza autoreggente (AGH) balza standard normale	
	FA3E7	FA4E7	Calza autoreggente (AGH) balza fantasia corto	
	FA3N7	FA4N7	Calza autoreggente (AGH) balza fantasia normale	
punta chiusa	F23E5	F24E5	Collant (AT) corto	620 862
	F23N5	F24N5	Collant (AT) normale	
punta aperta	FA3E5	FA4E5	Collant (AT) corto	620 862
	FA3N5	FA4N5	Collant (AT) normale	
punta chiusa	F23GE		Collant gestante (ATU) corto	620 862
	F23GN		Collant gestante (ATU) normale	

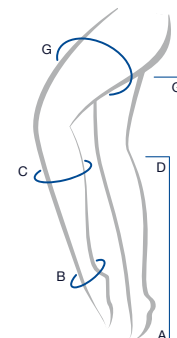

Balza fantasia



Balza standard



VARISAN® FASHION

Linea flebologica
Calze compressive medicali



La massima performance terapeutica, certificata RAL, abbinata a morbidezza e trasparenza. Questo tipo di calza è dedicato ad un target prettamente femminile, attento ai dettagli moda e alla ricerca di un prodotto non solo terapeutico ma anche elegante.

CARATTERISTICHE

La linea VARISAN® FASHION è realizzata in 5 taglie e 2 lunghezze. Il prodotto è molto gradevole in quanto realizzato con un filato in microfibra che dona alla calza morbidezza e traspirabilità, facilitandone anche l'indosso. Il nuovo bordo autoreggente è rivestito da una striscia continua di silicone tri-componente che ricopre il 75% della superficie e assicura un miglior sostegno della calza sulla gamba, evitando il suo scivolamento. L'assenza di stagno tra i suoi componenti migliora la sua tolleranza cutanea.

INDICAZIONI

I CLASSE (18 - 21 mmHg)

Varici, varici durante e dopo la gravidanza, edemi venosi iniziali, vene reticolari.

II CLASSE (23 - 32 mmHg)

Trombosi venosa superficiale, trombosi venosa profonda in forma acuta, prevenzione della sindrome post-trombotica.

CONTROINDICAZIONI

Dermoipodermi in forma acuta, infezioni cutanee, arteriopatia obliterante periferica, nota allergia da contatto a tutori elastici.

COMPOSIZIONE

Ccl. 1: poliammide 60%, elastan 40%.

Ccl. 2: poliammide 55%, elastan 45%.



COMPRESSIONE

Ccl. 1 18-21 mmHg

Ccl. 2 23-32 mmHg



COLORI

620 lama



862 nero



VARISAN® FASHION FOR MAN

Linea flebologica
Gambaletto per uomo




TRAMA CIRCOLARE



TUTORI STANDARD

CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia		1	2	3	4	5
Polpaccio	C	29 - 35	33 - 40	38 - 45	42 - 48	46 - 52
Caviglia	B	19 - 21	22 - 24	25 - 27	28 - 30	31 - 34

LUNGHEZZA (cm)			
		Corto	Normale
Gambaletto	AD	36 - 41	42 - 48

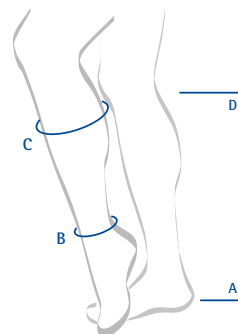

CLASSE DI COMPRESSIONE				
REF.	18 - 21 mmHg	23 - 32 mmHg	ARTICOLO	COLORI
punta chiusa 	F23E8	F24E8	Gambaletto (AD) corto	561 862
	F23N8	F24N8	Gambaletto (AD) normale	

Prodotti con cotone a contatto con la pelle



VARISAN® FASHION FOR MAN

Linea flebologica
Gambaletto per uomo



VARISAN® FASHION FOR MAN è la calza indicata per l'uomo che ricerca l'efficacia terapeutica di un prodotto medicale certificato, senza rinunciare ad eleganza e comfort.

La calza, grazie alle coste molto fini e ai colori classici, è adatta per essere indossata sia nelle occasioni formali che durante il tempo libero. L'uso del prodotto è particolarmente indicato durante i viaggi, dove la prolungata immobilità non facilita la circolazione venosa.

CARATTERISTICHE

- Il gambaletto VARISAN® FASHION FOR MAN è certificato RAL e disponibile in 5 taglie e 2 lunghezze
- Il filato di maglia in microfibra conferisce alla calza un'eccellente traspirabilità e morbidezza
- Il cotone a contatto con la pelle rende il prodotto adatto anche alle pelli più sensibili

INDICAZIONI

I CLASSE (18 - 21 mmHg)

Varici, edemi venosi iniziali, vene reticolari.

II CLASSE (23 - 32 mmHg)

Trombosi venosa superficiale, trombosi venosa profonda in forma acuta, linfedemi, prevenzione della sindrome post-trombotica.

CONTROINDICAZIONI

Dermoipodermi in forma acuta, infezioni cutanee, arteriopatia obliterante periferica, nota allergia da contatto a tutori elastici.

COMPOSIZIONE

Ccl. 1: poliammide 62%, elastan 17%, cotone 21%.

Ccl. 2: poliammide 65%, elastan 16%, cotone 19%.



TRASPIRABILITÀ



PIEDE COMFORT

COMPRESSIONE

Ccl. 1 18-21 mmHg

Ccl. 2 23-32 mmHg



COLORI

561 blu



862 nero



VARISAN® ETHERÉ

Linea flebologica
Calze preventive certificate




CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia	1	2	3	4	5	
Coscia	ⓐ	50 - 56	53 - 59	56 - 62	59 - 65	62 - 70
Polpaccio	ⓒ	29 - 32	32 - 36	36 - 40	40 - 44	43 - 48
Caviglia	ⓑ	18 - 20	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 32

LUNGHEZZA (cm)			
		Corto	Normale
Gambaletto	ⒶⒹ	≤ 37	> 37
Calza	ⒶⒺ	≤ 74	> 74

CLASSE DI COMPRESSIONE				COLORI	
REF.	10 - 15 mmHg	15 - 20 mmHg	ARTICOLO	10 - 15 mmHg	15 - 20 mmHg
 punta chiusa	61E01	62E01	Gambaletto (AD) corto	160 862	120 160 180 582 862
	61N01	62N01	Gambaletto (AD) normale		
 punta aperta	A1E01	A2E01	Gambaletto (AD) corto	160 862	120 160 180 862
	A1N01	A2N01	Gambaletto (AD) normale		
 punta chiusa	61E09	62E09	Calza autoreggente (AGH) corto	160 862	120 160 180 582 862
	61N09	62N09	Calza autoreggente (AGH) normale		
 punta aperta	A1E09	A2E09	Calza autoreggente (AGH) corto	160 862	120 160 180 862
	A1N09	A2N09	Calza autoreggente (AGH) normale		
 punta chiusa	61E51	62E51	Collant (AT) corto	160 862	120 160 180 582* 862
	61N51	62N51	Collant (AT) normale		
 punta aperta	A1E51	A2E51	Collant (AT) corto	160 862	120 160 180 862
	A1N51	A2N51	Collant (AT) normale		
 punta chiusa		62E5G	Collant gestante (ATU) corto		160 862
		62N5G	Collant gestante (ATU) normale		

*Colore 582 marine non disponibile in TAGLIA 5

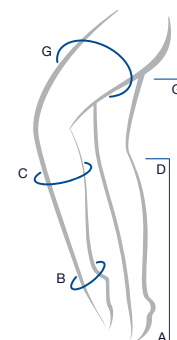

VARISAN® ETHERÉ

Linea flebologica
Calze preventive certificate



VARISAN® ETHERÉ è la calza compressiva preventiva semitrasparente d'alta gamma, indicata per la donna che ricerca un prodotto elegante, comodo e resistente, costruito con tecnologia medica certificata.

L'attenzione ai dettagli e l'alta qualità dei filati rendono il prodotto più morbido e resistente rispetto alle calze preventive tradizionali, garantendo nel tempo il mantenimento della giusta compressione. La trasparenza discreta del tessuto rende VARISAN® ETHERÉ adatta ad ogni occasione.

CARATTERISTICHE

- VARISAN® ETHERÉ è certificata ASQUAL e disponibile in 5 colori moda
- Le cuciture piatte e rinforzate, permettono al tessuto di adattarsi perfettamente al corpo
- Riduce la sensazione di stanchezza delle gambe, favorendo il ritorno venoso al cuore
- Disponibile anche in punta aperta
- Facile da indossare

INDICAZIONI

10 - 15 mmHg

Prevenzione dell'edema da prolungata stazione eretta.

15 - 20 mmHg

Sintomi lievi di insufficienza venosa di tipo funzionale, varici, ectasie. Prevenzione durante e dopo la gravidanza.

CONTROINDICAZIONI

Dermoipodermiti in forma acuta, infezioni cutanee, arteriopatia obliterante periferica, nota allergia da contatto a tutori elastici.

COMPOSIZIONE

10-15 mmHg: poliammide 68%, elastan 32%.

15-20 mmHg: poliammide 68%, elastan 32%.



TRASPIRABILITÀ



PIEDE COMFORT



SILICONE MEDICALE
ANALLERGICO

QUICKFEET®

COMPRESSIONE

10-15 mmHg

15-20 mmHg



COLORI

120 cipria



160 poudré



180 nacré



582 marine



862 nero



VARISAN® SOFT


Linea flebologica
Calze preventive certificate



CIRCONFERENZA (cm)					
Taglia	1	2	3	4	5
Coscia	G 50 - 56	53 - 59	56 - 62	59 - 65	62 - 70
Polpaccio	C 29 - 32	32 - 36	36 - 40	40 - 44	43 - 48
Caviglia	B 18 - 20	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 32

LUNGHEZZA (cm)			
		Corto	Normale
Gambaletto	AD	≤ 37	> 37
Calza	AG	≤ 74	> 74

CLASSE DI COMPRESIONE			
REF.	15 - 20 mmHg	ARTICOLO	COLORI
punta chiusa 	MF4E1	Gambaletto (AD) corto	750 862
	MF4N1	Gambaletto (AD) normale	
punta chiusa 	MFE49	Calza autoreggente (AGH) corto	750 862
	MFN49	Calza autoreggente (AGH) normale	
punta chiusa 	MF4E5	Collant (AT) corto	750 862
	MF4N5	Collant (AT) normale	

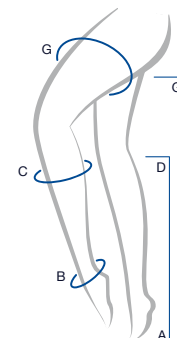

VARISAN® SOFT

*Linea flebologica
Calze preventive certificate*



VARISAN® SOFT è la calza compressiva preventiva coprente, indicata per la donna che soffre di disturbi lievi e ricerca un prodotto facile da indossare, morbido e resistente, costruito con tecnologia medica certificata. L'alta qualità dei filati utilizzati garantisce nel tempo il mantenimento della giusta compressione. L'effetto coprente sulla gamba rende VARISAN® SOFT adatto alla prevenzione quotidiana.

CARATTERISTICHE

- VARISAN® SOFT è certificata ASQUAL e disponibile in 2 colori moda
- Vestibilità perfetta, maglia sottile e cuciture rinforzate
- Riduce la sensazione di stanchezza delle gambe, favorendo il ritorno venoso al cuore
- La qualità del filato in multifibra assicura morbidezza al tatto, leggerezza sulla pelle e ottima traspirabilità
- Facile da indossare

INDICAZIONI

Sintomi lievi di insufficienza venosa di tipo funzionale, varici reticolari, ectasie. Prevenzione durante e dopo la gravidanza.

CONTROINDICAZIONI

Dermoipodermi in forma acuta, infezioni cutanee, arteriopatia obliterante periferica, nota allergia da contatto a tutori elastici.

COMPOSIZIONE

Poliammide 70%, elasthan 30%.



TRASPIRABILITÀ



PIEDE COMFORT



SILICONE MEDICALE
ANALLERGICO

COMPRESSIONE

15-20 mmHg



COLORI

750 chiaro



862 nero




VARISAN[®] LUI & LEI

Linea flebologica
Gambaletti preventivi certificati uomo/donna



CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia		1	2	3	4	5
Polpaccio	C	30 - 36	34 - 40	38 - 44	42 - 48	46 - 52
Caviglia	B	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30	30 - 33

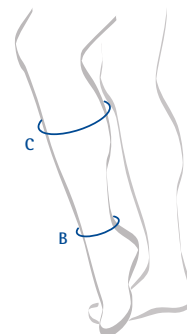

CLASSE DI COMPRESSIONE				
REF.	10 - 15 mmHg	15 - 20 mmHg	ARTICOLO	COLORI
	61090	63090	Gambaletto (AD) sintetico	561 862
	61088		Gambaletto (AD) cotone	461 561 856 862
		63088	Gambaletto (AD) cotone	161 461 561 856 862
		ST088	Gambaletto (AD) seta	561 856

Prodotti con cotone a contatto con la pelle



Prodotti con seta a contatto con la pelle



VARISAN[®] LUI & LEI

*Linea flebologica
Gambaletti preventivi certificati uomo/donna*



Linea preventiva unisex dedicata a chi soffre di disturbi circolatori lievi o di patologie allo stadio iniziale. Il prodotto si rivolge ad un pubblico attento non solo alla prevenzione ma anche al comfort e all'eleganza.

CARATTERISTICHE

Altamente traspirante, è disponibile in due livelli di compressione e tre tipi di filato a contatto con la pelle: seta, cotone, sintetico. Certificato ASQUAL. Disponibile in più colori.

INDICAZIONI

10 - 15 mmHg

Prevenzione dell'edema da prolungata stazione eretta.

15 - 20 mmHg

Teleangectasie, varici con diametro inferiore ai 3 mm, viaggi aerei.

CONTROINDICAZIONI

Dermoipodermi in forma acuta, infezioni cutanee, arteriopatia obliterante in fase avanzata, edema di origine non venosa, nota allergia da contatto a tutori elastici.

COMPOSIZIONE

10-15 mmHg: poliammide 68%, elastan 32%.

Cotone: cotone 40%, poliammide 38%, elastan 22%.

15-20 mmHg: poliammide 68%, elastan 32%.

Cotone: cotone 40%, poliammide 38%, elastan 22%.

Seta: poliammide 55%, seta 23,5%, elastan 21,5%.



QUICKFEET[®]

COMPRESSIONE

10-15 mmHg

15-20 mmHg



COLORI

161 bianco



461 bordeaux



561 blu



856 grigio



862 nero



VARISAN[®] PASSO


Linea flebologica

Gambaletti preventivi certificati, senza cuciture





CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia		1	2	3	4	5
Polpaccio	C	30 - 36	34 - 40	38 - 44	42 - 48	46 - 52
Caviglia	B	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30	30 - 33

LUNGHEZZA (cm)			
		Corto	Normale
Gambaletto	AD	≤ 40	> 40

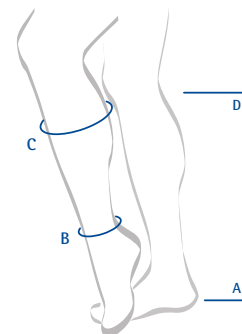

CLASSE DI COMPRESSIONE			
REF.	15 - 20 mmHg	ARTICOLO	COLORI
	STCR1	Gambaletto seta/cotone (AD) corto	102
			430
			565
	STNR1	Gambaletto seta/cotone (AD) normale	760
			855
			862

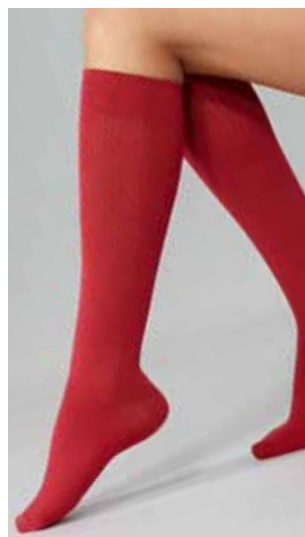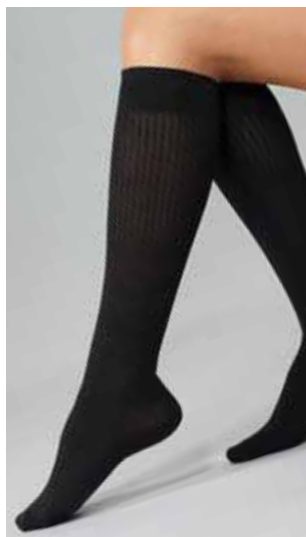

VARISAN® PASSO

Linea flebologica

Gambaletti preventivi certificati, senza cuciture



Gambaletto preventivo certificato, 15-20 mmHg, che risponde alle esigenze di stile e di comfort dell'uomo e della donna moderni. Con una gamma di colori che segue le tendenze moda, è ideale per chi ricerca un prodotto preventivo che possa abbinarsi all'abbigliamento di tutti i giorni, elegante o sportivo.

CARATTERISTICHE

Gambaletto senza cuciture grazie ad un innovativo processo di rimagliatura, R2M, cucitura maglia a maglia, che garantisce un comfort ideale, specialmente in punta. Realizzato con filato ricoperto in seta a contatto con la pelle per un'azione termoregolatrice e maggiore comfort. La microfibra e il cotone garantiscono un'elevata traspirazione.

INDICAZIONI

- Teleangectasie
- Varici con diametro inferiore ai 3 mm
- Viaggi aerei

CONTROINDICAZIONI

Dermoipodermi in forma acuta, infezioni cutanee, arteriopatia obliterante in fase avanzata, edema di origine non venosa, nota allergia da contatto a tutori elastici.

COMPOSIZIONE

Poliammide 46%, cotone 32%, elastan 14%, seta 8%.



QUICKFEET®

COMPRESSIONE

15-20 mmHg



COLORI

102 giallo



430 rosso



565 blu



760 marrone



855 grigio



862 nero
chiné



VARISAN[®] LUI

Linea flebologica
Gambaletti uomo



TRAMA CIRCOLARE



TUTORI STANDARD

Taglia	1	2	3	4	5
Scarpa	38 - 40	40 - 41	41 - 42	42 - 44	44 - 46
	6 - 7½	7½ - 8	8 - 8½	8½ - 10½	10½ - 12½



CLASSE DI COMPRESSIONE			
REF.	18 mmHg	ARTICOLO	COLORI
	63085	Gambaletto	561
			861
	63086	Gambaletto cotone	862
			561
			861
			862

Prodotti con cotone a contatto con la pelle



VARISAN® LUI

Linea flebologica
Gambaletti uomo



Linea preventiva uomo dedicata a chi soffre di disturbi circolatori lievi o patologie allo stadio iniziale, e ricerca un gambaletto comodo ed elegante.

CARATTERISTICHE

La linea uomo VARISAN® LUI è sviluppata in 5 taglie. Disponibile in 3 colori anche con cotone a contatto con la pelle, senza bordo rinforzato all'altezza del ginocchio.

INDICAZIONI

18 mmHg

Teleangectasie, varici con diametro inferiore ai 3 mm, post-scleroterapia, post trattamento chirurgico, viaggi aerei.

CONTROINDICAZIONI

Dermoipodermi in forma acuta, infezioni cutanee, arteriopatia obliterante in fase avanzata, edema di origine non venosa, nota allergia da contatto a tutori elastici.

COMPOSIZIONE

Poliamide 80%, elasthan 20%.

Cotone: poliammide 59%, cotone 28%, elasthan 13%.



TRASPIRABILITÀ



PIEDE COMFORT

COMPRESSIONE

18 mmHg



STANDARD
100
074156.0
CENTROCOT

COLORI

561 blu



861 fumé



862 nero






VIVA 40 den

Linea riposante

Taglia	Peso kg														
	40 42	43 45	46 48	49 51	52 54	55 57	58 60	61 63	64 66	67 69	70 72	73 75	76 78	79 81	82 90
Altezza cm	< 150														
	150-152														
	153-155														
	156-158														
	159-161														
	162-164														
	165-167														
	168-170														
	171-173														
	174-176														
	177-179														
	> 180														



CLASSE DI COMPRESIONE				
REF.	6 mmHg	ARTICOLO	TAGLIE	COLORI
punta chiusa 	34040	Gambaletto maglia liscia	1 - 2 - 3 - 4 - 5	132 763 862
punta chiusa 	34049	Calza autoreggente maglia liscia	1 - 2 - 3 - 4 - 5	132 763 862
punta chiusa 	34035	Collant maglia liscia	1 - 2 - 3 - 4 - 5	113 132 763 862

VIVA 40 den

Linea riposante



CARATTERISTICHE

Linea completa di calze riposanti a compressione decrescente, morbide e trasparenti, a maglia liscia. Alleviano pesantezza, gonfiore e stanchezza, donano un effetto tonificante e snellente a tutta la gamba.

INDICAZIONI

6 mmHg

Indicate in caso di gambe pesanti e senso di fatica.

CONTROINDICAZIONI

Dermoipodermi in forma acuta, infezioni cutanee, nota allergia da contatto a tutori elastici.

COMPOSIZIONE

Poliammide, elasthan.



COMPRESSIONE

6 mmHg



COLORI

113 cipria

132 chiaro

763 visone

862 nero



VIVA 70 den

Linea riposante

Taglia	Peso kg														
	40 42	43 45	46 48	49 51	52 54	55 57	58 60	61 63	64 66	67 69	70 72	73 75	76 78	79 81	82 90
Altezza cm	< 150														
	150-152														
	153-155														
	156-158		1												
	159-161		1					2							
	162-164		1					2							
	165-167		1					2							
	168-170		1					2							
	171-173		1					2							
	174-176		1					2							
	177-179		1					2							
> 180		1					2								



CLASSE DI COMPRESSIONE				
REF.	12 mmHg	ARTICOLO	TAGLIE	COLORI
punta chiusa 	34070	Gambaletto maglia a rete	1 - 2 - 3 - 4 - 5	113 132 763 862
punta aperta 	34A70	Gambaletto maglia a rete	1 - 2 - 3 - 4 - 5	132 763 862
punta chiusa 	34079	Calza autoreggente maglia liscia	1 - 2 - 3 - 4 - 5	113 132 763 862
	34R79	Calza autoreggente maglia a rete	1 - 2 - 3 - 4 - 5	113 132 763 862
punta aperta 	34A79	Calza autoreggente maglia a rete	1 - 2 - 3 - 4 - 5	132 763 862
punta chiusa 	34072	Collant maglia a rete	1 - 2 - 3 - 4 - 5	113 132 763 862

CLASSE DI COMPRESSIONE				
REF.	12 mmHg	ARTICOLO	TAGLIE	COLORI
punta aperta 	34A72	Collant maglia a rete	1 - 2 - 3 - 4 - 5	132 862
punta chiusa 	34L72	Collant maglia liscia	1 - 2 - 3 - 4 - 5	132 763 862
punta chiusa 	34M72	Collant maglia a rete microfibra coprente	1 - 2 - 3 - 4 - 5	862
punta chiusa 	34076	Collant maglia a rete supercalibrato	2 - 3 - 4 - 5	132 763 862
punta chiusa 	34073	Collant gestante maglia a rete	1 - 2 - 3 - 4 - 5	132 862

VIVA 70 den

Linea riposante



CARATTERISTICHE

Linea completa di calze riposanti a compressione decrescente, morbide e trasparenti, a maglia a rete e liscia. Alleviano pesantezza, gonfiore e stanchezza, donano un effetto tonificante e snellente a tutta la gamba.

INDICAZIONI

12 mmHg

Indicate in caso di gambe affaticate e stanche, gonfiore delle caviglie e dei piedi.

CONTROINDICAZIONI

Dermoipodermi in forma acuta, infezioni cutanee, nota allergia da contatto a tutori elastici.

COMPOSIZIONE

Poliammide, elastan.

COMPRESSIONE

12 mmHg



COLORI

113 cipria



132 chiaro



763 visone



862 nero



VIVA 140 den

Linea riposante

Taglia	Peso kg														
	40	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76	79	82
	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	90
Altezza cm	< 150														
	150-152														
	153-155														
	156-158			1											
	159-161			1											
	162-164			1											
	165-167			1											
	168-170			1											
	171-173			1											
	174-176			1											
	177-179			1											
> 180			1												



CLASSE DI COMPRESSIONE				
REF.	18 mmHg	ARTICOLO	TAGLIE	COLORI
punta chiusa 	34140	Gambaletto maglia a rete	1 - 2 - 3 - 4 - 5	113 132 763 862
punta aperta 	34A40	Gambaletto maglia a rete	1 - 2 - 3 - 4 - 5	132 763 862
punta chiusa 	34149	Calza autoreggente maglia a rete	1 - 2 - 3 - 4 - 5	113 132 763 862
punta aperta 	34A49	Calza autoreggente maglia a rete	1 - 2 - 3 - 4 - 5	132 763 862
punta chiusa 	34142	Collant maglia a rete	1 - 2 - 3 - 4 - 5	113 132 763 861 862
punta aperta 	34A42	Collant maglia a rete	1 - 2 - 3 - 4 - 5	132 862

CLASSE DI COMPRESSIONE				
REF.	18 mmHg	ARTICOLO	TAGLIE	COLORI
punta chiusa 	34L42	Collant maglia liscia	1 - 2 - 3 - 4 - 5	132 763 862
punta chiusa 	34M42	Collant maglia a rete microfibra coprente	1 - 2 - 3 - 4 - 5	862
punta chiusa 	34146	Collant maglia a rete supercalibrato	2 - 3 - 4 - 5	132 862
punta chiusa 	34143	Collant gestante maglia a rete	1 - 2 - 3 - 4 - 5	132 862
	34144	Leggings	1 - 2 - 3 - 4 - 5	862

VIVA 140 den

Linea riposante



LINEA
FLEBOLOGICA



CARATTERISTICHE

Linea completa di calze riposanti a compressione decrescente, morbide e trasparenti, a maglia a rete. Alleviano pesantezza, gonfiore e stanchezza, donano un effetto tonificante e snellente a tutta la gamba.

INDICAZIONI

18 mmHg

Indicate in caso di sintomi minori dell'insufficienza venosa, in caso di prolungata stazione eretta, gambe affaticate e stanche, gonfiore delle caviglie e dei piedi.

CONTROINDICAZIONI

Dermoipodermi in forma acuta, infezioni cutanee, nota allergia da contatto a tutori elastici.

COMPOSIZIONE

Poliammide, elastan.



COMPRESSIONE

18 mmHg



COLORI

113 cipria



132 chiaro



763 visone



861 fumé



862 nero





La riduzione di mobilità in seguito ad intervento operatorio o in caso di allettamento prolungato costituisce un fattore di rischio per il paziente. L'immobilità degli arti inferiori, infatti, può essere causa della formazione di coaguli del sangue, detti trombi, che rallentano od ostacolano il ritorno del flusso sanguigno al cuore, dando origine a trombosi venose.

LINEA HOSPITAL









In queste particolari condizioni, la terapia compressiva sopprime al normale funzionamento del sistema circolatorio: il gradiente compressivo decrescente dal basso verso l'alto supporta il flusso ematico nella sua risalita.

VARISAN® A.T.E.®


Linea hospital
Calze antitromboemboliche 18 mmHg
Punta ispezionabile

CIRCONFERENZA (cm) RP									
Taglia	XS	S	SXL*	M	MXL*	L	LXL*	XL	
Coscia	ⓐ	38-52	46-62	54-72	54-72	62-82	62-82	70-92	80-102
Polpaccio	ⓒ	24-38	28-44	-	32-48	-	36-52	-	40-56
Caviglia	ⓑ	16-19	19-22	19-22	22-26	22-26	26-30	26-30	30-34
Gambaletto		•	•		•		•		•
Calza autoreggente		•	•	•	•	•	•	•	•
Monocollant			•		•		•		•

CLASSE DI COMPRESSIONE		
REF.	18 mmHg	ARTICOLO
punta ispezionabile 	RP201	Gambaletto (AD)
punta ispezionabile 	RP209	Calza autoreggente (AGH)
punta ispezionabile 	RP252	Monocollant dx (AGTR)
	RP253	Monocollant sx (AGTL)
punta ispezionabile 	RP250	Monocollant ambidestro (AGT)

CIRCONFERENZA (cm) CP COTONE								
Taglia	XS	S	SXL*	M	MXL*	L	LXL*	
Coscia	ⓐ	40-50	48-60	60-70	56-70	70-80	64-80	80-90
Caviglia	ⓑ	17-19	20-22	20-22	23-25	23-25	26-28	26-28
Calza autoreggente/ Monocollant		•	•	•	•	•	•	•
CLASSE DI COMPRESSIONE								
REF.	18 mmHg	ARTICOLO						
punta ispezionabile 	CP209	Calza autoreggente (AGH)						
punta ispezionabile 	CP250	Monocollant ambidestro (AGT)						

*Le taglie XL a parità di caviglia, offrono una vestibilità superiore alla coscia.

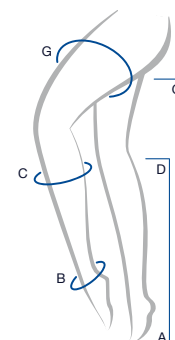

Prodotti con cotone
a contatto con la pelle



VARISAN® A.T.E.®

Linea hospital
Calze antitromboemboliche 18 mmHg
Punta ispezionabile



Calze per la prevenzione della trombosi venosa profonda pre e post-operatoria con gradiente compressivo decrescente. Disponibili anche in cotone.

CARATTERISTICHE

La linea VARISAN® A.T.E.® punta ispezionabile è realizzata in 8 taglie, con punta del piede ispezionabile e tallone rinforzato. Differenziazione delle taglie tramite diverso colore sul tallone.

INDICAZIONI

18 mmHg

Profilassi della trombosi venosa profonda e della tromboembolia polmonare nel post-operatorio nel paziente immobilizzato/allettato, quando vi siano controindicazioni all'uso delle profilassi farmacologiche o in associazione ad esse.

CONTROINDICAZIONI

Dermoipodermite in forma acuta, infezioni cutanee, arteriopatia obliterante periferica, malattie degli arti inferiori non di origine veno-linfatica, nota allergia da contatto a tutori elastici.

DURATA DEL TRATTAMENTO

La calza VARISAN® A.T.E.® deve essere usata dal paziente prima, durante e dopo le operazioni, dopo il parto o durante l'allettamento.

COMPOSIZIONE

Poliammide 77%, elasthan 23%.

Cotone: poliammide 70%, cotone 15%, elasthan 15%.

LAVAGGIO

La calza VARISAN® A.T.E.® può essere lavata a una temperatura fino a 95°C.

COMPRESSIONE

18 mmHg



COLORI

161 bianco






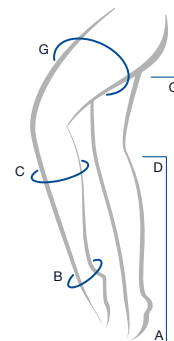
VARISAN® RECOVER24

Linea hospital
Calze post-operatorie 24 mmHg
Punta aperta

CIRCONFERENZA (cm)							
Taglia		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
Coscia	G	45 - 55	50 - 60	55 - 65	60 - 71	66 - 78	73 - 85
Polpaccio	C	29 - 35	31 - 38	34 - 41	37 - 44	40 - 48	44 - 52
Caviglia	B	18 - 20	20 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31	31 - 34


LUNGHEZZA (cm)			
		Corto	Normale
Gambaletto	AD	36 - 41	42 - 48
Calza	AG	66 - 73	74 - 82

CLASSE DI COMPRESSIONE		
REF.	24 mmHg	ARTICOLO
punta aperta 	R24E1	Gambaletto (AD) corto
	R24N1	Gambaletto (AD) normale
punta aperta 	R24E9	Calza autoreggente (AGH) corto
	R24N9	Calza autoreggente (AGH) normale
punta aperta 	R24E0	Monocollant ambidestro (AGT) corto
	R24N0	Monocollant ambidestro (AGT) normale



VARISAN® RECOVER24

Linea hospital
Calze post-operatorie 24 mmHg
Punta aperta

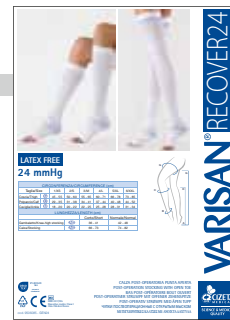

Calza compressiva in trama circolare ad uso ospedaliero, indicata principalmente per la compressione degli arti inferiori nel trattamento post-operatorio delle patologie vascolari o nel trattamento di edemi ed ematomi post operatori.

CARATTERISTICHE

La linea VARISAN® RECOVER24 è realizzata in punta aperta per consentire il controllo della circolazione sanguigna nel piede. L'anello blu presente su tallone e collo del piede, agevola il corretto posizionamento della calza. La versione autoreggente è caratterizzata da una balza alta 5 cm e latex free. La differenziazione delle taglie è indicata nella pianta del piede.

INDICAZIONI

24 mmHg

- Compressione post-operatoria a breve termine negli interventi di chirurgia venosa per favorire il ritorno venoso e post-intervento ortopedico
- Trattamento compressivo dopo trombosi venosa superficiale e profonda acuta
- Profilassi e terapie delle ulcere venose nei pazienti mobilizzati/parzialmente mobilizzati
- Trattamento di flebo-linfedemi lievi o moderati

CONTROINDICAZIONI

Dermoipodermite in forma acuta, infezioni cutanee, arteriopatia obliterante periferica, malattie degli arti inferiori non di origine veno-linfatica, nota allergia da contatto a tutori elastici.

COMPOSIZIONE

Poliammide 62%, elastan 38%.

LAVAGGIO

La calza VARISAN® RECOVER24 può essere lavata a una temperatura fino a 95°C.

COMPRESSIONE

24 mmHg



COLORI

161 bianco






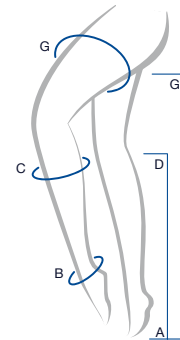
VARISAN® RECOVER35

Linea hospital
Calze post-operatorie 35 mmHg
Punta aperta

CIRCONFERENZA (cm)							
Taglia		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
Coscia	G	45 - 55	50 - 60	55 - 65	60 - 71	66 - 78	73 - 85
Polpaccio	C	29 - 35	31 - 38	34 - 41	37 - 44	40 - 48	44 - 52
Caviglia	B	18 - 20	20 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31	31 - 34


LUNGHEZZA (cm)			
		Corto	Normale
Gambaletto	AD	36 - 41	42 - 48
Calza	AG	66 - 73	74 - 82

CLASSE DI COMPRESSIONE		
REF.	35 mmHg	ARTICOLO
punta aperta 	R35E1	Gambaletto (AD) corto
	R35N1	Gambaletto (AD) normale
punta aperta 	R35E9	Calza autoreggente (AGH) corto
	R35N9	Calza autoreggente (AGH) normale
punta aperta 	R35E0	Monocollant ambidestro (AGT) corto
	R35N0	Monocollant ambidestro (AGT) normale



VARISAN® RECOVER35

Linea hospital
Calze post-operatorie 35 mmHg
Punta aperta

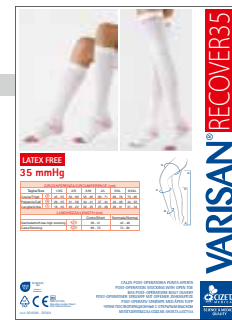

Calza compressiva in trama circolare ad uso ospedaliero, indicata principalmente per la compressione degli arti inferiori nel trattamento post-operatorio delle patologie vascolari o nel trattamento di edemi ed ematomi post-operatori.

CARATTERISTICHE

La linea VARISAN® RECOVER35 è realizzata in punta aperta per consentire il controllo della circolazione sanguigna nel piede. L'anello rosso presente su tallone e collo del piede, agevola il corretto posizionamento della calza. La versione autoreggente è caratterizzata da una balza alta 5 cm e latex free. La differenziazione delle taglie è indicata nella pianta del piede.

INDICAZIONI

35 mmHg

- Compressione post-operatoria a breve termine negli interventi di chirurgia venosa per favorire il ritorno venoso e post-intervento ortopedico
- Trattamento compressivo dopo trombosi venosa superficiale e profonda acuta
- Profilassi e terapie delle ulcere venose nei pazienti mobilizzati/parzialmente mobilizzati
- Trattamento di flebo-linfedemi lievi o moderati

CONTROINDICAZIONI

Dermoipodermi in forma acuta, infezioni cutanee, arteriopatia obliterante periferica, malattie degli arti inferiori non di origine veno-linfatica, nota allergia da contatto a tutori elastici.

COMPOSIZIONE

Poliammide 52%, elastan 48%.

LAVAGGIO

La calza VARISAN® RECOVER35 può essere lavata a una temperatura fino a 95°C.

COMPRESSIONE

35 mmHg



COLORI

161 bianco



VARISAN® DLS KIT

Linea hospital

Double Layer System Kit:

Calza antitrombo + calza compressiva medicale



TRAMA CIRCOLARE




TUTORI STANDARD



TUTORI SU MISURA

CIRCONFERENZA (cm)											
Taglia	1		2		3		4		5		
	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	
Coscia	G	50-55	53-58	53-58	56-61	56-61	60-66	60-66	64-70	64-70	70-77
Polpaccio	C	31-34	34-37	34-37	37-40	37-40	40-44	40-44	44-48	44-48	48-52
Caviglia	B	19-20		21-23		23-25		25-27		28-30	

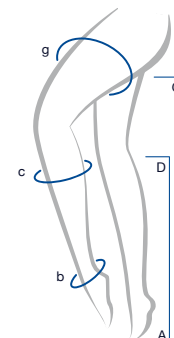

LUNGHEZZA (cm)			
		Corto	Normale
Gambaletto	AD	36 - 41	42 - 48
Calza	AG	66 - 73	74 - 82

CLASSE DI COMPRESIONE			
REF.	18 - 21 mmHg	23 - 32 mmHg	ARTICOLO
punta aperta 	DL3E1	DL4E1	Gambaletto (AD) corto
	DL3N1	DL4N1	Gambaletto (AD) normale
punta aperta 	DL3E2	DL4E2	Monocollant dx (AGTR) corto
	DL3N2	DL4N2	Monocollant dx (AGTR) normale
	DL3E3	DL4E3	Monocollant sx (AGTL) corto
	DL3N3	DL4N3	Monocollant sx (AGTL) normale



Introduttore VARISLIDE® Lungo

VARISAN® DLS KIT

Linea hospital

Double Layer System Kit:

Calza antitrombo + calza compressiva medicale



VARISAN® DOUBLE LAYER SYSTEM KIT 1+1/1+2 è un kit di calze elastocompressive, che consente di realizzare un sistema di compressione multistrato ad alto indice di Stiffness, fornendo nell'arco della giornata una soluzione attiva per il paziente flebopatico e per l'immediato post-chirurgico. Il kit è disponibile in versione gambaletto (AD) o monocollant (AGT) destro o sinistro.

CARATTERISTICHE

Il kit è composto da:

- 1° strato - una calza antitrombo bianca (18 mmHg - poliammide 82%, elasthan 18%), con punta ispezionabile
- 2° strato - una calza VARISAN® TOP Ccl.1 (18-21 mmHg - poliammide 75%, elasthan 25%) o Ccl.2 (23-32 mmHg - poliammide 70%, elasthan 30%), punta aperta, certificata RAL
- Un introduttore VARISLIDE® Lungo
- Due calze salva-medicazione bianche

INDICAZIONI

VARISAN® DOUBLE LAYER SYSTEM KIT 1+1

Indicato in caso di terapia per insufficienza venosa cronica, flebiti e tromboflebiti. Il Kit 1+1 è particolarmente indicato in caso di trattamento chirurgico (endolaser) della sola safena.

VARISAN® DOUBLE LAYER SYSTEM KIT 1+2

Indicato nel post intervento chirurgico ed in caso di terapia per insufficienza venosa cronica, dopo trombosi venosa profonda. Il Kit 1+2 è particolarmente indicato in caso di: trattamento sclerosante della safena con mousse, trattamento chirurgico (endolaser) della safena con varicectomia, trattamento chirurgico (stripping) della safena, trattamento dell'ulcera post-essudativa, trattamento del flebo-linfedema, trattamento dell'insufficienza venosa cronica scompensata.

CONTROINDICAZIONI

Arteriopatie aterosclerotiche e flogistiche, microangiopatia diabetica, tutti i casi in cui si sospetti riduzione del flusso nutrizionale cutaneo, dermoipodermi in fase acuta, pannicolopatia liposclerotica in fase di flogosi acuta, infezioni cutanee batteriche o micotiche, grossolane anomalie dell'anatomia dell'arto e sproporzioni evidenti e non ammortizzabili tra le circonferenze caviglia-polpaccio-ginocchio-coscia; per questa eventualità si possono fornire calze con misure personalizzate.

COMPOSIZIONE

Ccl. 1: Calza: poliammide 75%, elasthan 25%.
Sottocalza: poliammide 100%.
Calza Antitrombo: poliammide 82%, elasthan 18%.
Ccl. 2: Calza: poliammide 70%, elasthan 30%.
Sottocalza: poliammide 100%.
Calza Antitrombo: poliammide 82%, elasthan 18%.

COMPRESSIONE

Ccl. 1 18-21 mmHg

Ccl. 2 23-32 mmHg



COLORI

739 beige



VARISAN[®] ULCER-KIT

Linea hospital
Kit gambaletto con cerniera per ulcera venosa



TRAMA CIRCOLARE




TUTORI STANDARD




TUTORI SU MISURA

		CIRCONFERENZA (cm)									
Taglia		1		2		3		4		5	
		NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS
Polpaccio	C	31-34	34-37	34-37	37-40	37-40	40-44	40-44	44-48	44-48	48-52
Caviglia	B	19-20		21-23		23-25		25-27		28-30	

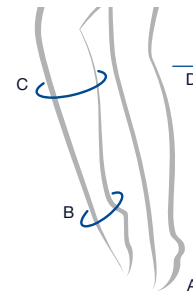

LUNGHEZZA (cm)			
		Corto	Normale
Gambaletto	AD	36 - 41	42 - 48

CLASSE DI COMPRESSIONE				
REF.	18 - 21 mmHg	23 - 32 mmHg	34 - 46 mmHg	ARTICOLO*
punta aperta 	DX3E1	DX4E1	DX5E1	Gambaletto dx (AD) con cerniera laterale corto
	DX3N1	DX4N1	DX5N1	Gambaletto dx (AD) con cerniera laterale normale
	SX3E1	SX4E1	SX5E1	Gambaletto sx (AD) con cerniera laterale corto
	SX3N1	SX4N1	SX5N1	Gambaletto sx (AD) con cerniera laterale normale

*Su richiesta è disponibile la cerniera posteriore



VARISAN® ULCER-KIT

Linea hospital

Kit gambaletto con cerniera per ulcera venosa



LINEA
HOSPITAL



VARISAN® ULCER-KIT, indicato per la terapia compressiva degli arti inferiori affetti da ulcera venosa, offre maggiore comfort e vestibilità rispetto ai tradizionali bendaggi.

La sottile e morbida sottocalza in cotone facilita il fissaggio delle medicazioni e l'indosso della calza con cerniera VARISAN® TOP.

CARATTERISTICHE

- Prodotto certificato RAL specifico per la cura dell'ulcera venosa (Ccl. 3)
- L'alta qualità del tessuto favorisce un'ottima traspirabilità
- La sottile e morbida sottocalza in cotone garantisce la protezione della ferita e la presenza della cerniera ne facilita la medicazione
- Disponibile su richiesta con cerniera posteriore

INDICAZIONI

I CLASSE (18 - 21 mmHg)

Varici, edemi venosi iniziali, vene reticolari. Prevenzione e trattamento ulcere iniziali.

II CLASSE (23 - 32 mmHg)

Trombosi venosa superficiale, trombosi venosa profonda in forma acuta, linfedemi, prevenzione della sindrome post-trombotica.

Trattamento ulcere cutanee.

III CLASSE (34 - 46 mmHg)

Trattamento ulcus cruris venosum.

CONTROINDICAZIONI


Dermoipodermiiti in forma acuta, infezioni cutanee, arteriopatia obliterante periferica, nota allergia da contatto a tutori elastici.

COMPOSIZIONE

Ccl. 1: poliammide 75%, elastan 25%.

Ccl. 2: poliammide 70%, elastan 30%.

Ccl. 3: poliammide 65%, elastan 35%.

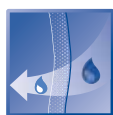

TRASPIRABILITÀ



PIEDE COMFORT

COMPRESSIONE

Ccl. 1 18-21 mmHg

Ccl. 2 23-32 mmHg

Ccl. 3 34-46 mmHg



COLORI

739 beige




VEINALGIC®

Linea hospital

Una nuova compressione selettiva post-scleroterapia


CIRCONFERENZA (cm)				
Taglia		1	2	3
Polpaccio		30 - 35	34,5 - 40,5	40 - 47
Coscia		44 - 51	50 - 59	58 - 68

REF.	CODICE	ARTICOLO	TAGLIA	COLORE
	62714	Polpaccio (BD)	1 - 3	862
	62715	Coscia (FG)	1 - 3	862
	9705059	Pack gel	-	-

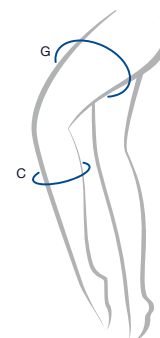

IL KIT VEINALGIC® È COMPOSTO DA:

- 1) Tutore non tubolare
- 2) Inserto di schiuma poliuretanic con due differenti consistenze, che permette di aumentare la pressione sulla zona da trattare
- 3) Sacchetto di gel per esercitare un'azione criogena, vasocostrittrice e antalgica

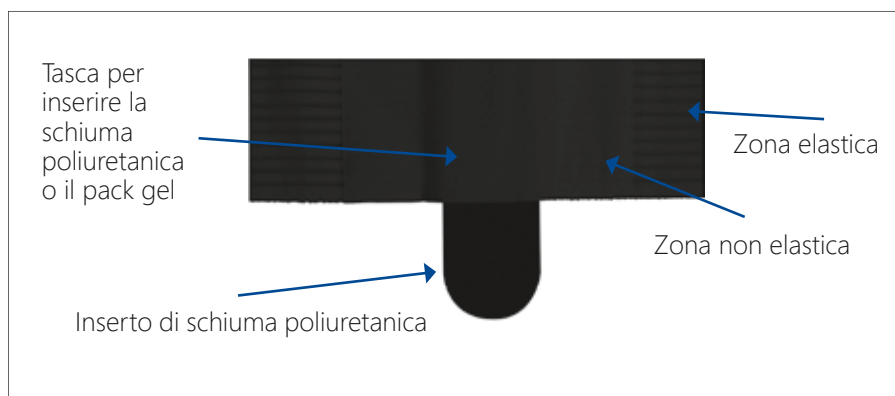

VEINALGIC®

Linea hospital

Una nuova compressione selettiva post-scleroterapia



CARATTERISTICHE

VEINALGIC® è l'innovativo dispositivo medico che permette di effettuare una forte compressione e contenzione sulla zona trattata. La forza della compressione e della contenzione saranno variabili in funzione di quanto verrà stretto il prodotto una volta chiuso.

INDICAZIONI

Il trattamento sulle varici, a prescindere dalla tecnica utilizzata, può portare a degli effetti indesiderati per il paziente, quali:

- Dolore sul tratto della vena trattata
- Comparsa di ecchimosi e di ematomi
- Pigmentazione bruna sulla parte trattata
- Indurimento della zona trattata o comparsa di cordoni sottocutanei
- Comparsa di arrossamenti
- Edema

CONTROINDICAZIONI

AOMI (stadio 3 o 4), trombosi settica, microangiopatie, phlegmatia coerulea dolens, allergie a materiale tessile.



PROPRIETÀ

Tutore non tubolare che associa contenzione e compressione

- Pressione esercitata: >30 mmHg
- Possibilità di aumentare la pressione localmente fino a 40 mmHg
- Non esercita pressioni elevate sulle zone periferiche, così da evitare l' "effetto laccio"
- Apporta un'azione antalgica grazie al freddo

DURATA DEL TRATTAMENTO

La durata del trattamento deve essere indicata dal medico tenendo in considerazione:

- Diametro della vena trattata
- Intensità del dolore
- Tecnica utilizzata

COMPRESSIONE

> 30 mmHg



COLORI

862 nero






L'edema di natura linfatica costituisce una patologia piuttosto frequente propria di molte affezioni degli arti inferiori e superiori.

I sistemi venoso e linfatico collaborano al mantenimento dell'omeostasi micro-macro circolatoria dei tessuti.

L'edema è espressione di una saturazione dei meccanismi di compenso propri del sistema linfatico, perché sovraccaricato o perché funzionalmente ed organicamente esso stesso deficitario.

LINEA LINFOLOGICA

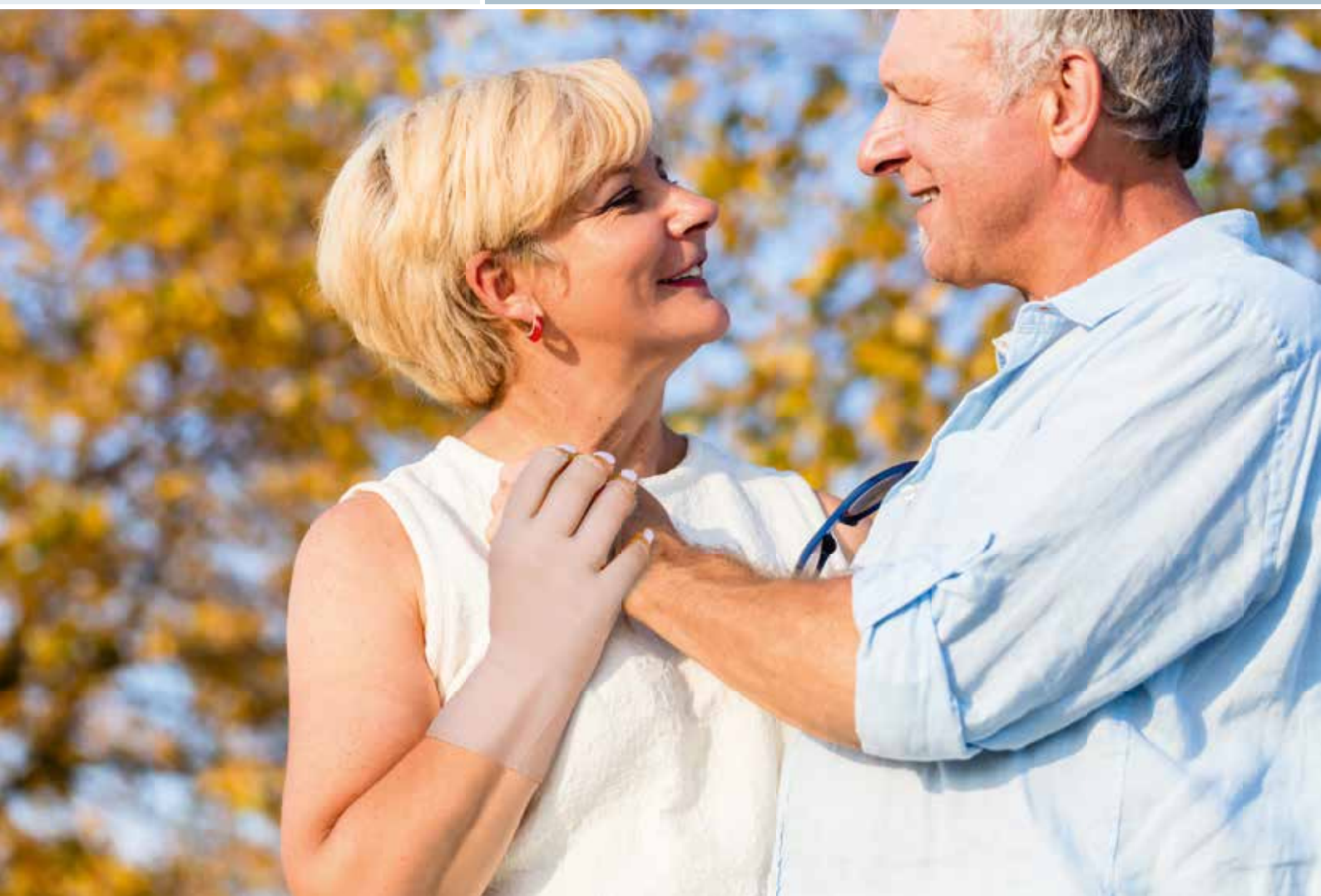

La compressione è fondamentale nel trattamento del linfedema e rappresenta un punto importantissimo per questa patologia.

Nella fase acuta, infatti, con il drenaggio linfatico manuale e con l'ausilio del bendaggio, si riduce l'edema e con il tutore elastocompressivo calza o bracciale si ha il mantenimento.

VARISAN[®] FLAT

Linea linfologica

Bracciale e guanto terapeutico trama piatta - standard



TRAMA PIATTA





TUTORI STANDARD

TUTORI STANDARD						
CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia		XS	S	M	L	XL
	Punti di misurazione					
	cG	27-29,5	29,5-32	32-35	35-38,5	38,5-42
	cE	24-26	26-28,5	28,5-31	31-34	34-37
	cC	15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-21	21-23
	cA	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26
	cB	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27
	cC	15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-21	21-23

TUTORI STANDARD		
LUNGHEZZA BRACCIO fino al polso (cm)		
	Corto	Normale
CG	40 - 44	45 - 49
AG	40 - 44	45 - 49
LUNGHEZZA MANO (cm)		
AB	3 - 5	
AC	9 - 12	

TUTORI STANDARD			
CLASSE DI COMPRESIONE			
REF.	Ccl 2	Ccl 2 STRONG	ARTICOLO
	23 - 32 mmHg	23 - 32 mmHg	
	FE447	SE447	Bracciale al polso autoreggente (CG) corto
	FN447	SN447	Bracciale al polso autoreggente (CG) normale
	FE449	SE449	Bracciale al metacarpo con pollice autoreggente (AG) corto
	FN449	SN449	Bracciale al metacarpo con pollice autoreggente (AG) normale
	FL443	SL443	Guanto con dita (CZ)

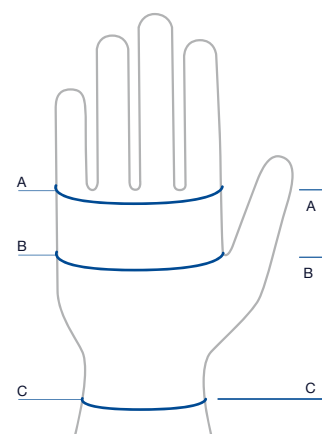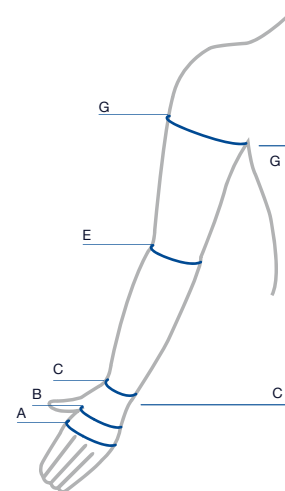

VARISAN® FLAT

Linea linfologica

Bracciale e guanto terapeutico trama piatta - standard



Trama piatta di alta qualità, prodotta in Italia, con un servizio di consulenza di pre/post vendita che garantisce la perfetta conformità del prodotto alle esigenze del cliente e la massima personalizzazione.

CARATTERISTICHE

La linea VARISAN® FLAT è certificata RAL. Questa tipologia di prodotto, realizzato in trama piatta, è specificatamente dedicata alle patologie linfatiche, con lo scopo di mantenere i risultati ottenuti con il trattamento decongestivo (infodrenaggio manuale+bendaggio).

INDICAZIONI

II CLASSE (23 - 32 mmHg)

II CLASSE STRONG (23 - 32 mmHg)

Tattamento dei linfedemi dell'arto superiore, mantenimento dei risultati ottenuti con adeguato trattamento dei linfedemi e dei lipedemi dell'arto superiore e della mano.

CONTROINDICAZIONI

Arteriopatie ostruttive (con Indice Caviglia - Braccio (ABI) <0.5).

Gravi neuropatie (mancanza di feedback sensitivo con possibili danni ischemici). Insufficienza cardiaca non compensata. Fibromialgia reumatica.

COMPOSIZIONE

Ccl. 2: poliammide 75%, elastan 25%.


Ccl. 2 Strong: poliammide 75%, elastan 25%.



AMPIA GAMMA



SILICONE MEDICALE ANALLERGICO

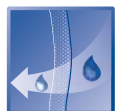

TRASPIRABILITÀ

COMPRESSIONE

Ccl. 2 23-32 mmHg

Ccl. 2 STRONG 23-32 mmHg



COLORI

106 avorio

604 avana*

112 sabbia

420 corallo

440 carminio

450 fucsia

545 blu navy

535 bluette

608 verde bosco

820 grigio

862 nero



*colore standard
altri colori disponibili a richiesta

VARISAN® FLAT

Linea linfologica






Bracciale e guanto terapeutico trama piatta - su misura



TRAMA PIATTA



TUTORI SU MISURA

TUTORI SU MISURA					
CLASSE DI COMPRESSIONE					
REF.	Ccl 1	Ccl 2	Ccl 2 STRONG	Ccl 3	ARTICOLO
	18 - 21 mmHg	23 - 32 mmHg	23 - 32 mmHg	34 - 46 mmHg	
	FL1CA	FL2CA	SL2CA	FL3CA	Guanto al metacarpo con pollice (CA)
	FL1CZ	FL2CZ	SL2CZ	FL3CZ	Guanto con dita (CZ)
	FL1GC	FL2GC	SL2GC	FL3GC	Bracciale al polso autoreggente (CG)
	FL1GA	FL2GA	SL2GA	FL3GA	Bracciale al metacarpo con pollice autoreggente (AG)
	FL1GZ	FL2GZ	SL2GZ	FL3GZ	Bracciale con guanto autoreggente (ZG)

TUTORI SU MISURA		
OPZIONI		
	OPZ0000	Insero pad
	OPZ0050	Balza siliconata H 35 mm
	OPZ0052	Balza siliconata interna
	OPZ0076	Tassello microfibra protettivo
	OPZ0077	Alleggerimento in microfibra
	OPZ0080	Cerniera
	OPZ0100	Fettuccia soft per dita
	OPZ0116	Polso comfort
	OPZ0120	Gomito flesso
	OPZ0125	Gomito dritto
	OPZ0130	Gomito comfort
	OPZ0140	Bordo superiore bracciale obliquo
	OPZ0145	Bordo superiore bracciale dritto
	OPZ0150	Balza siliconata H 50 mm
	OPZ0160	Spallina bracciale
	OPZ0165	Bracciale autoreggente
	OPZ9999	Colore

VARISAN® FLAT

Linea linfologica

Bracciale e guanto terapeutico trama piatta - su misura



Trama piatta di alta qualità, prodotta in Italia, con un servizio di consulenza di pre/post vendita che garantisce la perfetta conformità del prodotto alle esigenze del cliente e la massima personalizzazione.

CARATTERISTICHE

La linea VARISAN® FLAT è certificata RAL. Questa tipologia di prodotto, realizzato in trama piatta, è specificatamente dedicata alle patologie linfatiche, con lo scopo di mantenere i risultati ottenuti con il trattamento decongestivo (linfodrenaggio manuale+bendaggio).

INDICAZIONI

I CLASSE (18 - 21 mmHg)

II CLASSE (23 - 32 mmHg)

II CLASSE STRONG (23 - 32 mmHg)

III CLASSE (34 - 46 mmHg)

Tattamento del linfedema, del fleboedema, del flebolinfedema, del lipedema.

CONTROINDICAZIONI

Arteriopatie ostruttive (con Indice Caviglia – Braccio (ABI) <0.5).

Gravi neuropatie (mancanza di feedback sensitivo con possibili danni ischemici). Insufficienza cardiaca non compensata. Fibromialgia reumatica.

COMPOSIZIONE

Ccl. 1: poliammide 80%, elastan 20%.

Ccl. 2: poliammide 75%, elastan 25%.

Ccl. 2 Strong: poliammide 75%, elastan 25%.

Ccl. 3: poliammide 80%, elastan 20%.

COMPRESSIONE

Ccl. 2 23-32 mmHg

Ccl. 2 STRONG 23-32 mmHg



COLORI

106 avorio

604 avana*

112 sabbia

420 corallo

440 carminio

450 fucsia

545 blu navy

535 bluette

608 verde bosco

820 grigio

862 nero



TRASPIRABILITÀ



SILICONE MEDICALE ANALLERGICO

*colore standard
altri colori disponibili a richiesta

VARISAN® FIBERLUX®

Linea linfologica

Bracciale e guanto terapeutico trilobato in trama piatta - standard



TRAMA PIATTA





TUTORI STANDARD

TUTORI STANDARD						
CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia		XS	S	M	L	XL
Punti di misurazione						
	cG	27-29,5	29,5-32	32-35	35-38,5	38,5-42
	cE	24-26	26-28,5	28,5-31	31-34	34-37
	cC	15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-21	21-23
	cA	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26
	cB	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27
	cC	15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-21	21-23

TUTORI STANDARD		
LUNGHEZZA BRACCIO fino al polso (cm)		
	Corto	Normale
CG	40 - 44	45 - 49
AG	40 - 44	45 - 49
LUNGHEZZA MANO (cm)		
AB	3 - 5	
AC	9 - 12	

TUTORI STANDARD		
CLASSE DI COMPRESSIONE		
REF.	Ccl 2 23 - 32 mmHg	ARTICOLO
	LE447	Bracciale al polso autoreggente (CG) corto
	LN447	Bracciale al polso autoreggente (CG) normale
	LE449	Bracciale al metacarpo con pollice autoreggente (AG) corto
	LN449	Bracciale al metacarpo con pollice autoreggente (AG) normale
	LL443	Guanto con dita (CZ)

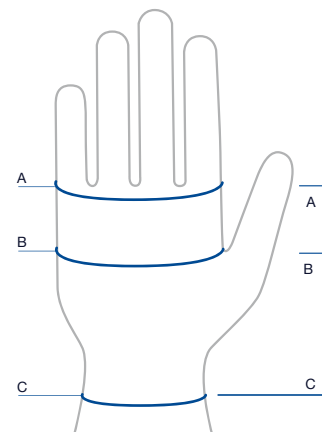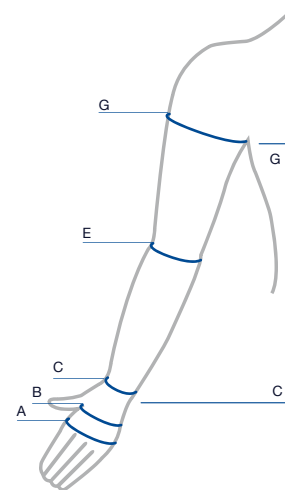

VARISAN® FIBERLUX®

Linea linfologica

Bracciale e guanto terapeutico trilobato in trama piatta - standard



Bracciale terapeutico trilobato in trama piatta, certificato RAL, specifico per la cura di patologie linfatiche dell'arto superiore. Grazie alla sua capacità compressiva certificata, favorisce il drenaggio linfatico e massimizza la sua efficacia.

Trama piatta di alta qualità, prodotta in Italia, con un servizio di consulenza di pre/post vendita che garantisce la perfetta conformità del prodotto alle esigenze del cliente e la massima personalizzazione.

CARATTERISTICHE

Il particolare filato trilobato Fiberlux® con cui è realizzato unisce lucentezza e morbidezza con massime solidità e resistenza. La superficie liscia e soffice del tutore riduce l'attrito sul braccio e ne permette lo scivolamento fino al corretto posizionamento.

La conformazione trilobata del filato Fiberlux® riflette la luce molto di più rispetto ad un filato standard e garantisce un colore brillante, acceso e durevole nel tempo.

INDICAZIONI

II CLASSE (23 - 32 mmHg)

Prevenzione edema post-chirurgico, trattamento dei linfedemi dell'arto superiore, mantenimento dei risultati ottenuti con adeguato trattamento dei linfedemi e dei lipedemi dell'arto superiore e della mano.

CONTROINDICAZIONI

Arteriopatie ostruttive (con Indice Caviglia – Braccio (ABI) <0.5).

Gravi neuropatie (mancanza di feedback sensitivo con possibili danni ischemici). Insufficienza cardiaca non compensata. Fibromalgia reumatica.

COMPOSIZIONE

Ccl. 2: poliammide 75%, elastan 25%.



RESISTENZA



SILICONE MEDICALE
ANALLERGICO



TRASPIRABILITÀ

COMPRESSIONE

Ccl. 2 23-32 mmHg



COLORI

241 beige
lucido



VARISAN® FIBERLUX®

Linea linfologica






Bracciale e guanto terapeutico trilobato in trama piatta su misura




TRAMA CIRCOLARE



TUTORI SU MISURA

TUTORI SU MISURA		
CLASSE DI COMPRESSIONE		
REF.	Ccl 2	ARTICOLO
	23 - 32 mmHg	
	LL2GC	Bracciale al polso autoreggente (CG)
	LL2GA	Bracciale al metacarpo con pollice autoreggente (AG)
	LL2GZ	Bracciale con guanto autoreggente (ZG)
	LL2CA	Guanto al metacarpo (CA)
	LL2CZ	Guanto con dita (CZ)

TUTORI SU MISURA		
OPZIONI		
	OPZ0120	Gomito flessio



VARISAN® FIBERLUX®

Linea linfologica

Bracciale e guanto terapeutico trilobato in trama piatta su misura



Bracciale terapeutico trilobato in trama piatta, certificato RAL, specifico per la cura di patologie linfatiche dell'arto superiore. Grazie alla sua capacità compressiva certificata, favorisce il drenaggio linfatico e massimizza la sua efficacia.

Trama piatta di alta qualità, prodotta in Italia, con un servizio di consulenza di pre/post vendita che garantisce la perfetta conformità del prodotto alle esigenze del cliente e la massima personalizzazione.

CARATTERISTICHE

Il particolare filato trilobato Fiberlux® con cui è realizzato unisce lucentezza e morbidezza con massime solidità e resistenza. La superficie liscia e soffice del tutore riduce l'attrito sul braccio e ne permette lo scivolamento fino al corretto posizionamento.

La conformazione trilobata del filato Fiberlux® riflette la luce molto di più rispetto ad un filato standard e garantisce un colore brillante, acceso e durevole nel tempo.

INDICAZIONI

II CLASSE (23 - 32 mmHg)

Prevenzione edema post-chirurgico, trattamento dei linfedemi dell'arto superiore, mantenimento dei risultati ottenuti con adeguato trattamento dei linfedemi e dei lipedemi dell'arto superiore e della mano.

CONTROINDICAZIONI

Arteriopatie ostruttive (con Indice Caviglia – Braccio (ABI) <0.5).

Gravi neuropatie (mancanza di feedback sensitivo con possibili danni ischemici). Insufficienza cardiaca non compensata. Fibromalgia reumatica.

COMPOSIZIONE

Ccl. 2: poliammide 75%, elastan 25%.



RESISTENZA



SILICONE MEDICALE
ANALLERGICO



TRASPIRABILITÀ

COMPRESSIONE

Ccl. 2 23-32 mmHg



COLORI

241 beige
lucido



VARISAN® TOP

Linea linfologica

Bracciale terapeutico trama circolare - standard




TRAMA CIRCOLARE



TUTORI STANDARD

TUTORI STANDARD						
CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia		XS	S	M	L	XL
Punti di misurazione						
	cG	27-29,5	29,5-32	32-35	35-38,5	38,5-42
	cE	24-26	26-28,5	28,5-31	31-34	34-37
	cC	15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-21	21-23
	cA	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26
	cB	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27
	cC	15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-21	21-23

TUTORI STANDARD		
LUNGHEZZA BRACCIO fino al polso (cm)		
	Corto	Normale
CG	38-43	44-50

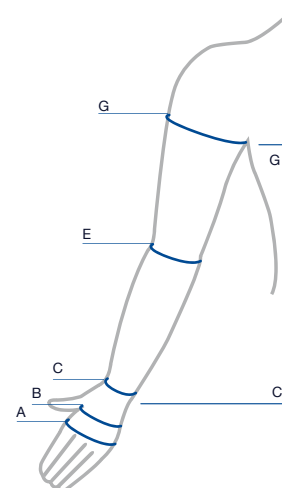

TUTORI STANDARD			
CLASSE DI COMPRESSIONE			
REF.	Ccl 2	ARTICOLO	COLORI
	23 - 32 mmHg		
	CC444	Bracciale al polso con spalla (CH) corto	739
	CL444	Bracciale al polso con spalla (CH) normale	739
	CC447	Bracciale al polso autoreggente (CG) corto	739 862
	CL447	Bracciale al polso autoreggente (CG) normale	739 862
	CC445	Bracciale al metacarpo con pollice e spalla (AH) corto	739
	CL445	Bracciale al metacarpo con pollice e spalla (AH) normale	739
	CC449	Bracciale al metacarpo con pollice autoreggente (AG) corto	739 862
	CL449	Bracciale al metacarpo con pollice autoreggente (AG) normale	739 862

Prodotti con cotone a contatto con la pelle



VARISAN® TOP

Linea linfologica

Bracciale terapeutico trama circolare - standard



La linea di bracciali in trama circolare VARISAN® TOP risponde a esigenze terapeutiche elevate e garantisce massimi livelli di prestazione, resistenza e qualità. Certificato RAL, il bracciale presenta un'innovativa e rivoluzionaria doppia costruzione che garantisce compressione efficace e massimo comfort durante l'indosso. La trama si presenta fitta all'altezza del polso, per favorire il corretto ritorno venoso e linfatico dal punto più distale, e alleggerita lungo il braccio dando vita ad una zona comfort a bassa rigidità, per indosso e mobilità dell'arto ottimali. Tutte le referenze sono realizzate con cotone a contatto con la pelle.

Disponibile anche con cintura di supporto.

CARATTERISTICHE

- La linea bracciali VARISAN® TOP è realizzata in 5 taglie e 2 lunghezze
- Costruito con doppia struttura per garantire grandi efficacia e comfort
- Il bordo superiore in silicone medicale anallergico assicura una forte tenuta del bracciale in posizione ed evita il suo scivolamento
- Realizzato in cotone, ha elevate capacità di traspirazione e termoregolazione e alta tolleranza cutanea
- Indosso confortevole, vestibilità perfetta

INDICAZIONI

I CLASSE (18 - 21 mmHg)

II CLASSE (23 - 32 mmHg)

Tattamento del linfedema primario e secondario dell'arto superiore in stadio 1, trombosi venosa del braccio e della spalla, edema post-operatorio e post-traumatico.

CONTROINDICAZIONI

Linfagite o erisipela in fase acuta, lesioni cutanee secernenti, infezioni, nota allergia da contatto a tutori elastici.

DURATA DEL TRATTAMENTO

Usualmente il trattamento compressivo deve essere effettuato solo nelle ore diurne. Il segmento deve essere indossato al mattino prima di alzarsi e tolto la sera. Si raccomanda durante il giorno di esercitare l'arto.

COMPOSIZIONE

Ccl. 1: poliammide 53%, cotone 26%, elasthan 21%.

Ccl. 2: poliammide 53%, elasthan 25%, cotone 22%.

COMPRESSIONE

Ccl. 1 18-21 mmHg

Ccl. 2 23-32 mmHg



COLORI

739 beige



862 nero



VARISAN[®] TOP

Linea linfologica


Bracciale terapeutico trama circolare - su misura



TRAMA CIRCOLARE



TUTORI SU MISURA

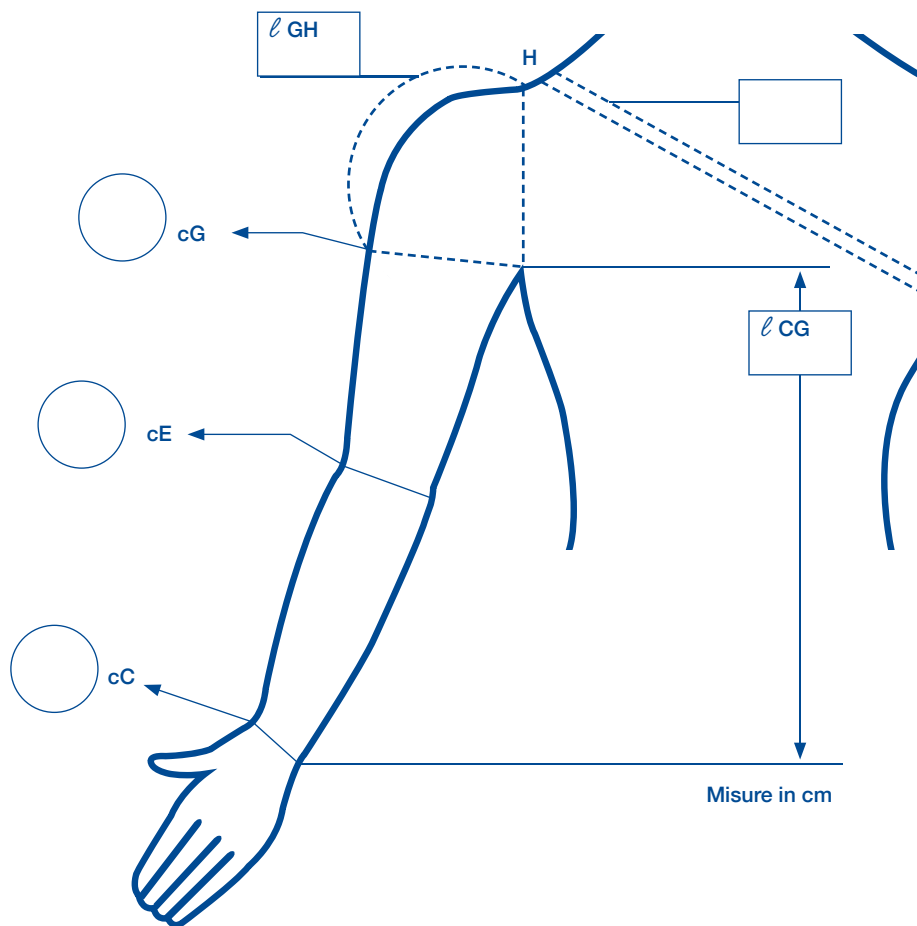

PUNTI DI MISURAZIONE

- punto C *plica palmare del polso*
- punto E *gomito (flesso a 30°)*
- punto G *2-3 cm sotto l'ascella*
- punto H *punto di appoggio sulla spalla*

Misure in cm

Prodotti con cotone a contatto con la pelle



TIPOLOGIA DI BRACCIALE	
	Bracciale al polso
	Bracciale al metacarpo con pollice
VARIANTI	
	Spalla
	Autoreggente

VARISAN® TOP

Linea linfologica

Bracciale terapeutico trama circolare - su misura



La linea di bracciali in trama circolare VARISAN® TOP risponde a esigenze terapeutiche elevate e garantisce massimi livelli di prestazione, resistenza e qualità. Certificato RAL, il bracciale presenta un'innovativa e rivoluzionaria doppia costruzione che garantisce compressione efficace e massimo comfort durante l'indosso. La trama si presenta fitta all'altezza del polso, per favorire il corretto ritorno venoso e linfatico dal punto più distale, e alleggerita lungo il braccio dando vita ad una zona comfort a bassa rigidità, per indosso e mobilità dell'arto ottimali. Tutte le referenze sono realizzate con cotone a contatto con la pelle.

Disponibile anche con cintura di supporto.

CARATTERISTICHE

- Costruito con doppia struttura per garantire grandi efficacia e comfort
- Il bordo superiore in silicone medicale anallergico assicura una forte tenuta del bracciale in posizione ed evita il suo scivolamento
- Realizzato in cotone, ha elevate capacità di traspirazione e termoregolazione e alta tolleranza cutanea
- Indosso confortevole, vestibilità perfetta

INDICAZIONI

I CLASSE (18 - 21 mmHg)

II CLASSE (23 - 32 mmHg)

Tattamento del linfedema primario e secondario dell'arto superiore in stadio 1, trombosi venosa del braccio e della spalla, edema post-operatorio e post-traumatico.

CONTROINDICAZIONI

Linfagite o erisipela in fase acuta, lesioni cutanee secernenti, infezioni, nota allergia da contatto a tutori elastici.

DURATA DEL TRATTAMENTO

Usualmente il trattamento compressivo deve essere effettuato solo nelle ore diurne. Il segmento deve essere indossato al mattino prima di alzarsi e tolto la sera. Si raccomanda durante il giorno di esercitare l'arto.

COMPOSIZIONE

Ccl. 1: poliammide 53%, cotone 26%, elastan 21%.

Ccl. 2: poliammide 53%, elastan 25%, cotone 22%.

COMPRESSIONE

Ccl. 1 18-21 mmHg

Ccl. 2 23-32 mmHg



COLORI

739 beige



862 nero



VARISAN® GUANTO SEAMLESS

Linea linfologica

Guanto terapeutico senza cuciture - standard




TRAMA CIRCOLARE




TUTORI STANDARD

TUTORI STANDARD					
CIRCONFERENZA (cm)					
Taglia	XS	S	M	L	XL
A	16 - 18	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26
B	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27
C	15 - 16,5	16,5 - 18	18 - 19,5	19,5 - 21	21 - 23

TUTORI STANDARD	
LUNGHEZZA (cm)	
AB	3 - 5
AC	9 - 12

TUTORI STANDARD		
CLASSE DI COMPRESSIONE		
REF.	Ccl 2	ARTICOLO
	23 - 32 mmHg	
	6A443	Guanto con dita (CZ)

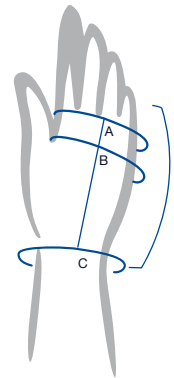

VARISAN® GUANTO SEAMLESS

Linea linfologica

Guanto terapeutico senza cuciture - standard



CARATTERISTICHE

La linea guanti VARISAN® TOP è realizzata in 5 taglie, in tessuto sintetico seamless.

INDICAZIONI

II CLASSE (23 - 32 mmHg)

Trattamento dei linfedemi dell'arto superiore, mantenimento dei risultati ottenuti con adeguato trattamento dei linfedemi dell'arto superiore e della mano.

CONTROINDICAZIONI

Linfagite o erisipela in fase acuta, lesioni cutanee secernenti, infezioni, nota allergia da contatto a tutori elastici.

COMPOSIZIONE

Poliammide 81%, elasthan 19%.



COMPRESSIONE

Ccl. 2 23-32 mmHg



COLORI

739 beige



TRASPIRABILITÀ

Sweet
compress


CIZETA

Linea linfologica
Autobendaggio per la terapia dell'edema
Arto superiore - standard



ARTO SUPERIORE					
CIRCONFERENZA (cm)					
Taglia	XS	S	M	L	XL
Punti di misurazione					
cG	27-29,5	29,5-32	32-35	35-38,5	38,5-42
cE	24-26	26-28,5	28,5-31	31-34	34-37
cC	15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-21	21-23

TUTORI STANDARD		
REF.	CODICE	ARTICOLO
	TNGA0	Bracciale al metacarpo (AG) Include: - inserto pad mano - imbottitura cavo gomito

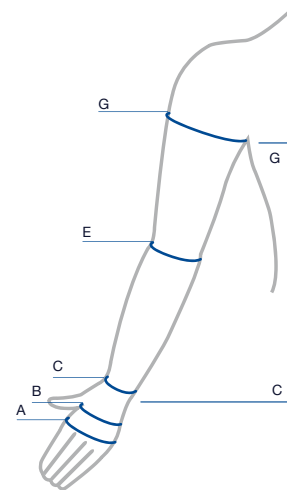

ACCESSORI		
REF.	CODICE	ARTICOLO
	TNCZ0	Pad Mano
	TNPR1	Imbottitura cavo gomito



Prodotti con cotone a contatto con la pelle



Linea linfologica
Autobendaggio per la terapia dell'edema
Arto superiore - standard



SWEETCompress® è il bendaggio specifico per la terapia dell'edema pensato per supportare il paziente nella gestione autonoma del trattamento della patologia. La sua particolare struttura in schiuma di poliuretano a cellule aperte rivestita da uno strato esterno in cotone, rende questa tipologia di autobendaggio altamente confortevole.

Il prodotto è versatile e può essere utilizzato come:

- Autobendaggio, in alternanza al tutore compressivo
- Sottobendaggio, in combinazione con le bende a corta estensibilità, in alternativa alle classiche imbottiture.

CARATTERISTICHE

- Le cuciture verticali, inserite su tutta la lunghezza, facilitano il drenaggio del liquido linfatico
- Il tessuto esterno in cotone bielastico permette al prodotto di adattarsi perfettamente all'arto interessato dal trattamento
- Le cuciture a zig zag presenti nella parte superiore permettono di tagliare il prodotto e regolarne l'altezza in base alle esigenze del paziente
- Particolarmente traspirante grazie allo strato interno in schiuma di poliuretano a cellule aperte
- Il rivestimento esterno in cotone a contatto con la pelle garantisce delicatezza e morbidezza

INDICAZIONI

Linfedema primario e secondario.
Flebedema.

Edema post-traumatico o post-operatorio.

CONTROINDICAZIONI

Immobilità/grave ipomobilità, infezioni cutanee in fase acuta, dermatiti essudative, dermoipodermi in forma acuta, malattie degli arti inferiori non di origine veno-linfatica, edemi non di origine venosa (dismetabolici, diabetici, renali, cardiaci, endocrini...) in fase acuta o non diagnosticati, noti precedenti di allergia da contatto a calze compressive medicali e loro componenti, anomalie anatomiche congenite/acquisite (salvo che per eventuale uso di tutori su misura).

Prima dell'indosso, procedere con la medicazione di eventuali ferite aperte presenti nell'area da trattare.

COMPOSIZIONE

Strati esterni: cotone 93%, elastan 7%.

Strato interno: schiuma poliuretanic PU 100%.



TRASPIRABILITÀ



DELICATEZZA



COLORI

161 bianco




Sweet
compress



CIZETA

Linea linfologica
Autobendaggio per la terapia dell'edema
Arto superiore - su misura



TUTORI SU MISURA

TUTORI SU MISURA		
REF.	CODICE	ARTICOLO
	TNGAC	Bracciale al metacarpo (AG) Include: - inserto pad mano - imbottitura cavo gomito

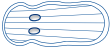ACCESSORI		
REF.	CODICE	ARTICOLO
	TNCZ0	Pad Mano
	TNPR1	Imbottitura cavo gomito

Prodotti con cotone a contatto con la pelle





SWEETCompress® è il bendaggio specifico per la terapia dell'edema pensato per supportare il paziente nella gestione autonoma del trattamento della patologia. La sua particolare struttura in schiuma di poliuretano a cellule aperte rivestita da uno strato esterno in cotone, rende questa tipologia di autobendaggio altamente confortevole.

Il prodotto è versatile e può essere utilizzato come:

- Autobendaggio, in alternanza al tutore compressivo
- Sottobendaggio, in combinazione con le bende a corta estensibilità, in alternativa alle classiche imbottiture

CARATTERISTICHE

- Le cuciture verticali, inserite su tutta la lunghezza, facilitano il drenaggio del liquido linfatico
- Il tessuto esterno in cotone bielastico permette al prodotto di adattarsi perfettamente all'arto interessato dal trattamento
- Le cuciture a zig zag presenti nella parte superiore permettono di tagliare il prodotto e regolarne l'altezza in base alle esigenze del paziente
- Particolarmente traspirante grazie allo strato interno in schiuma di poliuretano a cellule aperte
- Il rivestimento esterno in cotone a contatto con la pelle garantisce delicatezza e morbidezza

INDICAZIONI

Linfedema primario e secondario.
Flebedema.

Edema post-traumatico o post-operatorio.

CONTROINDICAZIONI

Immobilità/grave ipomobilità, infezioni cutanee in fase acuta, dermatiti essudative, dermoipodermi in forma acuta, malattie degli arti inferiori non di origine veno-linfatica, edemi non di origine venosa (dismetabolici, diabetici, renali, cardiaci, endocrini...) in fase acuta o non diagnosticati, noti precedenti di allergia da contatto a calze compressive medicali e loro componenti, anomalie anatomiche congenite/acquisite (salvo che per eventuale uso di tutori su misura).

Prima dell'indosso, procedere con la medicazione di eventuali ferite aperte presenti nell'area da trattare.

COMPOSIZIONE

Strati esterni: cotone 93%, elastan 7%.

Strato interno: schiuma poliuretanic PU 100%.



TRASPIRABILITÀ



DELICATEZZA



COLORI

161 bianco



VARISAN® FLAT

Linea linfologica

Calze compressive medicali trama piatta - standard




TRAMA PIATTA






TUTORI STANDARD

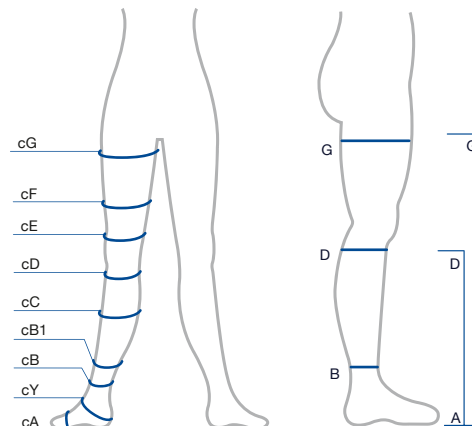TUTORI STANDARD						
CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia	4	6	8	10	12	14
Punti di misurazione						
cG	44-48	47-51	50-55	54-59	58-63	62-68
cF	41-45	43-47	46-50	49-53	51-56	55-60
cE	32-35	34-37	36-39,5	39-42	41-45	44-48
cD	28-30,5	30-33	32,5-35,5	35-38,5	38-41,5	41-45
cC	30-33	32-35	34,5-37,5	37-40,5	40-44	43-47
cB1	23-25	25-27	27-29,5	29,5-32	32-35	35-38
cB	18,5-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
cY	28-30,5	30-33	32-35	34-37	36-39	38-41
cA	18,5-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30



TUTORI STANDARD		
LUNGHEZZA (cm)		
	Corto	Normale
AD	35 - 39	40 - 45
AG	64 - 71	72 - 80

TUTORI STANDARD			
CLASSE DI COMPRESSIONE			
REF.	Ccl 2	Ccl 2 STRONG	ARTICOLO
	23 - 32 mmHg	23 - 32 mmHg	
punta aperta 	FL4E1	SL4E1	Gambaletto (AD) corto
	FL4N1	SL4N1	Gambaletto (AD) normale
punta aperta 	FB4E1		Gambaletto autoreggente (ADH) corto
	FB4N1		Gambaletto autoreggente (ADH) normale
punta aperta 	FL4E9	SL4E9	Calza autoreggente (AGH) corto
	FL4N9	SL4N9	Calza autoreggente (AGH) normale



VARISAN® FLAT

Linea linfologica

Calze compressive medicali trama piatta - standard



Trama piatta di alta qualità, prodotta in Italia, con un servizio di consulenza di pre/post vendita che garantisce la perfetta conformità del prodotto alle esigenze del cliente e la massima personalizzazione.

CARATTERISTICHE

La linea VARISAN® FLAT è certificata RAL. Questa tipologia di prodotto, realizzato in trama piatta, è specificatamente dedicata alle patologie linfatiche, con lo scopo di mantenere i risultati ottenuti con il trattamento decongestivo (infodrenaggio manuale+bendaggio).

INDICAZIONI

II CLASSE (23 - 32 mmHg)

II CLASSE STRONG (23 - 32 mmHg)

Tattamento del linfedema, del fleboedema, del flebolinfedema, del lipedema, delle ulcere venose, delle ulcere arteriopatiche (con Indice Caviglia – Braccio (ABI) >0.8), delle ulcere miste, delle ulcere linfostatiche.

CONTROINDICAZIONI

Arteriopatie ostruttive (con Indice Caviglia – Braccio (ABI) <0.5).

Gravi neuropatie (mancanza di feedback sensitivo con possibili danni ischemici). Insufficienza cardiaca non compensata. Fibromialgia reumatica.

COMPOSIZIONE

Ccl. 2: poliammide 75%, elastan 25%.

Ccl. 2 Strong: poliammide 75%, elastan 25%.

COMPRESSIONE

Ccl. 2 23-32 mmHg

Ccl. 2 STRONG 23-32 mmHg



COLORI

106 avorio

604 avana*

112 sabbia

420 corallo

440 carminio

450 fucsia

545 blu navy

535 bluette

608 verde bosco

820 grigio

862 nero



AMPIA GAMMA



SILICONE MEDICALE ANALLERGICO



TRASPIRABILITÀ



PIEDE COMFORT

*colore standard
altri colori disponibili a richiesta

VARISAN® FLAT

Linea linfologica

Calze compressive medicali trama piatta - su misura



TUTORI SU MISURA						
CLASSE DI COMPRESSIONE						
REF.	Ccl 1	Ccl 2	Ccl 2 STRONG	Ccl 3	Ccl 4	ARTICOLO
	18 - 21 mmHg	23 - 32 mmHg	23 - 32 mmHg	34 - 46 mmHg	> 49 mmHg	
punta aperta 	FL1AD	FL2AD	SL2AD	FL3AD	FL4AD	Gambaletto (AD)
punta aperta 	FL1AG	FL2AG	SL2AG	FL3AG	FL4AG	Calza autoreggente (AGH)
punta aperta 	FL1AGT	FL2AGT	SL2AGT	FL3AGT	FL4AGT	Monocollant (AGTL-AGTR)
	FL1FT	FL2FT	SL2FT	FL3FT	FL4FT	Pantaloncini (FT-ET)
punta aperta 	FL1ATF	FL2ATF	SL2ATF	FL3ATF	FL4ATF	Mezzo collant (ATF)
	FL1CT	FL2CT	SL2CT	FL3CT		Corsaro (CT-DT)
	FL1BT	FL2BT	SL2BT	FL3BT		Leggings (BT)
punta aperta 	FL1AT	FL2AT	SL2AT	FL3AT	FL4AT	Collant (AT)
	FL1C4	FL2C4	SL2C4			Calotta 4 dita
	FL1C5	FL2C5	SL2C5			Calotta 5 dita

TUTORI SU MISURA		
OPZIONI		
	OPZ0000	Inserito pad
	OPZ0001	Punta aperta
	OPZ0005	Punta chiusa
	OPZ0010	Piede obliquo

TUTORI SU MISURA		
OPZIONI		
	OPZ0015	Piede dritto
	OPZ0016	Collo del piede comfort
	OPZ0020	Ginocchio flessio
	OPZ0025	Ginocchio dritto
	OPZ0030	Ginocchio comfort
	OPZ0035	Bordo superiore gambaletto obliquo
	OPZ0040	Coscia obliqua
	OPZ0045	Coscia dritta
	OPZ0050	Balza siliconata H 35 mm
	OPZ0051	Bretelle di sostegno
	OPZ0052	Balza siliconata interna
	OPZ0055	Monocollant con silicone fianchi e coscia
	OPZ0056	Monocollant anatomico
	OPZ0060	Girovita in tessuto elastico
	OPZ0065	Elastico panty regolabile
	OPZ0070	Panty uomo
	OPZ0071	Panty gestante
	OPZ0072	Panty apertura donna
	OPZ0074	Apertura stomia
	OPZ0075	Panty con tassello traspirante
	OPZ0076	Tassello microfibra protettivo
	OPZ0077	Alleggerimento in microfibra
	OPZ0080	Cerniera
	OPZ0085	Cinto scrotale
	OPZ0086	Sacca scrotale
	OPZ0090	Tallone sagomato
	OPZ0095	Tallone standard
	OPZ0099	Supporti malleolari protettivi
	OPZ0100	Fettuccia soft per dita
	OPZ0150	Balza siliconata H 50 mm
	OPZ9999	Colore

VARISAN® FLAT

Linea linfologica

Calze compressive medicali trama piatta - su misura



CARATTERISTICHE

La linea VARISAN® FLAT è certificata RAL. Questa tipologia di prodotto, realizzato in trama piatta, è specificatamente dedicata alle patologie linfatiche, con lo scopo di mantenere i risultati ottenuti con il trattamento decongestivo (infodrenaggio manuale+bendaggio).

INDICAZIONI

I CLASSE (18 - 21 mmHg)

II CLASSE (23 - 32 mmHg)

II CLASSE STRONG (23 - 32 mmHg)

III CLASSE (34 - 46 mmHg)

IV CLASSE (>49 mmHg)

Trattamento del linfedema, del fleboedema, del flebolinfedema, delle ulcere venose, delle ulcere arteriopatiche (con Indice Caviglia – Braccio (ABI) >0.8), delle ulcere miste, delle ulcere linfostatiche.

CONTROINDICAZIONI

Arteriopatie ostruttive (con Indice Caviglia – Braccio (ABI) <0.5).

Gravi neuropatie (mancanza di feedback sensitivo con possibili danni ischemici). Insufficienza cardiaca non compensata. Fibromialgia reumatica.

COMPOSIZIONE

Ccl. 1: poliammide 80%, elastan 20%.

Ccl. 2: poliammide 75%, elastan 25%.

Ccl. 2 Strong: poliammide 75%, elastan 25%.

Ccl. 3: poliammide 80%, elastan 20%.

Ccl. 4: poliammide 65%, elastan 35%.

COMPRESSIONE

Ccl. 1 18-21 mmHg

Ccl. 2 23-32 mmHg

Ccl. 2 STRONG 23-32 mmHg

Ccl. 3 34-46 mmHg

Ccl. 4 > 49 mmHg



COLORI

106 avorio

604 avana*

112 sabbia

420 corallo

440 carminio

450 fucsia

545 blu navy

535 bluette

608 verde bosco

820 grigio

862 nero



SILICONE MEDICALE ANALLERGICO



PIEDE COMFORT



TRASPIRABILITÀ

*colore standard
altri colori disponibili a richiesta

VARISAN® FLAT KIDS

Linea linfologica










Calze compressive medicali trama piatta - su misura



TRAMA PIATTA



TUTORI SU MISURA

TUTORI SU MISURA			
CLASSE DI COMPRESSIONE			
REF.	Ccl 1	Ccl 2	ARTICOLO
	18 - 21 mmHg	23 - 32 mmHg	
punta aperta 	FL1AD	FL2AD	Gambaletto (AD)
punta aperta 	FL1AG	FL2AG	Calza autoreggente (AGH)
punta aperta 	FL1AGT	FL2AGT	Monocollant (AGTL-AGTR)
	FL1FT	FL2FT	Pantaloncini (FT-ET)
punta aperta 	FL1ATF	FL2ATF	Mezzo collant (ATF)
	FL1CT	FL2CT	Corsaro (CT-DT)
	FL1BT	FL2BT	Leggings (BT)
punta aperta 	FL1AT	FL2AT	Collant (AT)
	FL1C4	FL2C4	Calotta 4 dita
	FL1C5	FL2C5	Calotta 5 dita

TUTORI SU MISURA		
OPZIONI		
	OPZ0000	Inserto pad
	OPZ0001	Punta aperta
	OPZ0005	Punta chiusa
	OPZ0010	Piede obliquo
	OPZ0015	Piede dritto
	OPZ0016	Collo del piede comfort
	OPZ0020	Ginocchio flessio
	OPZ0025	Ginocchio dritto
	OPZ0030	Ginocchio comfort
	OPZ0035	Bordo superiore gambaletto obliquo
	OPZ0040	Coscia obliqua
	OPZ0045	Coscia dritta
	OPZ0050	Balza siliconata H 35 mm
	OPZ0052	Balza siliconata interna
	OPZ0055	Monocollant con silicone fianchi e coscia
	OPZ0060	Girovita in tessuto elastico
	OPZ0065	Elastico panty regolabile
	OPZ0070	Panty uomo
	OPZ0072	Panty apertura donna
	OPZ0076	Tassello microfibra protettivo
	OPZ0090	Tallone sagomato
	OPZ0095	Tallone standard
	OPZ0099	Supporti malleolari protettivi
	OPZ0100	Fettuccia soft per dita
	OPZ0150	Balza siliconata H 50 mm
	OPZ9999	Colore

VARISAN® FLAT KIDS

Linea linfologica

Calze compressive medicali trama piatta - su misura



CARATTERISTICHE

La linea VARISAN® FLAT KIDS è certificata RAL. Questa tipologia di prodotto, realizzato in trama piatta, è specificatamente dedicata alle patologie linfatiche, con lo scopo di mantenere i risultati ottenuti con il trattamento decongestivo (infodrenaggio manuale + bendaggio).

L'ampia gamma di colori disponibili permette di personalizzare il tutore secondo i gusti del bambino. Inoltre, è possibile aggiungere alla trama: nome, disegni, smiley, supereroe preferito e molto altro ancora.

INDICAZIONI

I CLASSE (18 - 21 mmHg)

II CLASSE (23 - 32 mmHg)

Trattamento del linfedema, del fleboedema, del flebolinfedema, delle ulcere venose, delle ulcere arteriopatiche (con Indice Caviglia – Braccio (ABI) >0.8), delle ulcere miste, delle ulcere linfostatiche.

CONTROINDICAZIONI

Arteriopatie ostruttive (con Indice Caviglia – Braccio (ABI) <0.5).

Gravi neuropatie (mancanza di feedback sensitivo con possibili danni ischemici). Insufficienza cardiaca non compensata. Fibromialgia reumatica.

COMPOSIZIONE

Ccl. 1: poliammide 80%, elastan 20%.

Ccl. 2: poliammide 75%, elastan 25%.

COMPRESSIONE

Ccl. 2 23-32 mmHg

Ccl. 2 STRONG 23-32 mmHg



COLORI

106 avorio

604 avana*

112 sabbia

420 corallo

440 carminio

450 fucsia

545 blu navy

535 bluette

608 verde bosco

820 grigio

862 nero



*colore standard
altri colori disponibili a richiesta

Sweet
compress

CIZETA


Linea linfologica
Autobendaggio per la terapia dell'edema
Arto inferiore - standard



ARTO INFERIORE						
CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia	4	6	8	10	12	14
Punti di misurazione						
cG	44-48	47-51	50-55	54-59	58-63	62-68
cF	41-45	43-47	46-50	49-53	51-56	55-60
cE	32-35	34-37	36-39,5	39-42	41-45	44-48
cD	28-30,5	30-33	32,5-35,5	35-38,5	38-41,5	41-45
cC	30-33	32-35	34,5-37,5	37-40,5	40-44	43-47
cB1	23-25	25-27	27-29,5	29,5-32	32-35	35-38
cB	18,5-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
cY	28-30,5	30-33	32-35	34-37	36-39	38-41
cA	18,5-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30

TUTORI STANDARD		
REF.	CODICE	ARTICOLO
	TNAD1	Gambaletto (AD)
	TNAG4	Calza con coscia (AG) Include: - pelotte retromalleolari - imbottitura cavo popliteo

ACCESSORI		
REF.	CODICE	ARTICOLO
	TNPRO	Imbottitura cavo popliteo
	TNSMO	Pelotte retromalleolari

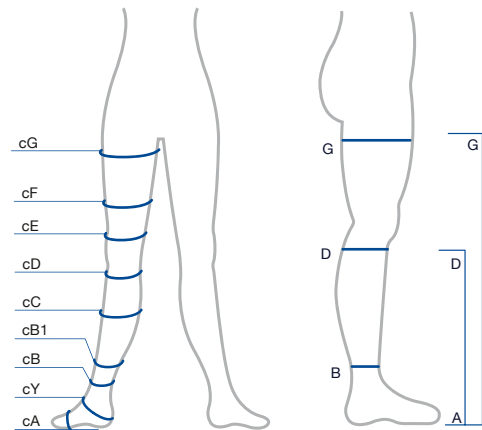

Prodotti con cotone a contatto con la pelle



Sweet
compress
CIZETA

Linea linfologica
Autobendaggio per la terapia dell'edema
Arto inferiore - standard



SWEETCompress® è il bendaggio specifico per la terapia dell'edema pensato per supportare il paziente nella gestione autonoma del trattamento della patologia. La sua particolare struttura in schiuma di poliuretano a cellule aperte rivestita da uno strato esterno in cotone, rende questa tipologia di autobendaggio altamente confortevole.

Il prodotto è versatile e può essere utilizzato come:

- Autobendaggio, in alternanza al tutore compressivo
- Sottobendaggio, in combinazione con le bende a corta estensibilità, in alternativa alle classiche imbottiture

CARATTERISTICHE

- Le cuciture verticali, inserite su tutta la lunghezza, facilitano il drenaggio del liquido linfatico
- Il tessuto esterno in cotone bielastico permette al prodotto di adattarsi perfettamente all'arto interessato dal trattamento
- Le cuciture a zig zag presenti nella parte superiore permettono di tagliare il prodotto e regolare l'altezza in base alle esigenze del paziente
- Particolarmente traspirante grazie allo strato interno in schiuma di poliuretano a cellule aperte
- Il rivestimento esterno in cotone a contatto con la pelle garantisce delicatezza e morbidezza

INDICAZIONI

Linfedema primario e secondario.
Flebedema.

Edema post-traumatico o post-operatorio.

CONTROINDICAZIONI

Immobilità/grave ipomobilità, infezioni cutanee in fase acuta, dermatiti essudative, dermoipodermi in forma acuta, malattie degli arti inferiori non di origine veno-linfatica, edemi non di origine venosa (dismetabolici, diabetici, renali, cardiaci, endocrini...) in fase acuta o non diagnosticati, noti precedenti di allergia da contatto a calze compressive medicali e loro componenti, anomalie anatomiche congenite/acquisite (salvo che per eventuale uso di tutori su misura).

Prima dell'indosso, procedere con la medicazione di eventuali ferite aperte presenti nell'area da trattare.

COMPOSIZIONE

Strati esterni: cotone 93%, elastan 7%.

Strato interno: schiuma poliuretanic PU 100%.



TRASPIRABILITÀ



DELICATEZZA



STANDARD
100
074156.0
CENTROCOT

COLORI

161 bianco



Sweet
compress

CIZETA

Linea linfologica
Autobendaggio per la terapia dell'edema
Arto inferiore - su misura



TUTORI SU MISURA

TUTORI SU MISURA		
REF.	CODICE	ARTICOLO
	TNADC	Gambaletto (AD) Include: - pelotte retromalleolari
	TNAGC	Calza con coscia (AG) Include: - pelotte retromalleolari - imbottitura cavo popliteo

ACCESSORI		
REF.	CODICE	ARTICOLO
	TNPRO	Imbottitura cavo popliteo
	TNSM0	Pelotte retromalleolari

Prodotti con cotone a contatto con la pelle



Sweet
compress
CIZETA

Linea linfologica
Autobendaggio per la terapia dell'edema
Arto inferiore - su misura



SWEETCompress® è il bendaggio specifico per la terapia dell'edema pensato per supportare il paziente nella gestione autonoma del trattamento della patologia. La sua particolare struttura in schiuma di poliuretano a cellule aperte rivestita da uno strato esterno in cotone, rende questa tipologia di autobendaggio altamente confortevole.

Il prodotto è versatile e può essere utilizzato come:

- Autobendaggio, in alternanza al tutore compressivo
- Sottobendaggio, in combinazione con le bende a corta estensibilità, in alternativa alle classiche imbottiture

CARATTERISTICHE

- Le cuciture verticali, inserite su tutta la lunghezza, facilitano il drenaggio del liquido linfatico
- Il tessuto esterno in cotone bielastico permette al prodotto di adattarsi perfettamente all'arto interessato dal trattamento
- Le cuciture a zig zag presenti nella parte superiore permettono di tagliare il prodotto e regolare l'altezza in base alle esigenze del paziente
- Particolarmente traspirante grazie allo strato interno in schiuma di poliuretano a cellule aperte
- Il rivestimento esterno in cotone a contatto con la pelle garantisce delicatezza e morbidezza

INDICAZIONI

Linfedema primario e secondario.

Flebedema.

Edema post-traumatico o post-operatorio.

CONTROINDICAZIONI

Immobilità/grave ipomobilità, infezioni cutanee in fase acuta, dermatiti essudative, dermoipodermi in forma acuta, malattie degli arti inferiori non di origine veno-linfatica, edemi non di origine venosa (dismetabolici, diabetici, renali, cardiaci, endocrini...) in fase acuta o non diagnosticati, noti precedenti di allergia da contatto a calze compressive medicali e loro componenti, anomalie anatomiche congenite/acquisite (salvo che per eventuale uso di tutori su misura).

Prima dell'indosso, procedere con la medicazione di eventuali ferite aperte presenti nell'area da trattare.

COMPOSIZIONE

Strati esterni: cotone 93%, elastan 7%.

Strato interno: schiuma poliuretanic PU 100%.



TRASPIRABILITÀ



DELICATEZZA



COLORI


161 bianco



Individuazione punti per presa misura Arto superiore


Paziente seduto con dorso avambraccio su piano rigido (mano verso l'alto)

Individuare e segnare sulla cute (nella parte centrale dell'arto) i punti da misurare.
Rilevare prima tutte le lunghezze, a seguire rilevare le circonferenze.

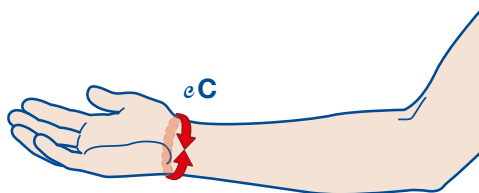

STEP 1 Punto eC


Circonferenza al polso, all'altezza dello stiloide.

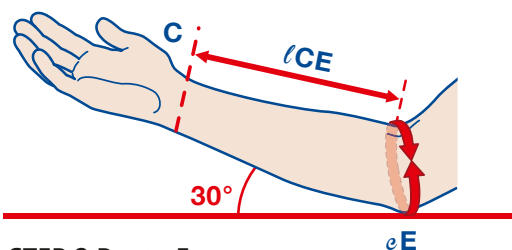

STEP 2 Punto E

Lunghezza lCE: rilevare dal punto C al punto E, con metro a contatto con l'arto.


Circonferenza eE: rilevare sulla plica del gomito, con gomito flesso a 30°.

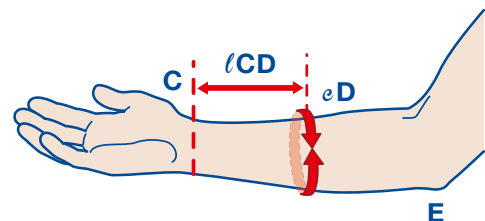

STEP 3 Punto D

Lunghezza lCD: rilevare dal punto C al punto D (a metà tra il punto C e il punto E), con metro a contatto con l'arto.

Circonferenza eD: punto D (a metà tra il punto C e il punto E).

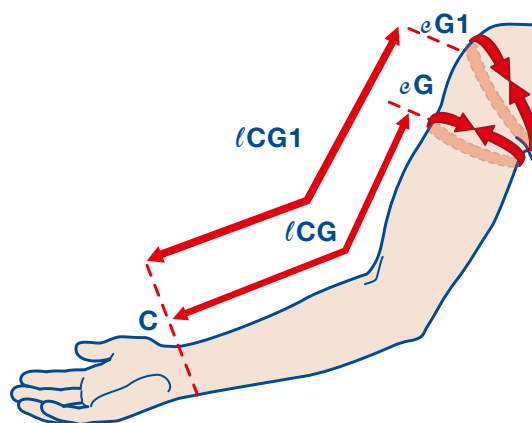


STEP 4 Punto G

Lunghezza lCG: rilevare a circa 1cm sotto l'ascella, con metro a contatto con l'arto.

Lunghezza lCG1: +3cm sopra il punto G (mai oltre i 5cm).

Circonferenza eG: rilevare a circa 1cm sotto l'ascella.

Circonferenza eG1: rilevare a +3cm sopra il punto G (mai oltre i 5cm).

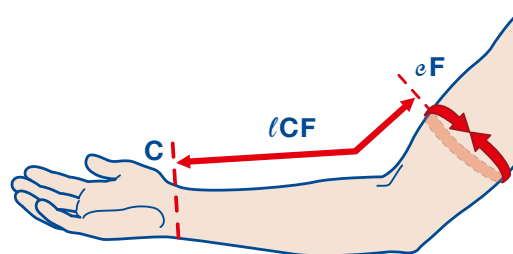

STEP 5 Punto F

Lunghezza lCF: rilevare dal punto C al punto F (a metà tra il punto E e il punto G) con metro a contatto con l'arto.


Circonferenza eF: punto F (a metà tra il punto E e il punto G).

Indicazioni per le opzioni

LEGENDA

e = Circonferenze


l = Lunghezze

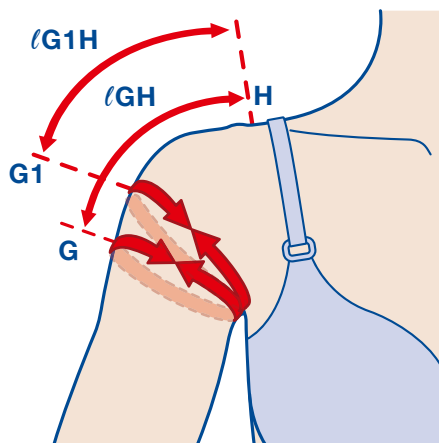

STEP 6 Punto H

Posizionato sopra al punto G/G1, in corrispondenza della spallina del reggiseno e/o canotta.

Lunghezza l_{GH} / l_{G1H} : questa lunghezza è necessaria per l'opzione bracciale con spallina.

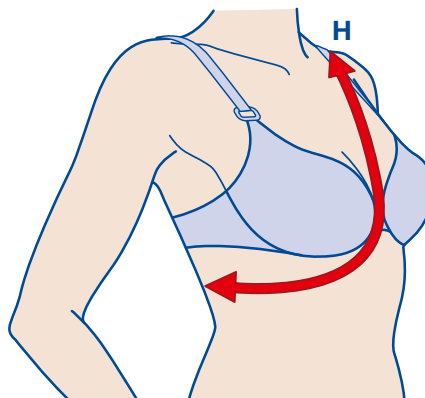


STEP 7 Opzione cinturino regolabile

Misurare dal punto H con il metro posizionato come in figura.


Individuazione punti per presa misura Mano

Rilevare la circonferenza senza stringere il metro (misura corporale)

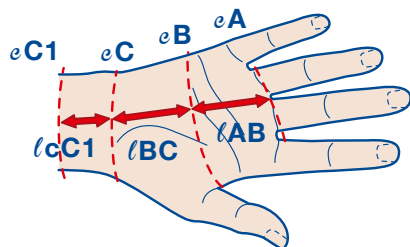

STEP 1 Lunghezze

Rilevare centralmente Punto l_{AB} , Punto l_{BC} , Punto l_{cC1} , come in figura.

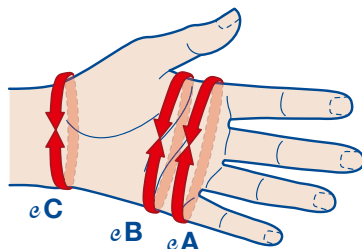


STEP 2 Circonferenza

Punto e_C : al polso, all'altezza dello stiloide.

Punto e_B : alla radice del pollice.


Punto e_A : alla testa del 5°metacarpo.

Punto e_{C1} : a +5cm da C.

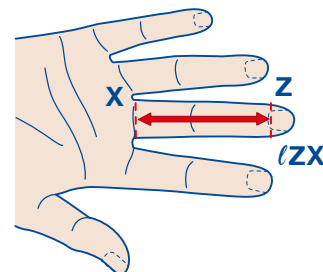

STEP 3 Lunghezza ZX


Rilevare le lunghezze l_{ZX} in ogni dito, centralmente come in figura.

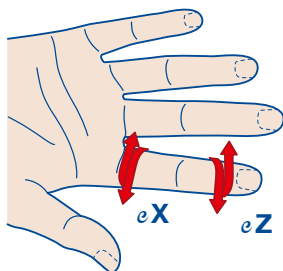

STEP 4

Rilevare per ogni dito la circonferenza e_X alla base delle dita e la circonferenza e_Z al margine inferiore dell'unghia.


Pollice: rilevare la circonferenza e_X alla base del dito (**NO in diagonale**, vedi figura).

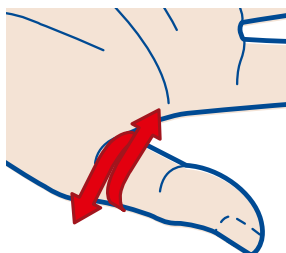

Per l'individuazione dei punti A, Y, B, B1, C, D, E ed F, distendere il paziente sul lettino.


Individuare sulla cute i punti da misurare, segnarli sul lato esterno della gamba per facilitare la misurazione delle lunghezze. Per individuare le lunghezze far aderire il metro all'arto. Si consiglia di rilevare prima tutte le lunghezze, a seguire rilevare le circonferenze.

Il piede deve essere mantenuto inclinato a 90° per tutte le misurazioni.

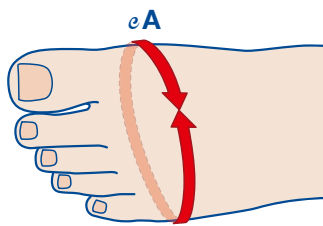


STEP 1 Punto eA

Circonferenza alla base delle dita. Applicare il metro intorno alla giuntura metatarso falangea.

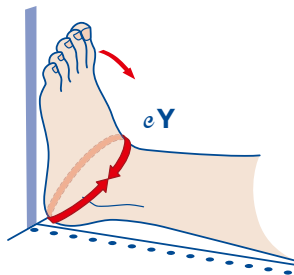


STEP 2 Punto eY

Circonferenza dal margine inferiore del tallone al collo del piede.

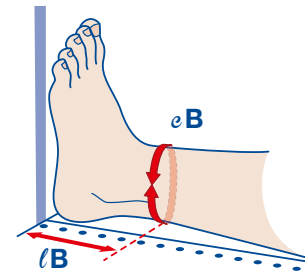


STEP 3 Punto eB

Circonferenza del punto più stretto individuabile sopra i malleoli.

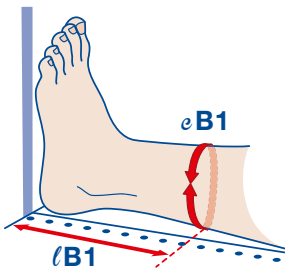


STEP 4 Punto eB1

Circonferenza alla base del polpaccio (base del tendine d'Achille).

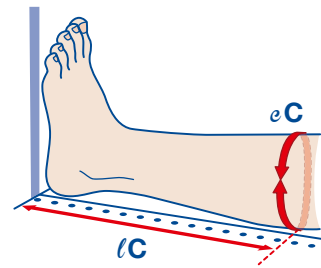


STEP 5 Punto eC

Circonferenza del punto più voluminoso del polpaccio.

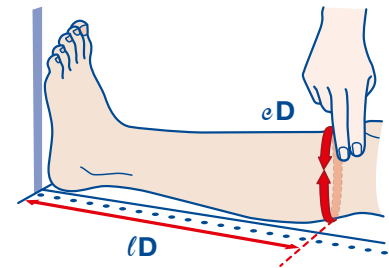


STEP 6 Punto eD

Circonferenza in corrispondenza della protusione tibiale e/o testa del perone.

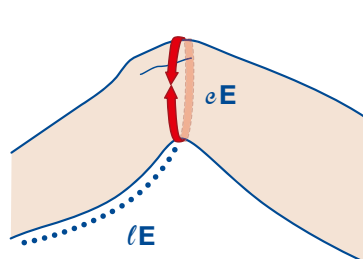

STEP 7 Punto eE


Circonferenza in corrispondenza del punto centrale della rotula, con ginocchio flessa a 30°.

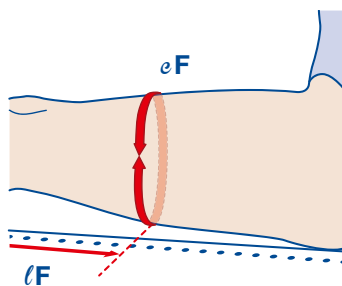

STEP 8 Punto eF


Circonferenza a metà tra il punto E il punto G.

Paziente in posizione eretta

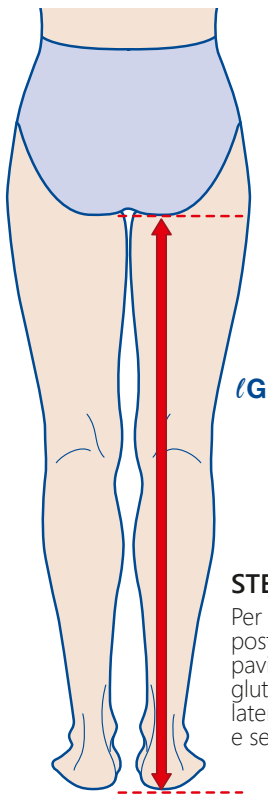


STEP 1 Punto lG

Per l'altezza, misurare posteriormente dal pavimento alla plica glutea. Proiettare lateralmente il punto e segnarlo.

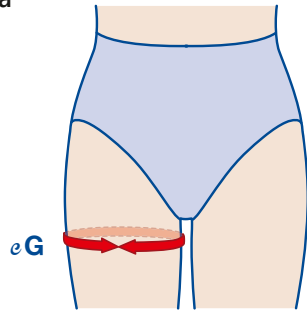


STEP 2 Punto eG

Il punto G viene individuato nel margine inferiore della plica glutea.

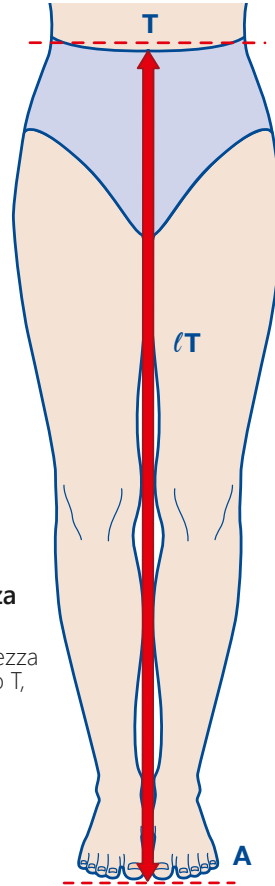


STEP 3 Lunghezza anteriore lT

Individuare la lunghezza dal punto A al punto T, come da figura.

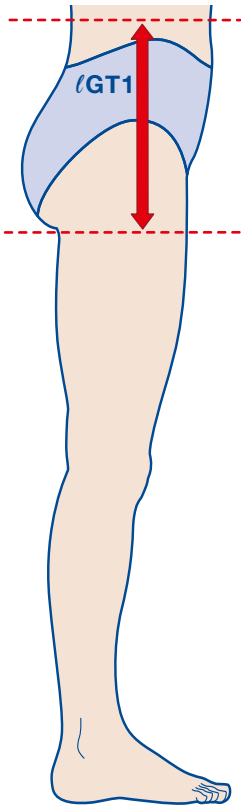


**STEP 4 Punto lGT1
Solo per Monocollant**

Misurare la lunghezza lateralmente dal punto G al punto T.

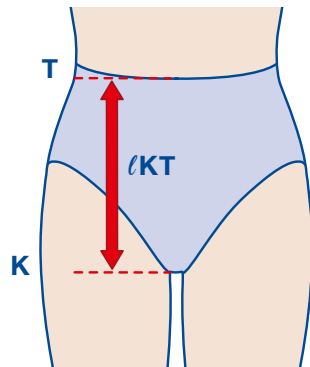


STEP 5 Lunghezza anteriore lKT

Individuare il punto K come da figura. Misurare la lunghezza dal punto K al punto T.

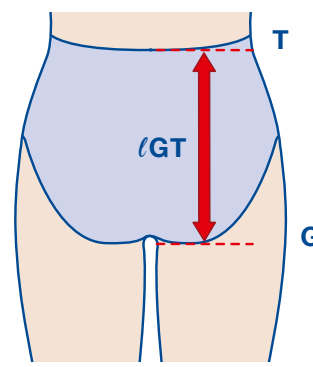


STEP 6 Lunghezza posteriore lGT

Misurare la lunghezza dal punto G (plica glutea) al punto T. Il metro deve seguire il contorno anatomico del gluteo.

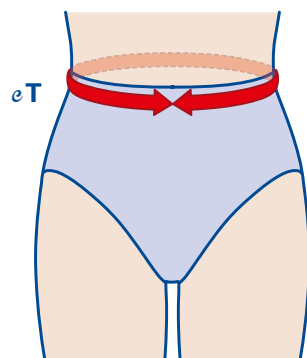


STEP 7 Punto eT

Misurare la circonferenza della vita nel punto in cui si vuole far terminare il margine del panty.

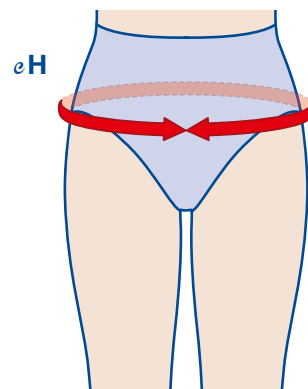


STEP 8 Punto eH

Circonferenza nel punto più largo del bacino.

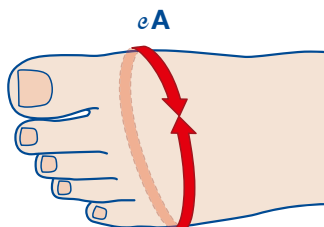


STEP 1 Punto eA

Circonferenza alla base delle dita.
Applicare il metro intorno alla giuntura metatarso falangea.

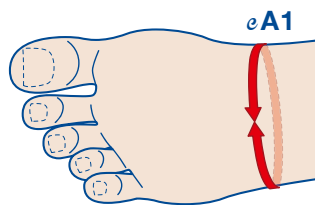


STEP 2 Punto eA1

Circonferenza nel punto in cui si desidera far terminare la calotta.

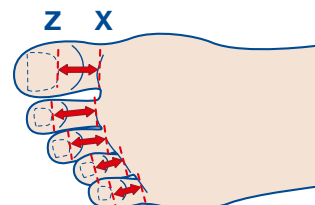

STEP 3 Lunghezza XZ

Proiettare il margine inferiore dell'unghia sulla pianta del piede. Misurare quindi la lunghezza dal punto X al punto Z.

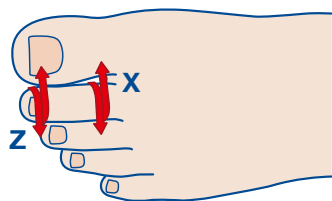

STEP 4

Rilevare circonferenza punto Z e circonferenza punto X per ogni dito.




STEP 5

Lunghezza mediale e laterale dall'origine fino al punto in cui si vuol far terminare.

LEGENDA


C = Circonferenze

l = Lunghezze

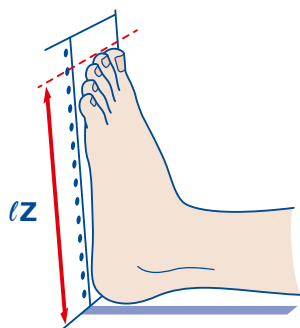Indicazioni per le opzioni


cod. OPZ0005
Solo per punta chiusa
Lunghezza **lZ**

Misurare la lunghezza dal tallone all'estremità del dito più lungo.

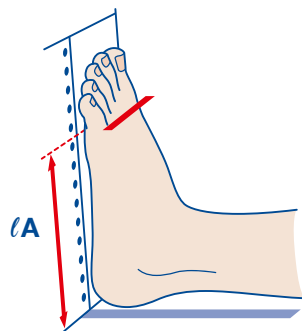


cod. 0001
Per punta chiusa dritta e per punta aperta dritta
Lunghezza **lA**

Misurare la lunghezza dal tallone alla giuntura metatarso falangea del quinto dito.

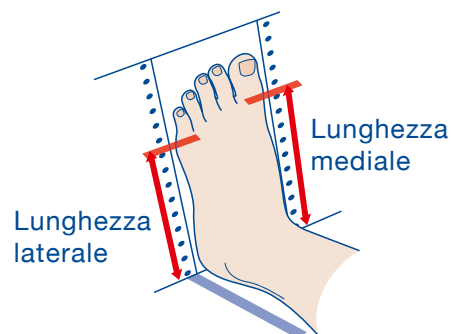


cod. OPZ0010
Per punta chiusa obliqua e per punta aperta obliqua

Misurare la lunghezza mediale (dal tallone alla giuntura metatarso falangea del primo dito) e misurare la lunghezza laterale (dal tallone alla giuntura metatarso falangea del quinto dito).

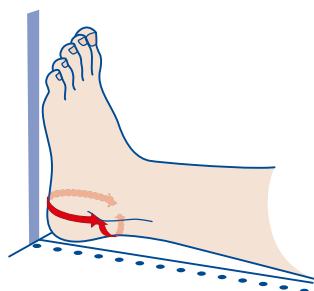Supporti Malleolari


cod. OPZ0099


Indicare le circonferenze dorsali sul tendine di Achille, dal centro del malleolo laterale al centro del malleolo mediale.

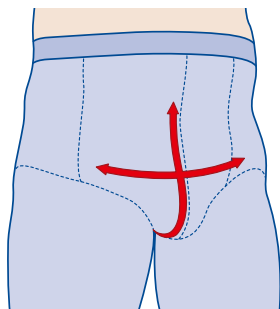Sacca scrotale

cod. OPZ0086
STEP 1

Indicare le lunghezze dalla base del pene fino alla base dello scroto, all'attaccatura con il perineo. Misurare inoltre la lunghezza tra l'inguine di destra e quello di sinistra. Il metro deve seguire il contorno anatomico dello scroto.

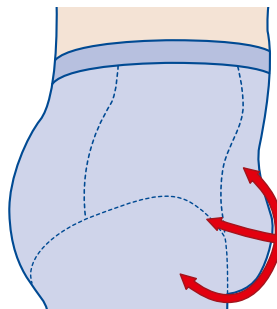

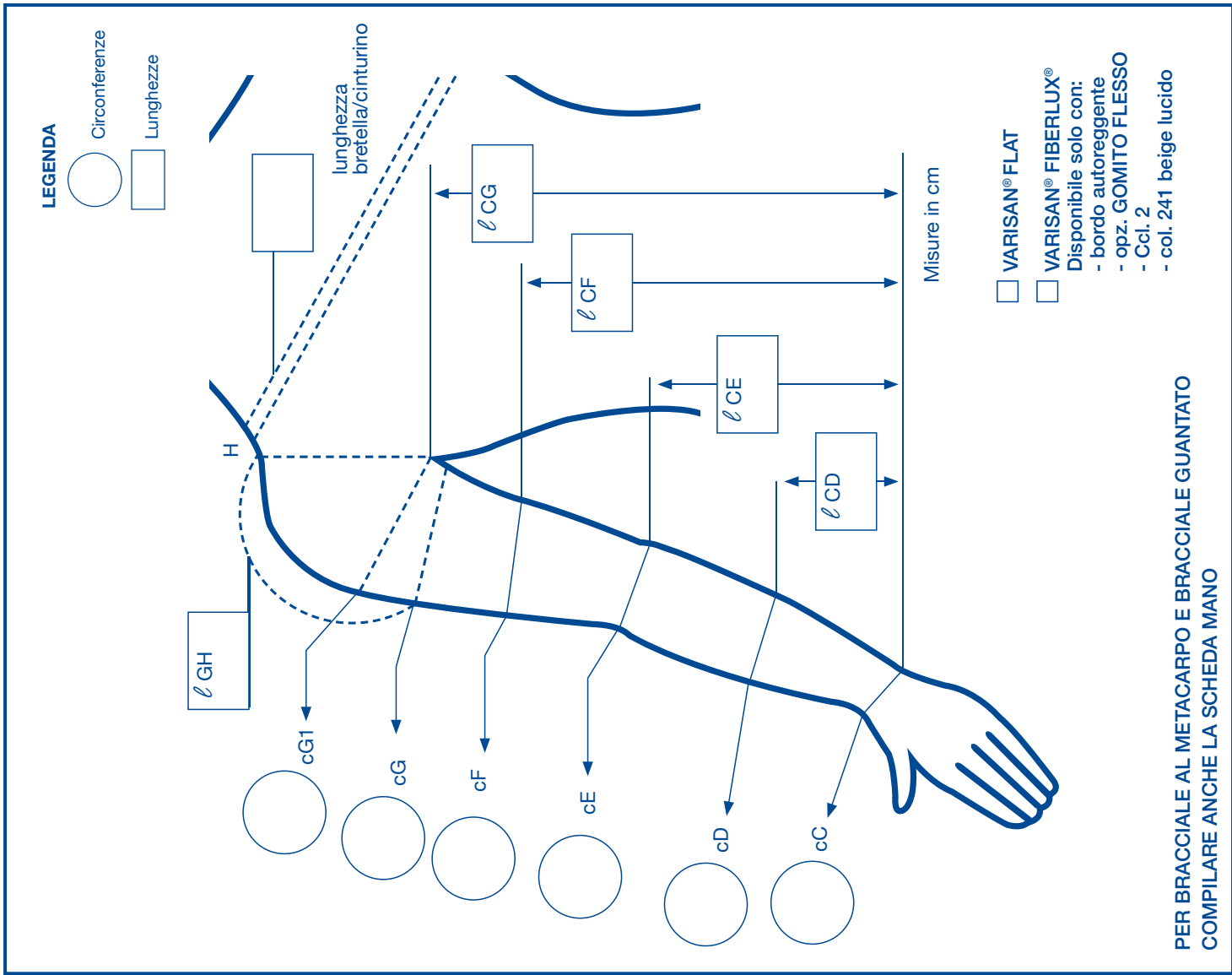

SEGMENTI

Bracciale al polso (CG)
 Bracciale al metacarpo con pollice (AG)

VARIANTI

Spalla
 Autoreggente

BRACCIO

Destro
 Sinistro

GOMITO

Comfort
 Dritto
 Flesso

BORDO SUPERIORE

Obliquo 3 cm
 Dritto

COMPRESSIONE

Ccl 1 2 3 4
 STRONG

BALZA SILICONATA

3,5cm 5cm 6,5cm

bielastica

Balza top esterna

Balza interna 3/4 circonferenza

Balza interna a tasselli

QUANTITÀ

Unità _____

Uomo
 Donna

POLSO

Comfort
 Solo per bracciale al polso

INSERTI IN MICROFIBRA

Gomito interno
 Gomito esterno

COLORI

106 avorio
 604 avana*
 112 sabbia
 241 beige lucido**

420 corallo
 440 carminio
 450 fucsia
 545 blu navy

535 bluette
 608 verde bosco
 820 grigio
 862 nero

*Colore standard per VARISAN® FLAT - altri colori disponibili a richiesta
 **Colore standard disponibile solo per VARISAN® FIBERLUX®

ZIP


misura zip 19 cm
 misura zip 23 cm
 misura zip 26 cm
 misura zip 31 cm

Indicare posizionamento zip

RICHIESTE PARTICOLARI

.....

PER BRACCIALE AL METACARPO E BRACCIALE GUANTATO
 COMPILARE ANCHE LA SCHEDA MANO

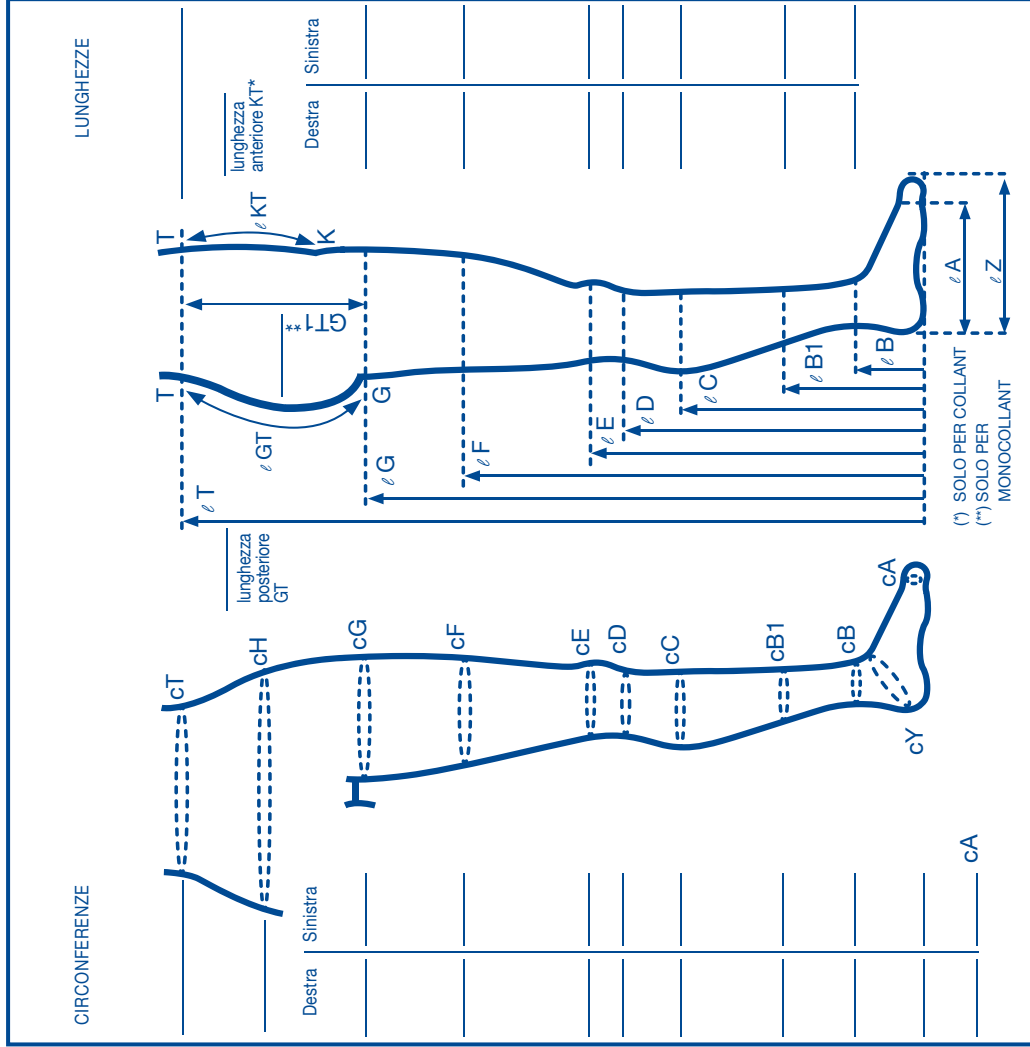

Supporti malleolari punti misurazione profilo imbottitura

Destra	Sinistra
_____	_____
_____	_____
_____	_____



INFILCALZE VARITEC®

REF. 9705008

INTRODOTTORE VARISLIDE®

VARISLIDE® Corto

Ref. 970510C

VARISLIDE® Lungo

Ref. 970510L

SEGMENTI	QUANTITÀ	COMPRESSIONE
<input type="checkbox"/> Gambaletto (AD) <input type="checkbox"/> Calza autoreggente (AGH) <input type="checkbox"/> Collant (AT) <input type="checkbox"/> Monocollant (AGTL/AGTR) <input type="checkbox"/> Mezzo collant (ATF) <input type="checkbox"/> Pantaloncini (FT, ET) <input type="checkbox"/> Corsaro (CT, DT) <input type="checkbox"/> Leggings (BT)	Unità _____ <input type="checkbox"/> Uomo <input type="checkbox"/> Donna	Ccl 1 2 3 4 Panty Gamba sinistra Gamba destra

GIROVITA COLLANT	BALZA SILICONATA	BORDO SUPERIORE AD/AG
<input type="checkbox"/> Cinturino in vita regolabile con asole <input type="checkbox"/> Cinturino in vita regolabile con velcro <input type="checkbox"/> Girovita in tessuto elastico	3,5cm 5cm 6,5cm Balza top esterna Balza interna 3/4 circonferenza Balza interna a tasselli	<input type="checkbox"/> Obliquo laterale <input type="checkbox"/> Obliquo frontale <input type="checkbox"/> Dritto

OPZIONI		
PIEDE	TALLONE	GINOCCHIO
<input type="checkbox"/> Obliquo lunghezza mediale cm _____ lunghezza laterale cm _____ <input type="checkbox"/> Dritto l A cm _____ <input type="checkbox"/> Punta chiusa l A cm _____ l Z cm _____	Destra _____ Sinistra _____ <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Sagomato	<input type="checkbox"/> Flesso <input type="checkbox"/> Comfort <input type="checkbox"/> Dritto
TASSELLO PROT. MICROFIBRA		
<input type="checkbox"/> Cavo popliteo <input type="checkbox"/> Collo del piede		

COLORI	PIEDE
<input type="checkbox"/> 106 avorio <input type="checkbox"/> 604 avana* <input type="checkbox"/> 112 sabbia <input type="checkbox"/> 420 corallo <input type="checkbox"/> 440 carminio <input type="checkbox"/> 450 fucsia <input type="checkbox"/> 545 blu navy <input type="checkbox"/> 535 bluette	<input type="checkbox"/> Collo del piede comfort ZIP GAMBALETTO <input type="checkbox"/> Zip interna <input type="checkbox"/> Zip esterna <input type="checkbox"/> Zip posteriore

*Colore standard per VARISAN® FLAT
altri colori disponibili a richiesta

RICHIESTE PARTICOLARI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VARISAN[®] FLAT

Su richiesta anche i seguenti colori





LINEA
LINFOLOGICA

LINFOROLL®

The MLD based on EBM

LINFOROLL® è un dispositivo medico che ha come scopo quello di indicare al fisioterapista i diversi parametri del Drenaggio Linfatico Manuale rendendolo "OGGETTIVO" e rispondente ai criteri dell'Evidence Based Medicine.

Attualmente, nella cura del linfedema il gold standard riconosciuto a livello Internazionale (linee guida International Society of Lymphology 2013) è dato dalla Terapia Decongestiva Complessa che è costituita da 4 elementi:

1. Drenaggio linfatico manuale
2. Bendaggio multistrato a corta estensibilità
3. Cura della cute
4. Fisiokinesiterapia sotto bendaggio

Nel caso del Drenaggio Linfatico Manuale è stata riconosciuta l'efficacia terapeutica, ma uno dei suoi limiti è la NON misurabilità delle sue manovre.

LINFOROLL® ha la capacità di indicare al fisioterapista che sta eseguendo il drenaggio linfatico:

1. La zona corporea da trattare (zona di lavoro)
2. La forza applicata (espressa come tale in g/cm² oppure come pressione in mmHg) avendo sul suo manopolo un feedback di tipo visivo (led giallo: pressione insufficiente, led verde: pressione corretta, led rosso: pressione eccessiva)
3. Il numero dei passaggi da effettuare sulla zona di lavoro
4. La velocità di esecuzione della manovra (velocità corretta: 3cm/sec)
5. L'energia trasferita al paziente (in joule)




LINFOROLL® è corredato da un software che ha al suo interno dei percorsi di trattamento precostituiti in accordo con gli schemi delle diverse scuole di linfo drenaggio manuale.

Permette inoltre la creazione di qualsiasi schema di trattamento in relazione alle diverse esigenze terapeutiche. Presenta anche una vera e propria cartella clinica (Fig. 1) che permette la memorizzazione dei dati anamnestici, clinici e terapeutici sia generali che riferiti all'edema.

LINFOROLL® inoltre richiede alla prima e all'ultima seduta del ciclo di trattamento l'inserimento dei dati relativi alla misurazione centimetrica da cui verrà estrapolato in via indiretta il volume, e tonometrica (misura della consistenza tissutale) degli arti. Questo permetterà di avere dei dati che quantificheranno il miglioramento avvenuto. LINFOROLL® è in grado di memorizzare tutti i parametri di ogni singola seduta di lavoro, in modo da potere avere al termine del ciclo di trattamento dei dati confrontabili.

Questi dati potranno infine essere estratti dal sistema e inviati ad un centro di elaborazione che provvederà poi a elaborarli e a inviare nuovamente all'utente i consigli sull'esecuzione delle successive terapie.

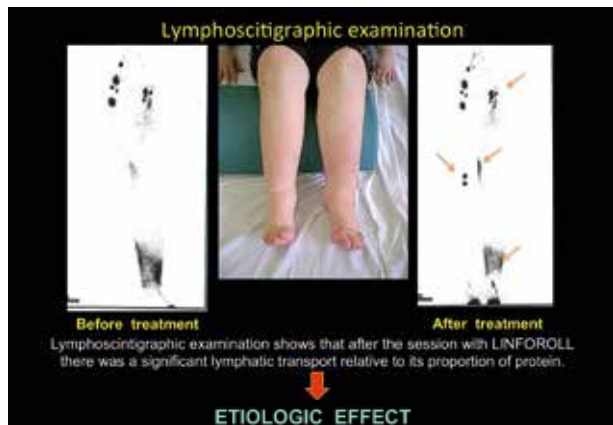

(Fig. 1)





Caratterizzato da un accumulo eccessivo di tessuto adiposo, il Lipedema è un disturbo infiammatorio cronico che colpisce prevalentemente il sesso femminile.

Sulla base del suo aspetto e dell'area di localizzazione, che esclude generalmente le estremità corporee, può essere classificato in stadi e tipologie.

Tipici sintomi di questa condizione sono edema, pesantezza e dolore al tatto che, se trascurati, possono portare ad una degenerazione del Lipedema verso gli stadi superiori, provocando difficoltà di deambulazione.

LINEA LIPEDEMA



Il suo trattamento prevede l'utilizzo quotidiano di un tutore elastocompressivo, in grado di contrastare l'edema e ridurre la sintomatologia dolorosa, affiancato da uno stile di vita sano (dieta e attività fisica).

LIPOCARE® LIGHT


Linea lipedema

Tutore compressivo medicale in trama circolare - standard



CIRCONFERENZA (cm)							
Taglia		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
Coscia	G	45-55	50-60	55-65	60-71	66-78	73-85
Polpaccio	C	29-35	31-38	34-41	37-44	40-48	44-52
Caviglia	B	18-20	20-22	22-25	25-28	28-31	31-34

LUNGHEZZA (cm)		
	Corto	Normale
AG	66-73	74-82

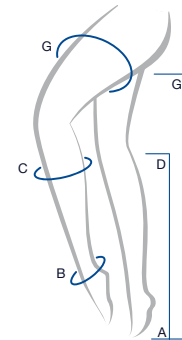

CLASSE DI COMPRESSIONE		
REF.	23 - 32 mmHg	ARTICOLO
	L4ECT	Corsaro (CT) corto
	L4NCT	Corsaro (CT) normale
	L4EBT	Leggings (BT) corto
	L4NBT	Leggings (BT) normale



LIPOCARE® LIGHT

Linea lipedema

Tutore compressivo medicale in trama circolare - standard



LIPOCARE® è la linea di tutori compressivi dedicati al trattamento del lipedema agli arti inferiori.

La linea LIPOCARE® LIGHT, realizzata con tecnologia medicale in trama circolare e filati di alta qualità, soddisfa le esigenze terapeutiche di un lipedema in fase iniziale riducendo la sensazione di pesantezza e dolore alle gambe, e garantendo una sensazione di benessere.

Il particolare motivo a costine ha un'azione drenante e dona al prodotto un aspetto moderno e alla moda, ideale per un indosso quotidiano.

Disponibile in versione leggings (BT) e corsaro (CT).

CARATTERISTICHE

- La costruzione medicale permette il corretto mantenimento dei livelli di compressione ideali per alleviare la sintomatologia da lipedema
- Il filato in microfibra di alta qualità rende il prodotto estremamente morbido al tatto e delicato sulla pelle, e garantisce elevati livelli di traspirabilità
- Con cinturino immagliato che consente il corretto posizionamento del prodotto
- Vestibilità perfetta, si adatta alle forme
- Facile da indossare

INDICAZIONI

II CLASSE (23 - 32 mmHg)

Lipedema, lipolinfedema, linfedema primario e secondario nei vari stadi evolutivi clinici, flebolinfedema, panniculopatia-edemato-fibro-sclerotica (nota come "cellulite").

CONTROINDICAZIONI

Dermoipodermite in forma acuta, infezioni cutanee in fase acuta, arteriopatia obliterante periferica, nota allergia da contatto a tutori elastici.

COMPOSIZIONE

Poliammide 60%, elasthan 40%.

COMPRESSIONE

Ccl. 2 23-32 mmHg



COLORI

862 nero



AMPIA GAMMA



TRASPIRABILITÀ

LIPOCARE® STRONG

Linea lipedema

Tutore compressivo medicale in trama piatta - standard




TRAMA PIATTA



TUTORI STANDARD

CIRCONFERENZA (cm)							
Taglia	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	7/XXXL
Punti di misurazione							
cT	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135
cH	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	135-145	145-155
cG	44-55	48-59	52-63	56-67	60-71	64-75	68-79
cF	43-52	47-56	51-60	55-64	59-68	63-72	67-76
cE	32-37	35-40	38-43	41-46	44-59	47-52	50-55
cD	28-33	30-35	32-37	34-39	36-41	38-43	40-45
cC	30-36	33-39	37-43	40-46	43-49	46-52	49-55
cBⁱ	23-29	26-31	29-35	32-38	35-41	38-44	41-46
cB	18-21	20-23	22-25	24-26	25-29	28-32	31-35

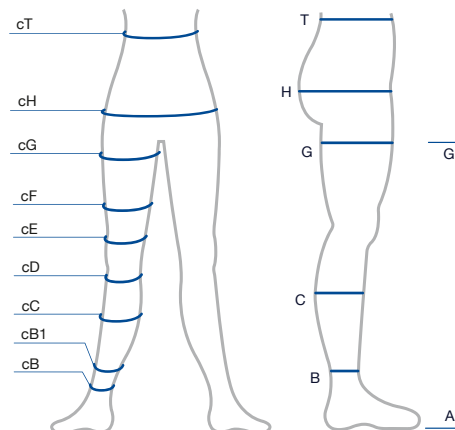

LUNGHEZZA (cm)		
	Corto	Normale
AG	64-71	72-80

CLASSE DI COMPRESIONE			
REF.	23 - 32 mmHg	ARTICOLO	COLORI
	FM4ECT	Corsaro (CT) corto	604 862
	FM4NCT	Corsaro (CT) normale	
	FM4EBT	Leggings (BT) corto	604 862
	FM4NBT	Leggings (BT) normale	



LIPOCARE® STRONG

Linea lipedema

Tutore compressivo medicale in trama piatta - standard



LIPOCARE® è la linea di tutori compressivi dedicati al trattamento del lipedema agli arti inferiori.

La linea LIPOCARE® STRONG, realizzata con tecnologia medicale e filati di alta qualità, risponde efficacemente alle esigenze terapeutiche più complesse e grazie alla sua struttura in trama piatta ha elevate capacità di contenimento dell'accumulo adiposo, aiutando a migliorare la mobilità del paziente.

Disponibile in versione leggings (BT) e corsaro (CT).

CARATTERISTICHE

- La costruzione medicale in trama piatta garantisce elevati livelli di contenimento e favorisce la mobilità
- Il filato in microfibra di alta qualità rende il prodotto estremamente morbido al tatto e delicato sulla pelle, e assicura elevati livelli di traspirabilità
- La maglia nella zona inguinale è alleggerita per favorire il corretto posizionamento del prodotto
- La diminuzione dei livelli di compressione in caviglia evita l'effetto laccio
- Con cinturino in velcro regolabile in vita per una vestibilità ottimale e massimo sostegno

INDICAZIONI

II CLASSE (23 - 32 mmHg)

Lipedema, lipolinfedema, linfedema primario e secondario nei vari stadi evolutivi clinici, flebolinfedema, panniculopatia-edemato-fibro-sclerotica (nota come "cellulite").

CONTROINDICAZIONI

Dermoipodermite in forma acuta, infezioni cutanee in fase acuta, arteriopatia obliterante periferica, nota allergia da contatto a tutori elastici.

COMPOSIZIONE

Poliammide 74%, elastan 26%.



COMPRESSIONE

Ccl. 2 23-32 mmHg



COLORI

604 avana



862 nero



AMPIA GAMMA



TRASPIRABILITÀ



I bendaggi sono stati utilizzati fin dall'antichità nel trattamento delle ulcere degli arti inferiori, nei disturbi del circolo venoso e nella riduzione degli edemi.

L'applicazione di un adeguato bendaggio crea una serie di effetti fisiologici e biochimici che interessano i sistemi venoso, arterioso e linfatico. Utilizzando bende adeguate, tecniche di applicazione corrette e applicando una pressione adeguata, la terapia compressiva è efficace per la riduzione dell'edema e del dolore, migliorando le condizioni del macro e del microcircolo.

LINEA BENDAGGI





BENDE ADESIVE E CEROTTI

Indicate per bendaggi compressivi nelle terapie vascolari, per bendaggi funzionali post-traumatici, in ortopedia per bendaggi tendinei, muscolari, articolari, contusioni nelle immobilizzazioni post-lussazioni e nella cura dei traumi sportivi. ADESIVA AT: cerotto anelastico particolarmente indicato per bendaggi sportivi, correttivi, funzionali.



CODICE	NOME	DESCRIZIONE	ALTEZZA (cm)	LUNGHEZZA IN TENSIONE (m)	CONFEZIONE	
					Unità di vendita	Box Ospedaliero
08AM410	ADESIVA M70	Benda Monoelastica Est. 70%	10	4,5	1 PZ	-
H8AM410					-	10 PZ
H8AAT04	ADESIVA AT	Cerotto Anelastico per bendaggi funzionali taping	3,8	10	-	10 PZ

BENDE COESIVE

Indicate per il fissaggio delle compresse di medicazioni, per bendaggi di protezione su ematomi e contusioni, per bendaggi di sostegno leggero, nello sport. Questa tipologia di bende gode di un'ottima traspirabilità e quindi è particolarmente rispettosa della cute. Non necessita di fermagli o cerotti poiché aderisce solo su sé stessa e non sulla pelle.



CODICE	NOME	DESCRIZIONE	ALTEZZA (cm)	LUNGHEZZA IN TENSIONE (m)	CONFEZIONE	
					Unità di vendita	Box Ospedaliero
H8AU425	COESIVA M50	Benda Monoelastica di fissaggio Est. 50%	2,5	4	-	10 PZ
H8AU406	COESIVA M50	Benda Monoelastica di fissaggio Est. 50%	6	4	-	10 PZ
H8AU408	COESIVA M50	Benda Monoelastica di fissaggio Est. 50%	8	4	-	10 PZ
H8AU410	COESIVA M50	Benda Monoelastica di fissaggio Est. 50%	10	4	-	10 PZ
08AU210	COESIVA M50	Benda Monoelastica di fissaggio Est. 50%	10	20	1 PZ	-
08CO201	COESIVA M60	Benda Monoelastica di fissaggio Est. 60%	10	20	1 PZ	-
08IC510	COESIVA M80	Benda Monoelastica di fissaggio Est. 80%	10	5	1 PZ	-
08CO410	COESIVA MF90	Benda Monoelastica di fissaggio Est. 90%	10	4	1 PZ	-

SALVAPELLE

Indicato per la protezione della cute prima dell'apposizione di bendaggi adesivi, compressivi e cerotti.



FOAM E PAD TRASPIRANTE

Indicati per la protezione di salienze ossee, per variare il diametro degli arti prima dell'apposizione di bendaggi compressivi, bende di gesso e/o sintetiche.

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	ALTEZZA (cm)	LUNGHEZZA IN TENSIONE (m)	CONFEZIONE	
					Unità di vendita	Box Ospedaliero
08SA277	SALVAPELLE	Benda in schiuma di poliuretano spessore 0,8mm	7	27,5	1 PZ	-
H8SA277					-	12 PZ
08SA408	FOAM	Benda in schiuma di poliuretano spessore 2mm	8	4,5	1 PZ	-
08SA410	FOAM	Benda in schiuma di poliuretano spessore 2mm	10	4,5	1 PZ	-
H8LA208	PAD TRASPIRANTE	Pad in schiuma di lattice sintetico, traspirante, ritagliabile	8	2	-	6 PZ



BENDE COMPRESSIVE

Indicate per bendaggi compressivi vascolari e linfatici, nel trattamento di edemi, linfedemi cronici, ulcus cruris.



CODICE	NOME	DESCRIZIONE	ALTEZZA (cm)	LUNGHEZZA IN TENSIONE (m)	CONFEZIONE	
					Unità di vendita	Box Ospedaliero
08CAR06	COMPRESSIVA ML20 RIGHE*	Benda Monoelastica con righe Est. 20%	6	5	1 PZ	-
H8CAR06					-	10 PZ
08CAR08	COMPRESSIVA ML20 RIGHE*	Benda Monoelastica con righe Est. 20%	8	5	1 PZ	-
H8CAR08					-	10 PZ
08CAR10	COMPRESSIVA ML20 RIGHE*	Benda Monoelastica con righe Est. 20%	10	5	1 PZ	-
H8CAR10					-	10 PZ
08CAD06	COMPRESSIVA ML20 DOTS*	Benda Monoelastica con righe e dots siliconati Est. 20%	6	5	1 PZ	-
H8CAD06					-	10 PZ
08CAD08	COMPRESSIVA ML20 DOTS*	Benda Monoelastica con righe e dots siliconati Est. 20%	8	5	1 PZ	-
H8CAD08					-	10 PZ
08CAD10	COMPRESSIVA ML20 DOTS*	Benda Monoelastica con righe e dots siliconati Est. 20%	10	5	1 PZ	-
H8CAD10					-	10 PZ
08CMR06	COMPRESSIVA ML35 RIGHE*	Benda Monoelastica con righe Est. 35%	6	5	1 PZ	-
H8CMR06					-	10 PZ
08CMR08	COMPRESSIVA ML35 RIGHE*	Benda Monoelastica con righe Est. 35%	8	5	1 PZ	-
H8CMR08					-	10 PZ
08CMR10	COMPRESSIVA ML35 RIGHE*	Benda Monoelastica con righe Est. 35%	10	5	1 PZ	-
H8CMR10					-	10 PZ
08CMR12	COMPRESSIVA ML35 RIGHE*	Benda Monoelastica con righe Est. 35%	12	5	1 PZ	-
H8CMR12					-	10 PZ
08CMD06	COMPRESSIVA ML35 DOTS*	Benda Monoelastica con righe e dots siliconati Est. 35%	6	5	1 PZ	-
H8CMD06					-	10 PZ
08CMD08	COMPRESSIVA ML35 DOTS*	Benda Monoelastica con righe e dots siliconati Est. 35%	8	5	1 PZ	-
H8CMD08					-	10 PZ
08CMD10	COMPRESSIVA ML35 DOTS*	Benda Monoelastica con righe e dots siliconati Est. 35%	10	5	1 PZ	-
H8CMD10					-	10 PZ
08CM506	COMPRESSIVA MF90	Benda Monoelastica Est. 90%	6	5	1 PZ	-
08CM508	COMPRESSIVA MF90	Benda Monoelastica Est. 90%	8	5	1 PZ	-
08CM510	COMPRESSIVA MF90	Benda Monoelastica Est. 90%	10	5	1 PZ	-
08CM512	COMPRESSIVA MF90	Benda Monoelastica Est. 90%	12	5	1 PZ	-
08CB710	COMPRESSIVA BF120	Benda Bielastica Est. 120%	10	7	1 PZ	-
08CM708	COMPRESSIVA MF170	Benda Monoelastica Est. 170%	8	7	1 PZ	-
08CM710	COMPRESSIVA MF170	Benda Monoelastica Est. 170%	10	7	1 PZ	-
08CM712	COMPRESSIVA MF170	Benda Monoelastica Est. 170%	12	7	1 PZ	-



*Brevettato CIZETA MEDICALI



BENDE MEDICATE

Indicate per bendaggi post-traumatici, nel trattamento di ulcus cruris, varici, tromboflebiti e flebotrombosi, edemi e linfedemi, insufficienze venose croniche, traumi contusivi, distorsioni e lussazioni.

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	ALTEZZA (cm)	LUNGHEZZA IN TENSIONE (m)	CONFEZIONE	
					Unità di vendita	Box Ospedaliero
08ZA608	ZINCO A	Benda Anelastica alla pasta di zinco	8	6	1 PZ	-
H8ZA608					-	10 PZ
08ZA710	ZINCO A	Benda Anelastica alla pasta di zinco	10	7	1 PZ	-
H8ZA710					-	10 PZ
08ZM510	ZINCO M80	Benda Monoelastica alla pasta di zinco Est. 80%	10	5	1 PZ	-
H8ZM510					-	10 PZ
08ZM710	ZINCO M80	Benda Monoelastica alla pasta di zinco Est. 80%	10	7	1 PZ	-
H8ZM710					-	10 PZ
08ZM101	ZINCO M80	Benda Monoelastica alla pasta di zinco Est. 80%	10	10	1 PZ	-
H8ZM101					-	8 PZ
08CU508	ZINCO CUMARINA A	Benda Anelastica con pasta all'ossido di zinco e cumarina	8	5	1 PZ	-
H8CU508					-	10 PZ
08CU510	ZINCO CUMARINA A	Benda Anelastica con pasta all'ossido di zinco e cumarina	10	5	1 PZ	-
H8CU510					-	10 PZ

MAGLIE TUBOLARI

Indicate come sottobendaggio per bendaggi di sostegno e fissaggio, garantiscono un'ottima traspirazione e una varietà di utilizzi su tutte le parti del corpo. Specifiche per bendaggi compressivi. Indicate anche per fissaggio di medicazioni, per copertura della cute in caso di trattamenti con pomate e unguenti. Utilizzate anche come maglie sottogesso per apparecchi ortopedici.

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	ALTEZZA (cm)	LUNGHEZZA IN TENSIONE (m)	CONFEZIONE	
					Unità di vendita	Box Ospedaliero
08TUL06	TUBOLARE	Tubolare in cotone	6	20	1 PZ	-
08TUL08	TUBOLARE	Tubolare in cotone	8	20	1 PZ	-
08TUL10	TUBOLARE	Tubolare in cotone	10	20	1 PZ	-
08TUL12	TUBOLARE	Tubolare in cotone	12	20	1 PZ	-

BENDE IDEAL

Indicate per il fissaggio delle medicazioni, sostegno in caso di distorsioni e contusioni leggere.

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	ALTEZZA (cm)	LUNGHEZZA IN TENSIONE (m)	CONFEZIONE	
					Unità di vendita	Box Ospedaliero
H8ID510	IDEAL M45	Benda Monoelastica di fissaggio Est. 45%	10	5	-	10 PZ

CIZETA

Press Bende



AVVERTENZE

Non sono note allergie specifiche se non quelle individuali ad uno dei componenti tessili. Il bendaggio non deve essere eseguito su stati patologici che sconsiglino la fasciatura compressa. Tenere lontano da luce diretta e fonti di calore.

CONTROINDICAZIONI

Il dispositivo medico non deve essere applicato direttamente su tessuti lesi.

COMPOSIZIONI

BENDE ADESIVE

ADESIVA M70: 100% cotone, adesivo sintetico con ossido di zinco. Latex safe.

ADESIVA AT: 100% cotone, adesivo sintetico con ossido di zinco.

BENDE COESIVE

COESIVA M50 h. 2,5cm: 42% cotone, 29% viscosa, 29% poliammide, adesivo ipoallergenico in lattice.

COESIVA M50 h. 6-8-10cm: 42% cotone, 29% viscosa, 29% poliammide. Latex safe.

COESIVA M50 h. 10cmx20m: 42% cotone, 29% viscosa, 29% poliammide. Latex safe.

COESIVA M60: 61% poliammide, 39% cotone. Latex safe.

COESIVA M80: 88% cotone, 11% poliammide, 1% elastan.

COESIVA MF90: 42% cotone, 29% viscosa, 28% poliammide, 1% elastan. Latex safe.

BENDE COMPRESSIVE

COMPRESSIVA ML20 RIGHE/ML35 RIGHE: 80% cotone, 20% poliammide. Latex safe.

COMPRESSIVA ML20 DOTS/ML35 DOTS: 80% cotone, 20% poliammide. Latex safe.

COMPRESSIVA MF90: 100% cotone. Latex safe.

COMPRESSIVA MF170 h. 8-10cm: 81% cotone, 19% elastan. Latex safe.

COMPRESSIVA MF170 h. 12cm: 93% cotone, 7% elastan. Latex safe.

COMPRESSIVA BF120: 70% cotone, 25% poliammide, 5% elastan.

BENDE SALVAPELLE/FOAM

100% schiuma di poliuretano.

PAD TRASPIRANTE

100% lattice sintetico.

BENDE MEDICATE

ZINCO A / ZINCO CUMARINA A: 100% cotone. Latex safe.

ZINCO M80: 54% poliammide, 46% viscosa. Latex safe.

MAGLIE TUBOLARI

100% cotone.

BENDE IDEAL

IDEAL M45: 98% cotone, 2% lycra.



Gli integratori sono prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale.

Le creme, grazie ad un sapiente mix di estratti naturali, alleviano le sintomatologie legate ai disturbi della circolazione negli arti inferiori.

INTEGRATORI & CREME



DIOSMIR® 500/1000

*Integratore alimentare a base di
Diosmina e Mirtillo Nero*

CARATTERISTICHE

DIOSMIR® è un integratore naturale a base di Diosmina e Mirtillo Nero. La Diosmina ha proprietà antinfiammatorie. Inoltre ne viene suggerita l'assunzione per favorire la corretta funzionalità delle vene, in caso di varici e stasi venosa agli arti inferiori. Il Mirtillo Nero coadiuva la funzionalità del microcircolo e contiene antocianosidi, sostanze ad azione antiossidante.

INDICAZIONI

DIOSMIR® è utile come coadiuvante:

- Nella flebopatia ipotonica costituzionale
- Nella sindrome varicosa essenziale e sue complicanze
- In tutte le manifestazioni emorragiche da fragilità capillare
- Nella sindrome emorroidaria
- Nella sindrome post-flebitica
- Nella malattia della retina di origine diabetica
- Nella terapia degli edemi post-traumatici e post-chirurgici
- Nella stasi linfatica (linfedema cronico, linfedema primario e secondario)

MODO D'USO

DIOSMIR® 500: 2 compresse al giorno da deglutire con acqua.

DIOSMIR® 1000: 1 bustina al giorno da sciogliere in acqua.

In caso di sindrome emorroidaria:

DIOSMIR® 500: 6 compresse al giorno per 3 giorni.

DIOSMIR® 1000: 3 bustine al giorno per 3 giorni.



REF.	ARTICOLO
DSM5*30	DIOSMIR® 500 - 30cpr
DSM5*30*2	DIOSMIR® 500 Dual Pack - 60cpr
DSM1*16	DIOSMIR® 1000 - 16bust
DSM1*30	DIOSMIR® 1000 - 30bust

NEVAFIN® CRONO C-Mg

*Integratore alimentare a base di
Magnesio ed estratti di Boswellia e Meliloto*

CARATTERISTICHE

NEVAFIN® CRONO è un integratore alimentare a base di estratti di Boswellia e Meliloto, con Magnesio, vitamine del complesso B e vitamina C.

NEVAFIN® CRONO può favorire il trofismo del microcircolo e aiutare i fisiologici meccanismi di drenaggio dei liquidi.

INDICAZIONI

NEVAFIN® CRONO risulta utile come coadiuvante:

- Nella stasi linfatica (linfedema cronico, linfedema primario e secondario)
- Nella PEFS pannicolopatia edemato-fibro-sclerotica (cellulite)
- Nella ritenzione idrica ciclica
- Come coadiuvante nel trattamento delle flebiti
- Per il miglioramento del trofismo del microcircolo e quindi nella fragilità capillare
- Nel trattamento dell'edema venoso post-traumatico o conseguente ad immobilizzazione prolungata dell'arto
- Come coadiuvante della trasmissione neuromuscolare

MODO D'USO

1, 2 compresse al giorno da deglutire con acqua.



REF.	ARTICOLO
NVFIN30	NEVAFIN® Crono C-Mg - 30cpr

LIVEDREN® CREMA

Crema a base di Aloe, Meliloto e saponine dell'Ippocastano



CARATTERISTICHE

LIVEDREN® Crema è un prodotto utile per alleviare le sintomatologie legate a piccoli disturbi della circolazione agli arti inferiori.

Indicata quando il sovrappeso, la scarsa attività fisica, la prolungata postura eretta o un'attività professionale sedentaria portano ad una fastidiosa sensazione di stanchezza, pesantezza, calore, gonfiore e tensione delle gambe. Grazie alle sue caratteristiche di crema gel, è facilmente assorbibile, non unge e procura una piacevole sensazione di freschezza. L'acido ialuronico, l'olio di mandorle e il succo d'aloè, lo rendono adatto anche alle pelli più delicate. LIVEDREN® Crema contribuisce a migliorare esteticamente le ecchimosi e le iperpigmentazioni da scleroterapia.

INDICAZIONI

Soggetti normali, esenti da patologie venose e/o linfatiche croniche possono utilizzarlo quando sono sottoposti a stress fisico, a prolungata stazione eretta o seduta o ad esposizione a fonti di calore, o in generale, a tutte quelle condizioni che notoriamente producono edema perimalleolare, prurito, senso di tensione dolorosa ai muscoli del polpaccio, senso di bruciore e crampi. Risulta utile nelle situazioni in cui si produce edema come conseguenza di patologie croniche o anche dopo eventi acuti, come un trauma.

Nel caso di scleroterapia, può velocizzare la risoluzione delle ecchimosi e prevenire le iperpigmentazioni cutanee; coadiuva la risoluzione di eventuali edemi post-chirurgici.

Svolge un'azione:

- Pro linfo-cinetica sulla cute e nel sottocute e un'azione favorente il ritorno venoso grazie al Meliloto
- Antinfiammatoria, antiecchimotica ed analgesica grazie all'Arnica
- Antiedemigena, antinfiammatoria, flebotonica e vasoprotettrice grazie all'Escina
- Antinfiammatoria, antisettica, antiparassitaria, cicatrizzante grazie alla Calendola
- Cicatrizzante, antinfiammatoria, battericida, antiedemigena e antidolorifica grazie all'Aloè
- Antinfiammatoria, lenitiva, addolcente sulle terminazioni nervose cutanee grazie al Bisabololo

COMPOSIZIONE

LIVEDREN® Crema è un prodotto a base di succo d'Aloè e olio di Mandorle. Contiene estratti naturali di Centella, Arnica, Meliloto, Rusco, Peperoncino, Acido Ialuronico, Bisabololo, saponine dell'Ippocastano e oli essenziali di Salvia e Ginepro.

MODO D'USO

Applicare almeno 2 volte al giorno sulle gambe, massaggiando dal basso verso l'alto fino a completo assorbimento.

FORMATI: 40 ml - 200 ml


REF.	ARTICOLO
LVDRBOX	LIVEDREN® crema - 40 ml - Box 12pz
LVDR200	LIVEDREN® crema - 200 ml



Le malattie e le situazioni che colpiscono il sistema scheletrico, muscolare e circolatorio del nostro organismo, non solo ne minano la normale funzione, ma influiscono negativamente sul delicato equilibrio dei rapporti tra apparati ed organi, comportando conseguenze che vanno al di là del danno relativo alla singola situazione.

Una lesione o una contrattura muscolare possono comportare atteggiamenti posturali antalgici che si riflettono in malposizioni scheletriche, le quali a loro volta causano sovraccarico di altre masse muscolari e tendinee alla base di ulteriori sintomi e disturbi.

LINEA ORTOPEDICA

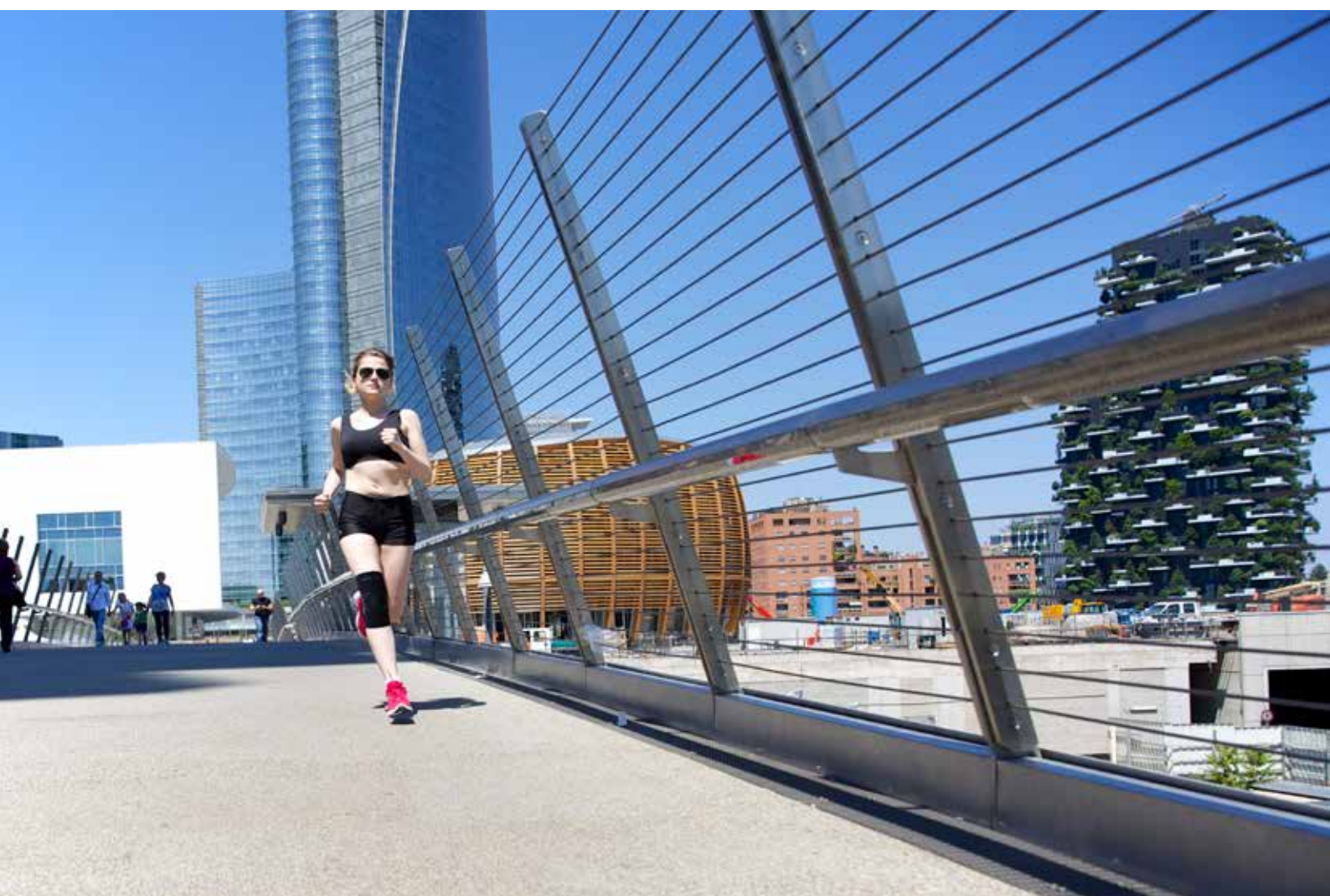

RACHIDE LOMBARE	RACHIDE CERVICALE	SPALLA E BRACCIO	MANO E POLSO
Emergenze, traumatologia dello sport e post-operatorio	Emergenze, traumatologia dello sport e post-operatorio	Emergenze, traumatologia dello sport e post-operatorio	Emergenze, traumatologia dello sport e post-operatorio
Corsetto iperestensore	Collari cervicali	Immobilizzatore clavicolare	Mano
	Anato C3 		MI 70 
Post-operatorio	Anato C4	Immobilizzatore braccio/spalla	Leasy Pollice 
Hypogripp		Perfo bras 	Leasy Rhizo 
Flexa	Cronico e reumatologico	Polyveste 	Polso
	Collari cervicali	Cuscino d'abduzione 20° 	Perfo Polso Perfo Polso/Pollice  
Cronico e reumatologico	Anato C1 	Cronico e reumatologico Reggibraccio 	Leasy Polso Leasy Polso-Pollice  
Gamma cinture	Anato C2 		Cronico e reumatologico ATL Seamless Polso ATL Seamless Pollice  
SL Activité			
SL Lady			
			
SL Maternity	Anato C2		
SL 500			
			
SL Thermo			
SL 700			
			
Vivaflex corsetti			
Traspirante			
Leggero			
			
Semirigido			
			
Viva termocintura			
			

GINOCCHIO

Emergenze, traumatologia dello sport e post-operatorio

Perfo Uni 3

CIROM



Cronico e reumatologico

GL 120

Standard

Open



Gamma elastica poliestensiva

GL Stab

Patella Stab



GL Strapp



Poliflex Ginocchiera

Poliflex Cosciale



Gamma elastica monoestensiva

Vivaflex Ginocchiera

Vivaflex Cosciale



Gamma termica

Vivalana Ginocchiera



CAVIGLIA

Emergenze, traumatologia dello sport e post-operatorio

A2T®

CISTAB



Tutori walker

Boots corto

Boots Air corto



Boots lungo

Boots Air lungo



Cronico e reumatologico

Gamma elastica poliestensiva

Talo Stab

Talo Protect

Talo Strapp



Poliflex Cavigliera

Poliflex Polpaccio

Poliflex Gambaletto



Gamma elastica monoestensiva

Vivaflex Cavigliera

Vivaflex Polpaccio



Gambaletto post gesso



PIEDE

Emergenze

Scarpa gesso



Emergenze, post operatorio

Scarpe terapeutiche

Classica



Scarico posteriore



Scarico anteriore



Cronico e neurologico

Tutore piede ciondolante



ALTRO

Traumatologia e post-operatorio

Stampelle e bastoni

Confort

Classiche



Escursione



Cronico e reumatologico

Cinti erniari mono-bilaterali



Vivaflex erniari



Vivaflex slip contenitivi





È dimostrato che l'applicazione della compressione elastica durante l'attività motoria migliora la capacità dell'atleta di sopportare lo sforzo fisico e ha effetti su frequenza cardiaca, potenza e recupero muscolare.

Grazie alla combinazione tra compressione e contenzione, COMPRESSION ZONE® accresce l'efficacia della pompa muscolare e rappresenta una vera innovazione nell'abbigliamento tecnico dedicato agli sportivi.

LINEA SPORT COMPRESSION ZONE[®]





IMPROVE YOUR PERFORMANCE. NATURALLY.

I BENEFICI DI COMPRESSION ZONE®

Linea di prodotti brevettata per massimizzare la performance sportiva e il recupero dopo lo sforzo muscolare. Le calze COMPRESSION ZONE® operano una compressione differenziale su aree specifiche del piede e del polpaccio, consentendo un incremento della circolazione sanguigna ed una maggiore ossigenazione dei muscoli. Il risultato è un aumento delle performance aerobiche dovuto a:

- Maggior resistenza
- Minore affaticamento fisico
- Rapido recupero muscolare



AUMENTA L'OSSIGENAZIONE: MENO CRAMPI, PIÙ LUCIDITÀ.

L'aumento del ritorno venoso ottimizza il trasporto dei nutrienti alle cellule muscolari. Il risultato è una soglia di affaticamento più elevata, con la riduzione dell'insorgere di crampi e, di conseguenza, la possibilità di una gestione più consapevole della performance.



UNA CIRCOLAZIONE MIGLIORE, UNA PRESTAZIONE MIGLIORE.

L'innovativo sistema brevettato Compression Zone® incrementa la velocità dei flussi sanguigni aumentando l'efficacia cardiaca.



IL BENESSERE DI UN RECUPERO PIÙ EFFICIENTE DOPO LO SFORZO.

Sforzi importanti richiedono troppo spesso tempi di recupero importanti. Compression Zone® permette una più elevata capacità di recupero riducendo lo stress cardiaco in modo significativo.



MAGGIORE STABILITÀ NELL'APPOGGIO.

La particolare tessitura nell'area del piede aumenta l'azione propriocettiva, dando una maggiore sensibilità nell'appoggio.






Linea sport
Prodotti elastocompressivi per la performance sportiva



Calzino Performance

La speciale struttura nell'area del piede, in filato misto carbonio-cotone con effetto traspirante e antistatico, favorisce la propriocezione e assicura maggiore stabilità nell'appoggio. La soletta massaggiante limita il rischio di infiammazioni.

CIRCONFERENZA (cm)					
Taglia	1	2	3	4	5
Caviglia B	21-23	22-24	23-26	25-28	27-30
N. Piede	36-38	38-40	40-43	43-45	45-47

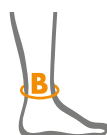


COLORI



Calza Performance

Incrementa il ritorno venoso aumentando l'efficacia cardiocircolatoria, riduce la produzione di acido lattico, diminuendo l'insorgere dei crampi e i rischi di lesioni al polpaccio. La speciale struttura nell'area del piede, in filato misto carbonio-cotone con effetto traspirante e antistatico, favorisce la propriocezione e assicura maggiore stabilità nell'appoggio. La soletta massaggiante limita il rischio di infiammazioni. Massima vestibilità e comfort.

CIRCONFERENZA (cm)					
Taglia	1	2	3	4	5
Polpaccio C	32-36	34-38	36-42	40-46	44-50
Caviglia B	21-23	22-24	23-26	25-28	27-30
N. Piede	36-38	38-40	40-43	43-45	45-47

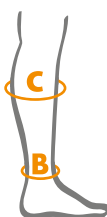


COLORI



Polpaccio Performance

Incrementa il ritorno venoso aumentando l'efficacia cardiocircolatoria, aumenta l'ossigenazione del muscolo, diminuendo il rischio di crampi. Con zona polpaccio rinforzata.

CIRCONFERENZA (cm)					
Taglia	1	2	3	4	5
Polpaccio C	32-36	34-38	36-42	40-46	44-50
Caviglia B	21-23	22-24	23-26	25-28	27-30

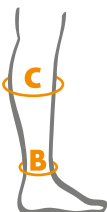

COLORI





Linea sport
Prodotti elastocompressivi per la performance sportiva

Bracciale Performance

Garantisce una migliore ossigenazione muscolare in grado di ritardare il raggiungimento della soglia di affaticamento e dolore di tricipite e bicipite. Il filato traspirante favorisce il passaggio dell'umidità e mantiene costante la temperatura dell'arto.

CIRCONFERENZA (cm)					
Taglia		1	2	3	4
Braccio	G	24-28	27-31	30-34	33-37
Polso	C	14-16	16-19	19-22	21-24



COLORI

Cosciale Performance & Recover

Studiato per migliorare il lavoro muscolare dei quadricipiti, riduce il livello di lattato e le sensazioni di fatica e pesantezza. Il filato traspirante favorisce il passaggio dell'umidità e mantiene costante la temperatura dell'arto. Massima tenuta senza creare effetto laccio.

CIRCONFERENZA (cm)					
Taglia		1	2	3	4
Coscia	G	46-49	48-52	51-56	56-60
Ginocchio	F	35-38	37-41	40-44	43-47




COLORI

Gambale Performance

Migliora l'efficienza cardiocircolatoria e assicura un'elevata soglia di affaticamento grazie a gittata cardiaca e produzione di acido lattico ridotte. Limita il rischio di lesioni a livello del polpaccio e della coscia. Con silicone antiscivolo per la massima tenuta durante l'indosso.

CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia		1	2	3	4	5
Coscia	G	46-49	48-52	51-56	55-60	59-64
Sopra ginocchio	F	35-38	37-41	40-44	43-47	46-50
Polpaccio	C	32-36	34-38	36-42	40-46	44-50
Caviglia	B	21-23	22-24	23-26	25-28	27-30
N. Piede		36-38	38-40	40-43	43-45	45-47

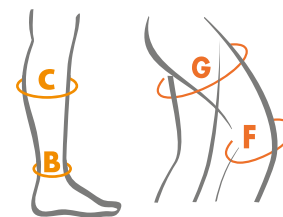

COLORI




Linea sport
Prodotti elastocompressivi per il recupero muscolare

Calza Recover

Assicura un rapido recupero muscolare per il polpaccio grazie alla riduzione significativa dello stress cardiaco dovuto alla compressione esercitata. Con speciale struttura nell'area del piede in filato misto carbonio-cotone, ad effetto traspirante e antistatico, e punta super-comfort.

CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia		1	2	3	4	5
Polpaccio	C	32-36	34-38	36-42	40-46	44-50
Caviglia	B	21-23	22-24	23-26	25-28	27-30
N. Piede		36-38	38-40	40-43	43-45	45-47

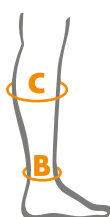


COLORI

Gambale Recover

Garantisce un rapido recupero muscolare in un'unica soluzione per polpaccio e coscia. Con speciale struttura nell'area del piede in filato misto carbonio-cotone, ad effetto traspirante e antistatico, punta super-comfort e silicone antiscivolo in coscia.

CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia		1	2	3	4	5
Coscia	G	46-49	48-52	51-56	55-60	59-64
Sopra ginocchio	F	35-38	37-41	40-44	43-47	46-50
Polpaccio	C	32-36	34-38	36-42	40-46	44-50
Caviglia	B	21-23	22-24	23-26	25-28	27-30
N. Piede		36-38	38-40	40-43	43-45	45-47

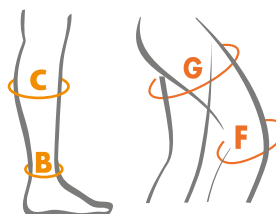

COLORI




ACCESSORI



Guanto

Taglia	S	M	L
Mano	6 - 7	7 - 8	8 - 9

REF.	ARTICOLO
 9705040	Guanto con dots in gomma

CARATTERISTICHE

Guanti con palmo della mano in gomma.


INDICAZIONI

Permette di indossare meglio la calza.



Guanti cotone

Taglia	S	M	L
Mano	6 - 7	7 - 8	8 - 9

REF.	ARTICOLO
 63020	Guanto ambidestro senza cuciture

Prodotti con cotone a contatto con la pelle



CARATTERISTICHE

Guanti in cotone anallergico.

INDICAZIONI

Per la protezione della cute e per pelli delicate.



COLORI

161 bianco



VARISLIDE®

Introduttore

L'introduttore VARISLIDE® è la soluzione efficace per indossare agevolmente le calze elastocompressive a punta aperta.

Il tessuto particolarmente leggero, resistente e scivoloso lo rende un valido ausilio per il paziente, semplificando l'indosso giornaliero delle calze terapeutiche. L'introduttore VARISLIDE® è disponibile in due lunghezze: corto e lungo.

REF.	ARTICOLO
970510C	Introduttore VARISLIDE® Corto
970510L	Introduttore VARISLIDE® Lungo

CARATTERISTICHE

Leggero e di semplice utilizzo.

INDICAZIONI

Permette di indossare la calza senza sforzi.



VARITEC®



Infilcalze - Brevetto CIZETA MEDICALI

La compressione elastica è la sola terapia riconosciuta contro l'insufficienza venosa cronica. Non di meno le difficoltà di infilare questi tutori, per pazienti anziani, poco mobili, che soffrono di artrosi, possono limitare la buona osservanza del trattamento. L'aiuto ad infilare delle calze medicali elastiche rappresenta dunque uno degli elementi importanti al buon scivolamento del segmento compressivo sulla gamba. Questo è il motivo per cui CIZETA MEDICALI S.p.A. ha concentrato la sua attenzione sulla costruzione di un modello di infilcalze leggero, pratico e semplice da utilizzare.

REF.	ARTICOLO
9705008	Infilcalze

CARATTERISTICHE

Leggero e di semplice utilizzo.
Modello brevettato da CIZETA MEDICALI S.p.A.

INDICAZIONI

Permette di infilare il piede senza sforzo.



Infilcalze PVC

REF.	ARTICOLO
9705015	Infilcalze



CIZETA Mask

REF.	ARTICOLO	TAGLIE	COLORI
MKA01	Mascherina filtrante in triplo strato di TNT	UNICA	106
MKA02	Mascherina filtrante in triplo strato di TNT	UNICA	561
MKB02	Mascherina filtrante Kids in triplo strato di TNT	UNICA	561

CARATTERISTICHE

Mascherina protettiva filtrante in triplo stato di TNT.

INDICAZIONI

Mascherina filtrante ad uso della collettività.

COLORI

106 avorio



561 blu



VARISAN® TOP

		CIRCONFERENZA (cm)									
Taglia		1		2		3		4		5	
		NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS
Coscia	G	50-55	53-58	53-58	56-61	56-61	60-66	60-66	64-70	64-70	70-77
Polpaccio	C	31-34	34-37	34-37	37-40	37-40	40-44	40-44	44-48	44-48	48-52
Caviglia	B	19-20		21-23		23-25		25-27		28-30	
		LUNGHEZZA (cm)									
		Corto					Normale				
Gambaletto	AD	36 - 41					42 - 48				
Calza	AG	66 - 73					74 - 82				

VARISAN® FASHION

		CIRCONFERENZA (cm)				
Taglia		1	2	3	4	5
Coscia	G	49 - 56	54 - 62	59 - 67	64 - 74	72 - 82
Polpaccio	C	29 - 35	33 - 40	38 - 45	42 - 48	46 - 52
Caviglia	B	19 - 21	22 - 24	25 - 27	28 - 30	31 - 34
		LUNGHEZZA (cm)				
		Corto			Normale	
Gambaletto	AD	36 - 41			42 - 48	
Calza	AG	66 - 73			74 - 82	

VARISAN® FASHION FOR MAN

		CIRCONFERENZA (cm)				
Taglia		1	2	3	4	5
Polpaccio	C	29 - 35	33 - 40	38 - 45	42 - 48	46 - 52
Caviglia	B	19 - 21	22 - 24	25 - 27	28 - 30	31 - 34
		LUNGHEZZA (cm)				
		Corto			Normale	
Gambaletto	AD	36 - 41			42 - 48	

VIVA 40 - 70 - 140 den

Linea riposante

Taglia	Peso kg																																			
	40	42	43	45	46	48	49	51	52	54	55	57	58	60	61	63	64	66	67	69	70	72	73	75	76	78	79	81	82	90						
< 150																																				
150-152																																				
153-155																																				
156-158																																				
159-161	1																																			
162-164	1				2																															
165-167	1						2						3																							
168-170	1								2								3																			
171-173	1										2										3															
174-176	1												2												3											
177-179	1														2														3							
> 180																																				

VARISAN® ETHERÉ

		CIRCONFERENZA (cm)				
Taglia		1	2	3	4	5
Coscia	G	50 - 56	53 - 59	56 - 62	59 - 65	62 - 70
Polpaccio	C	29 - 32	32 - 36	36 - 40	40 - 44	43 - 48
Caviglia	B	18 - 20	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 32
		LUNGHEZZA (cm)				
		Corto			Normale	
Gambaletto	AD	≤ 37			> 37	
Calza	AG	≤ 74			> 74	

VARISAN® SOFT

		CIRCONFERENZA (cm)				
Taglia		1	2	3	4	5
Coscia	G	50 - 56	53 - 59	56 - 62	59 - 65	62 - 70
Polpaccio	C	29 - 32	32 - 36	36 - 40	40 - 44	43 - 48
Caviglia	B	18 - 20	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 32
		LUNGHEZZA (cm)				
		Corto			Normale	
Gambaletto	AD	≤ 37			> 37	
Calza	AG	≤ 74			> 74	

VARISAN® LUI & LEI

		CIRCONFERENZA (cm)				
Taglia		1	2	3	4	5
Polpaccio	C	30 - 36	34 - 40	38 - 44	42 - 48	46 - 52
Caviglia	B	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30	30 - 33

VARISAN® PASSO

		CIRCONFERENZA (cm)				
Taglia		1	2	3	4	5
Polpaccio	C	30 - 36	34 - 40	38 - 44	42 - 48	46 - 52
Caviglia	B	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30	30 - 33
		LUNGHEZZA (cm)				
		Corto			Normale	
Gambaletto	AD	≤ 40			> 40	

VARISAN® LUI

		CIRCONFERENZA (cm)				
Taglia		1	2	3	4	5
Scarpa		38 - 40	40 - 41	41 - 42	42 - 44	44 - 46
		6 - 7½	7½ - 8	8 - 8½	8½ - 10½	10½ - 12½

VARISAN® A.T.E.®

Calze antitromboemboliche 18 mmHg

CIRCONFERENZA (cm) RP									
Taglia	XS	S	SXL*	M	MXL*	L	LXL*	XL	
Coscia	G	38-52	46-62	54-72	54-72	62-82	62-82	70-92	80-102
Polpaccio	C	24-38	28-44	-	32-48	-	36-52	-	40-56
Caviglia	B	16-19	19-22	19-22	22-26	22-26	26-30	26-30	30-34
LUNGHEZZA (cm)									
Corto									
Normale									
Gambaletto	AD				36 - 41			42 - 48	
Calza autoreggente	AG				60-82				
Monocollant									
CIRCONFERENZA (cm) CP COTONE									
Taglia	XS	S	SXL*	M	MXL*	L	LXL*	XL	
Coscia	G	40-50	48-60	60-70	56-70	70-80	64-80	80-90	
Caviglia	B	17-19	20-22	20-22	23-25	23-25	26-28	26-28	
Calza autoreggente/ Monocollant		•	•	•	•	•	•	•	

*Le taglie XL a parità di caviglia, offrono una vestibilità superiore alla coscia.

VARISAN® RECOVER24

Calze post-operatorie 24 mmHg

CIRCONFERENZA (cm)								
Taglia	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL		
Coscia	G	45 - 55	50 - 60	55 - 65	60 - 71	66 - 78	73 - 85	
Polpaccio	C	29 - 35	31 - 38	34 - 41	37 - 44	40 - 48	44 - 52	
Caviglia	B	18 - 20	20 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31	31 - 34	
LUNGHEZZA (cm)								
Corto								
Normale								
Gambaletto	AD				36 - 41		42 - 48	
Calza	AG				66 - 73		74 - 82	

VARISAN® RECOVER35

Calze post-operatorie 35 mmHg

CIRCONFERENZA (cm)								
Taglia	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL		
Coscia	G	45 - 55	50 - 60	55 - 65	60 - 71	66 - 78	73 - 85	
Polpaccio	C	29 - 35	31 - 38	34 - 41	37 - 44	40 - 48	44 - 52	
Caviglia	B	18 - 20	20 - 22	22 - 25	25 - 28	28 - 31	31 - 34	
LUNGHEZZA (cm)								
Corto								
Normale								
Gambaletto	AD				36 - 41		42 - 48	
Calza	AG				66 - 73		74 - 82	

VARISAN® DLS KIT

CIRCONFERENZA (cm)											
Taglia	1		2		3		4		5		
	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	
Coscia	G	50-55	53-58	53-58	56-61	56-61	60-66	60-66	64-70	64-70	70-77
Polpaccio	C	31-34	34-37	34-37	37-40	37-40	40-44	40-44	44-48	44-48	48-52
Caviglia	B	19-20		21-23		23-25		25-27		28-30	
LUNGHEZZA (cm)											
Corto											
Normale											
Gambaletto	AD				36 - 41			42 - 48			
Calza	AG				66 - 73			74 - 82			

VARISAN® ULCER-KIT



CIRCONFERENZA (cm)											
Taglia	1		2		3		4		5		
	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	NORMALE	PLUS	
Polpaccio	C	31-34	34-37	34-37	37-40	37-40	40-44	40-44	44-48	44-48	48-52
Caviglia	B	19-20		21-23		23-25		25-27		28-30	
LUNGHEZZA (cm)											
Corto											
Normale											
Gambaletto	AD				36 - 41			42 - 48			

VEINALGIC®

CIRCONFERENZA (cm)				
Taglia	1	2	3	
Polpaccio	C	30 - 35	34,5 - 40,5	40 - 47
Coscia	G	44 - 51	50 - 59	58 - 68

VARISAN® FLAT



Bracciale e guanto terapeutico
trama piatta - standard

TUTORI STANDARD						
CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia	XS	S	M	L	XL	
	cG	27-29,5	29,5-32	32-35	35-38,5	38,5-42
	cE	24-26	26-28,5	28,5-31	31-34	34-37
	cC	15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-21	21-23
	cA	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26
	cB	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27
	cC	15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-21	21-23

TUTORI STANDARD		
LUNGHEZZA BRACCIO fino al polso (cm)		
	Corto	Normale
CG	40 - 44	45 - 49
AG	40 - 44	45 - 49
LUNGHEZZA MANO (cm)		
AB	3 - 5	
AC	9 - 12	

VARISAN® FIBERLUX®



Bracciale e guanto terapeutico trilobato
in trama piatta - standard

TUTORI STANDARD						
CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia	XS	S	M	L	XL	
	cG	27-29,5	29,5-32	32-35	35-38,5	38,5-42
	cE	24-26	26-28,5	28,5-31	31-34	34-37
	cC	15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-21	21-23
	cA	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26
	cB	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27
	cC	15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-21	21-23

TUTORI STANDARD		
LUNGHEZZA BRACCIO fino al polso (cm)		
	Corto	Normale
CG	40 - 44	45 - 49
AG	40 - 44	45 - 49
LUNGHEZZA MANO (cm)		
AB	3 - 5	
AC	9 - 12	

VARISAN® TOP

Bracciale terapeutico trama circolare - standard

TUTORI STANDARD						
CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia	XS	S	M	L	XL	
	cG	27-29,5	29,5-32	32-35	35-38,5	38,5-42
	cE	24-26	26-28,5	28,5-31	31-34	34-37
	cC	15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-21	21-23
	cA	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26
	cB	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27
	cC	15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-21	21-23

TUTORI STANDARD		
LUNGHEZZA BRACCIO fino al polso (cm)		
	Corto	Normale
CG	38-43	44-50

VARISAN® TOP

Guanto terapeutico senza cuciture - standard

TUTORI STANDARD						
CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia	XS	S	M	L	XL	
	A	16 - 18	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26
	B	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27
	C	15 - 16,5	16,5 - 18	18 - 19,5	19,5 - 21	21 - 23

TUTORI STANDARD		
LUNGHEZZA (cm)		
	3 - 5	
AB	3 - 5	
AC	9 - 12	

Linea linfologica - tabelle di vestibilità

Sweet compress *Autobendaggio per la terapia dell'edema*
Arto superiore - standard

CIZETA

ARTO SUPERIORE					
CIRCONFERENZA (cm)					
Taglia	XS	S	M	L	XL
Punti di misurazione					
cG	27-29,5	29,5-32	32-35	35-38,5	38,5-42
cE	24-26	26-28,5	28,5-31	31-34	34-37
cC	15-16,5	16,5-18	18-19,5	19,5-21	21-23

Sweet compress *Autobendaggio per la terapia dell'edema*
Arto inferiore - standard

CIZETA

ARTO INFERIORE						
CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia	4	6	8	10	12	14
Punti di misurazione						
cG	44-48	47-51	50-55	54-59	58-63	62-68
cF	41-45	43-47	46-50	49-53	51-56	55-60
cE	32-35	34-37	36-39,5	39-42	41-45	44-48
cD	28-30,5	30-33	32,5-35,5	35-38,5	38-41,5	41-45
cC	30-33	32-35	34,5-37,5	37-40,5	40-44	43-47
cB1	23-25	25-27	27-29,5	29,5-32	32-35	35-38
cB	18,5-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
cY	28-30,5	30-33	32-35	34-37	36-39	38-41
cA	18,5-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30

VARISAN® FLAT

Calze compressive medicale trama piatta - standard

TUTORI STANDARD						
CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia	4	6	8	10	12	14
Punti di misurazione						
cG	44-48	47-51	50-55	54-59	58-63	62-68
cF	41-45	43-47	46-50	49-53	51-56	55-60
cE	32-35	34-37	36-39,5	39-42	41-45	44-48
cD	28-30,5	30-33	32,5-35,5	35-38,5	38-41,5	41-45
cC	30-33	32-35	34,5-37,5	37-40,5	40-44	43-47
cB1	23-25	25-27	27-29,5	29,5-32	32-35	35-38
cB	18,5-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
cY	28-30,5	30-33	32-35	34-37	36-39	38-41
cA	18,5-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30



TUTORI STANDARD		
LUNGHEZZA (cm)		
	Corto	Normale
AD	35 - 39	40 - 45
AG	64 - 71	72 - 80

Linea lipedema - tabelle di vestibilità

LIPOCARE® LIGHT

Tutore compressivo medicale
in trama circolare - standard

CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
Coscia	G 45-55	50-60	55-65	60-71	66-78	73-85
Polpaccio	C 29-35	31-38	34-41	37-44	40-48	44-52
Caviglia	B 18-20	20-22	22-25	25-28	28-31	31-34

LUNGHEZZA (cm)	
	Normale
AG	74-82

LIPOCARE® STRONG

Tutore compressivo medicale
in trama piatta - standard

CIRCONFERENZA (cm)							
Taglia	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	7/XXXL
Punti di misurazione							
cT	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135
cH	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	135-145	145-155
cG	44-55	48-59	52-63	56-67	60-71	64-75	68-79
cF	43-52	47-56	51-60	55-64	59-68	63-72	67-76
cE	32-37	35-40	38-43	41-46	44-59	47-52	50-55
cD	28-33	30-35	32-37	34-39	36-41	38-43	40-45
cC	30-36	33-39	37-43	40-46	43-49	46-52	49-55
cB1	23-29	26-31	29-35	32-38	35-41	38-44	41-46
cB	18-21	20-23	22-25	24-26	25-29	28-32	31-35

LUNGHEZZA (cm)	
	Normale
AG	72-80

Linea sport Compression Zone® - tabelle di vestibilità



Calzino Performance

CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia	1	2	3	4	5	
Caviglia	B	21-23	22-24	23-26	25-28	27-30
N. Piede		36-38	38-40	40-43	43-45	45-47

Cosciale Performance & Recover

CIRCONFERENZA (cm)					
Taglia	1	2	3	4	
Coscia	G	46-49	48-52	51-56	56-60
Ginocchio	F	35-38	37-41	40-44	43-47

Calza Performance / Calza Recover

CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia	1	2	3	4	5	
Polpaccio	C	32-36	34-38	36-42	40-46	44-50
Caviglia	B	21-23	22-24	23-26	25-28	27-30
N. Piede		36-38	38-40	40-43	43-45	45-47

Gambale Performance / Gambale Recover

CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia	1	2	3	4	5	
Coscia	G	46-49	48-52	51-56	55-60	59-64
Sopra ginocchio	F	35-38	37-41	40-44	43-47	46-50
Polpaccio	C	32-36	34-38	36-42	40-46	44-50
Caviglia	B	21-23	22-24	23-26	25-28	27-30
N. Piede		36-38	38-40	40-43	43-45	45-47

Polpaccio Performance

CIRCONFERENZA (cm)						
Taglia	1	2	3	4	5	
Polpaccio	C	32-36	34-38	36-42	40-46	44-50
Caviglia	B	21-23	22-24	23-26	25-28	27-30

Bracciale Performance

CIRCONFERENZA (cm)					
Taglia	1	2	3	4	
Braccio	G	24-28	27-31	30-34	33-37
Polso	C	14-16	16-19	19-22	21-24



SCIENCE & MEDICAL
QUALITY

CIZETA MEDICALI S.p.A.
Via IV Novembre, 46 - 20012 Cuggiono (MI) Italy
Tel. +39 02.9721811 - Fax + 39 02.97240734
www.cizetamedicali.com - info@cizetamedicali.com



@cizetamedicali

Servizio clienti:
Lunedì/Venerdì
08.30 - 12.30
13.30 - 17.30

